

Cortador Quirúrgico de Vello 3M Clipper® 9681



# 3M Clipper® Nueva Generación Nuevos Beneficios

Cortador Quirúrgico de Vello 3M Clipper® 9681, combina un diseño y desempeño superior que contribuyen a minimizar el riesgo de infecciones y disminuir el tiempo del corte de vello del paciente.



## **Beneficios**

- Menor índice de cortes y rasguños.
- Mayor superficie de corte.
- Un solo cuchillo elimina todo tipo de vello o cabello.
- Mayor velocidad de corte.
- Indicador de estado de carga de la batería.
- Mayor autonomía de carga.

## Cuchillo único


El cuchillo 3M Clipper® 9681 permite el corte de vello en todo tipo de procedimientos (Ej.: traumatológicos, neuroquirúrgicos, gineco-urológicos, etc.)

El uso de un único cuchillo estandariza los procedimientos y agiliza los procesos de compra.

# Bajo índice de cortaduras

El cuchillo 3M Clipper® 9681 tiene un diseño exclusivo que evita que la hoja cortadora pellizque la piel. Estudio clínico realizado por BioScience Laboratories, Inc., Bozeman y presentado en el 60° Congreso Anual de AORN año 2013, señala que el Cortador Quirúrgico de Vello 3M Clipper® 9681 obtuvo un índice de cortaduras de sólo el 5 %, en comparación con el 25 % de CareFusion® cód. 4406, y el 12,5 % de Medline® cód DYND70850.1



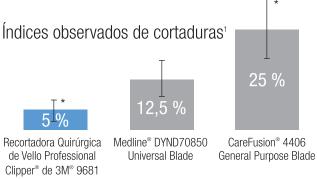

### \*La diferencia es estadísticamente significativa (P = 0,004)

### Potencia de la Batería

Alimentada por una batería de iones de litio, el Cortador Quirúrgico de Vello 3M Clipper® 9681 ofrece 160 minutos de corte con una recarga de 3 horas. Esta nueva generación de baterías tiene mayor vida útil, funcionando siempre con plena potencia aún cuando no esté totalmente cargada.

### 1. Instalación del Cuchillo



Quite la parte de atrás del empaque del cuchillo. Sin tocarlo, sostenga el cortador por encima del cuchillo y deslícelo hacia la posición correcta, hasta que haga un click.

# 2. Recorte de Vello





Coloque el cortador sobre la superficie de la piel como un lápiz o en dirección opuesta a usted. Con el cuchillo plano o en un ángulo pequeño, empújela suavemente hacia adelante contra la dirección en que crece el cabello o el vello del paciente.

# 3. Eliminación del Cuchillo



Sobre un recipiente para desechos cortopunzantes, sostenga el cuchillo hacia abajo y con el pulgar presione el botón para soltarlo. Éste caerá.

### 4. Limpieza



Con el cortador Clipper<sup>®</sup> apagado, enjuague bajo un chorro de agua tibia. Seque completamente antes de volver a cargarlo o usarlo.

### 5. Desinfección



Desinfecte el cortador Clipper<sup>®</sup> en toda su superficie, utilizando un paño humedecido con alcohol.

### 6. Carga de Batería



Cada vez que termine de utilizarlo, coloque el cortador Clipper® apagado sobre el soporte del cargador enchufado. La luz LED presente en el cortador titilará mientras ésta se carga.

Cuando esté totalmente cargado, los tres medidores de la luz LED presentes en el cortador, se pondrán verdes.

Con una recarga de 3 horas, puede utilizar Clipper  $^{\! \otimes}$  durante 160 minutos.

**Importante primera carga:** Antes de utilizarlo por primera vez, cárguelo durante 3 horas continuas.



# Cortadores quirúrgicos Características, forma y funcionamiento

| Características                  | Cortador Quirúrgico de Vello<br>Clipper <sup>®</sup> Nueva Generación<br>para cuchillo 9 <del>6</del> 80 | CareFusion <sup>®</sup> 4413A<br>con hoja 4406  | Medline <sup>®</sup> DYND70840 con hoja<br>DYND70850 |  |
|----------------------------------|--|---|--|--|
| Cabello                          | Sí   | No  | No   |  |
| Ancho de corte                   | 36,4 mm  | 31,8 mm <sup>2</sup>                            | 33,0 mm <sup>2</sup>                                 |  |
| Hoja                             | Inserción y extracción por<br>desplazamiento con una sola mano   | Correspondencia con las marcas<br>de alineación | Presionar/soltar                                     |  |
| Posición de la hoja<br>cortadora | Alejada de la piel   | Cercana a la piel                               | Alejada de la piel                                   |  |
| Índice de cortaduras             | 5 % <sup>1</sup>   | 25 % <sup>1</sup>                               | 12,5 % <sup>1</sup>                                  |  |
| Velocidad                        | 356 mm/s <sup>2</sup>  | 160 mm/s <sup>2</sup>                           | 37 mm/s <sup>2</sup>                                 |  |
| Tiempo de uso sin cable          | 160 minutos  | 60 minutos                                      | 60 minutos   |  |
| Tiempo de recarga                | 3 horas  | 12 horas  | 10 horas   |  |
| Protección contra<br>sobrecarga  | Sí   | No  | No   |  |
| Limpieza                         | Enjuague/inmersión/desinfección  | Enjuague/inmersión/desinfección <sup>3</sup>    | Enjuague/desinfección <sup>4</sup>                   |  |
| Empuñadura antideslizante        | Sí   | No  | No   |  |
| Tipo de batería                  | lones de litio   | NiMH  | NiMH   |  |

## Información de Producto

| Código 3M | Descripción   | Unidad de<br>venta | Empaque              |
|-----------|---|--------------------|----------------------|
| 9681      | Cortador Quirúrgico de Vello Clipper®. Nueva Generación para cuchillo 9680. | Caja               | 1 Unidad/Caja        |
| 9680      | Cuchillo para Cortador Quirúrgico de Vello Clipper®. Nueva Generación 9681. | Caja               | 50 Unidades/<br>Caja |
| 9683      | Cargador para Cortador Quirúrgico de Vello Clipper®. Nueva Generación 9681. | Caja               | 1 Unidad/Caja        |

Para mayor información visítenos en www.3msalud.cl/clipper

#### Referencias

- 1 Estudio EM-05-012508
- 2 Verificado por las pruebas de 3M
- 3 Información sobre el producto CareFusion®
- 4 Información sobre el producto Medline®



**3M Chile S.A.** Para mayor información sobre estos productos:

600 300 3636 atencionconsumidor@mmm.com

o visítenos en www.3msalud.cl

**3M Chile S.A.**Santa Isabel 1001
Providencia, Santiago, Chile