



Apósito Tegaderm[®] Hidrocoloide

- 3M Tegaderm[®] Hidrocoloide es una matriz de CMC que controla exudado, genera un ambiente húmedo de reparación y mantiene la herida lejos de los contaminantes externos.

CARACTERÍSTICAS

La composición de 3M Tegaderm[®] Hidrocoloide consiste en: Croscarmellose de sodio, poliisopreno, poliisobutileno, carboximetil celulosa sódica, politerpeno sintético. Permite una buen nivel de absorción, controlando el exudado de forma eficiente. Los hidrocoloides 3M en contacto con el exudado se disuelven formando un gel blando, absorbente y semitransparente, que proporciona condiciones de humedad óptimas para la curación de la herida, ya que facilitan la migración y mitosis de las células epiteliales promoviendo el proceso de regeneración del lecho de la herida, al mismo tiempo que se favorece la autólisis del tejido muerto. Los apósitos 3M Tegaderm[®] Hidrocoloide están disponibles en versiones normales y finas.

VENTAJAS

3M Tegaderm[®] Hidrocoloide en algunas versiones presenta una cubierta semipermeable de poliuretano (Tegaderm[®]) que permite que se adhiera a piel. El gel formado no se disgrega cuando absorbe el exudado de la herida y posee una excelente capacidad de absorción. Comparativamente frente a apósitos similares, presenta una capacidad de absorción superior en las primeras 48 horas.

Los apósitos 3M Tegaderm[®] Hidrocoloide son hipoalergénico, no tóxicos y no irritantes. Además no contienen látex y son esterilizados mediante radiación gamma.



BENEFICIOS

3M Tegaderm[®] Hidrocoloide junto con controlar el exudado leve a moderado estimula el desbridamiento autolítico. Es un apósito adaptable, moldeable, no voluminoso debido a su perfil fino. Es ligeramente elástico y se estira con una mínima tensión de la piel adaptándose a los movimientos naturales del paciente, lo cual disminuye los problemas por fricción. Su transparencia permite la visualización de la herida para la correcta colocación del apósito y el control del estado de la herida, del exudado y de la piel circundante. La cobertura de poliuretano en algunas versiones de 3M Tegaderm[®] Hidrocoloide permite que la herida tenga un buen intercambio gaseoso con el exterior, pero impide que ingresen contaminantes y bacterias desde el exterior. La cobertura permite una mejor fijación a la piel del paciente, prolongando su permanencia sin la necesidad de reforzar los bordes con cintas quirúrgicas. Las presentaciones de forma ovalada y sacra son ideales para mantener mejor contacto con las posibles heridas del paciente.

Mantiene la herida lejos de los contaminantes externos.



■ Indicaciones:

En heridas con pérdida de espesor de la piel parcial o total con exudado leve a moderado utilice 3M Tegaderm[®] Hidrocoloide normal. Para heridas superficiales con leve pérdida de espesor 3M recomienda el uso de Tegaderm[®] Hidrocoloide fino.

■ Precauciones de uso:

El tratamiento de cualquier herida cutánea debe formar parte de un protocolo terapéutico bien definido, vigilado por profesionales de la salud. Al empezar a utilizar 3M Tegaderm[®] Hidrocoloide, la úlcera aparenta ser más grande y profunda conforme se va eliminando el tejido de desecho. Este aumento en las dimensiones debe estar acompañado de una mejora en el aspecto de la herida. Si la herida aumenta de tamaño después de los primeros cambios de apósito, reevaluar el tratamiento.

Observar si hay señales de infección. Si se manifiesta una infección, cuyos signos pueden ser: fiebre, intensificación del dolor, enrojecimiento, sangrado, hinchazón, presencia de olores y pus, consultar al profesional de la salud tratante.

■ Aplicación:

- Corte el exceso de vello.
- Con la piel limpia y seca, aplique el hidrocoloide.
- Permita que exceda unos 2,5 cm sobre la piel sana.
- Si la piel del paciente es frágil, proteja con 3M PPSA Cavilon[®].
- En el caso de la presentación ovalada, tome el apósito de la etiqueta N°1 y desprenda la base para exponer la matriz de Hidrocoloide.
- Centre sobre la herida y deje caer sobre esta, sin aplicar tensión.
- Tome la etiqueta N°2 y desprenda de la superficie del apósito, realice presión fuerte en el borde transparente.
- Una vez que está firmemente adherido a la piel corte la etiqueta N°1.
- La presentación sacra debe doblarse en la parte central antes de retirar la base para exponer el adhesivo.

■ Retiro:

- Desprenda desde un borde, para esto puede usar un trozo de cinta presiónándola firmemente y luego levantar el borde.
- Puede usar la técnica de estiramiento o la de 180° para desprender el borde adhesivo.

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
90001	3M Tegaderm [®] Hidrocoloide Ovalado	7 cm x 9 cm	Caja	5
90002	3M Tegaderm [®] Hidrocoloide Cuadrado	10 cm x 10 cm	Caja	5
90003	3M Tegaderm [®] Hidrocoloide Ovalado	10 cm x 12 cm	Caja	5
90004	3M Tegaderm [®] Hidrocoloide Ovalado	14 cm x 17 cm	Caja	3
90007	3M Tegaderm [®] Hidrocoloide Sacro	12 cm x 14 cm	Caja	6
90021	3M Tegaderm [®] Hidrocoloide Fino Ovalado	7 cm x 9 cm	Caja	10
90022	3M Tegaderm [®] Hidrocoloide Fino Cuadrado	10 cm x 10 cm	Caja	5
90023	3M Tegaderm [®] Hidrocoloide Fino Ovalado	10 cm x 12 cm	Caja	10