



Lamina de Contacto no Adherente Tegaderm[®] Contact

- Lamina de contacto no adherente que protege el tejido de granulación ayudando a mejorar la cicatrización.

CARACTERISTICAS

3M Tegaderm[®] Contact está formada por tejidos de monofilamentos de poliamida (nylon) con bordes sellados. El material es permeable, lo que permite la eliminación del exudado y evita la maceración de la herida.

VENTAJAS

El apósito 3M Tegaderm[®] Contact es de un material libre de partículas, no adherente, no irritante e hipoalergénico. Además no contiene partículas de látex.

BENEFICIOS

3M Tegaderm[®] Contact permite minimizar el trauma en las heridas y con esto no afectar la cicatrización. Además puede permanecer en la herida hasta siete días.

Otro beneficio diferenciador de este producto es que se puede irrigar la herida sin la necesidad de sacar el apósito.

Para impedir que se adhieran a la herida otros apósitos o que dejen residuos, 3M Tegaderm[®] Contact puede combinarse con apósitos transparentes, espumas, gasa u otro tipo de apósito secundario.

Su porosidad permite la medicación con ungüentos sin retirarlo y si tener contacto directo con la herida.

3M Tegaderm[®] Contact permite hacer menos doloroso el cambio de apósitos.



Puede permanecer en la herida hasta 7 días.

■ Indicaciones:

3M Tegaderm[®] Contact está indicado para aplicarse directamente sobre heridas, incisiones quirúrgicas limpias cerradas, desgarramientos de piel, quemaduras, heridas crónicas o traumáticas no infectadas y zonas dadoras de injertos de piel.

Además debe ser utilizado con un apósito secundario, como por ejemplo: Apósitos transparentes, hidrocoloides o cualquier otro tipo.

■ Advertencias:

Se debe observar frecuentemente la herida para detectar signos de infección. En caso de infección, 3M Tegaderm[®] Contact necesitará ser removido de forma más frecuente según el régimen de curaciones.

■ Consejos de Aplicación y Remoción:

Luego de hacer la curación, coloque directamente sobre la herida, dejando un centímetro de 3M Tegaderm[®] Contact sobre la piel sana.

Si necesita recortarlo hágalo sin sacarlo del sobre interno que contiene el apósito.

Si al remover el apósito, este se encuentra adherido a la piel del paciente, irrigue con solución salina la herida (sobre el apósito) y retire suavemente.



Código Producto	Descripción	Medida	Unidad de Venta	Unidades de Productos
5642	3M Tegaderm [®] Contact	7.5 cm x 10 cm	Caja	10
5643	3M Tegaderm [®] Contact	7.5 cm x 20 cm	Caja	10
5644	3M Tegaderm [®] Contact	20 cm x 25 cm	Caja	5