

Tegaderm™ Foam



Nueva Espuma Hidrofílica Tegaderm® Foam

El nuevo apósito Tegaderm® Foam se adapta a distintos niveles de exudado, para proporcionar un ambiente con humedad controlada, por lo que se puede utilizar en heridas con leve, moderado o abundante exudado. Su diseño multicapas permite absorber y evaporar humedad, disminuyendo el riesgo de maceración y no se adhiere al lecho de la herida.

Absorbe y evapora exudado

Incorpora tecnología innovadora que absorbe y evapora exudado, para mantener un ambiente con humedad controlada.


- Se puede usar en heridas con leve, moderado o abundante exudado.
- Diseño multicapas que permite absorber y evaporar humedad, disminuyendo el riesgo de maceración.
- Se adapta a distintos niveles de exudado, para proporcionar un ambiente con humedad controlada.
- Efectivo bajo sistemas compresivos
- Fácil de usar



El Nuevo Apósito Tegaderm® Foam está compuesto por una capa de poliuretano conformable, capas de material absorbente no tejido y una capa externa semipermeable, que es impermeable al agua y contaminantes externos como bacterias y virus*, mientras permite la evaporación de exudado como vapor para prevenir la maceración. El apósito Tegaderm Foam mantiene un medio ambiente húmedo para favorecer la cicatrización.

*Test in vitro muestran que el film de poliuretano externo provee una barrera efectiva para virus de 27nm de diámetro o mayores, cuando el apósito está bien puesto y no se ha filtrado



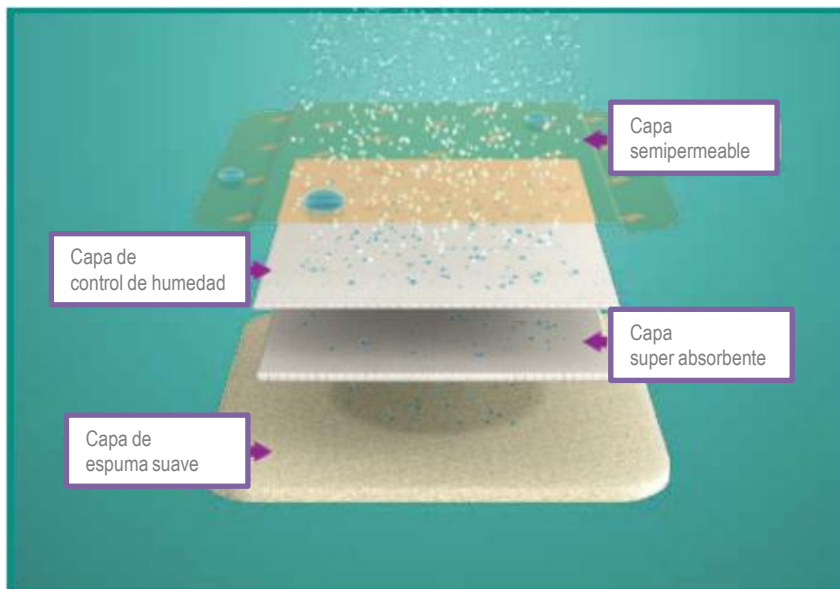

La ciencia detrás de la excelencia en manejo de exudado de Tegaderm® Foam de 3M

Primero, la *capa suave de espuma* absorbe rápidamente el exudado hacia la *capa super absorbente*. Luego, el exudado se distribuye en la *capa que controla la humedad* para posteriormente ser evaporado a través de la *capa semipermeable*.

Indicaciones de uso

El apósito Tegaderm Foam puede ser usado como apósito primario o secundario, para heridas con niveles de exudado bajo, moderado o abundante, de espesor parcial o total como:

- Úlceras por Presión
- Úlceras venosas y neuropatías
- Desgarros de piel
- Zonas dadoras
- Heridas operatorias
- Abrasiones
- Quemaduras
- Alrededor de drenajes y traqueotomías
- Se puede usar bajo compresión

Consideraciones:

- El exudado absorbido subirá por las capas del apósito haciendo cambiar de color la superficie externa. Debe cambiar el apósito cuando esté manchado completamente o comience a filtrar.
- La frecuencia de cambio del apósito depende del tipo de herida, volumen de exudado y condición del paciente. Cambie al menos cada 7 días o según los protocolos de su institución.
- El apósito puede ser usado como cobertura absorbente sobre otros apósitos como Tegaderm® Alginato
- Tegaderm® Foam puede ser cortado para acomodar a la forma y bordes de la herida.
- Para asegurar una adecuada evaporación de humedad a través del apósito, si usa cintas adhesivas póngalas sólo en los bordes del apósito, en forma de marco. La total cobertura de su superficie con adhesivos podría comprometer su capacidad de evaporación de exudado.
- El apósito Tegaderm Foam, se puede fijar con vendajes, incluso se puede usar bajo vendajes compresivos.

Cod Corto	Descripción	Medida	Unidad de Venta	Unidades por caja
90601	Tegaderm Foam	10cm x 10cm	caja	10
90602	Tegaderm Foam	10cm x 20cm	caja	5