



Tegaderm[®] Hidrogel

- La humedad justa para optimizar el proceso regenerativo de la herida.

CARACTERÍSTICAS

3M Tegaderm[®] Hidrogel es un apósito para relleno de heridas, estéril, amorfo y sin preservantes. Especialmente formulado para proporcionar humedad a las heridas secas, manteniendo un ambiente húmedo que favorece la cicatrización, impide la desecación y promueve el desbridamiento autolítico de la herida seca, proporcionando humedad al tejido desvitalizado.

Ingredientes: Agua (Sobre el 90%), propilenglicol (sustancia hidratante), goma guar (mantiene humedad en el sistema) y tetraborato sódico (sal que estabiliza el sistema).

Al aplicar es necesario un apósito secundario para minimizar la pérdida de hidrogel y maximizar su interacción en la herida. Se recomienda el uso de Apósitos transparentes (Tegaderm[®]) en caso de heridas no infectadas. No contiene látex.

VENTAJAS

Presentación en tubo de 15 gr individual por paciente, que es lo recomendado por el MINSAL.

Se puede utilizar en todo tipo de heridas que necesiten recibir alta dosis de humedad: Pie diabético, úlceras por presión, úlceras Venosas, desgarros cutáneos, abrasiones, heridas con tejido necrótico y/o esfacelo.


Puede interactuar exitosamente con Tegaderm[®] Ag Mesh en caso de heridas infectadas y desecadas. Además no es citotóxico.

No tiene almidón en su composición.

BENEFICIOS

3M Tegaderm[®] Hidrogel se puede aplicar sobre una gasa estéril y utilizarse para rellenar heridas con socavones. Al no tener preservantes no produce ardor.

El cambio de apósito es sencillo. 3M Tegaderm[®] Hidrogel se retira fácilmente de la herida; Casi no deja residuos de gel. En caso que queden algunos residuos estos pueden ser eliminados con solución salina estéril.

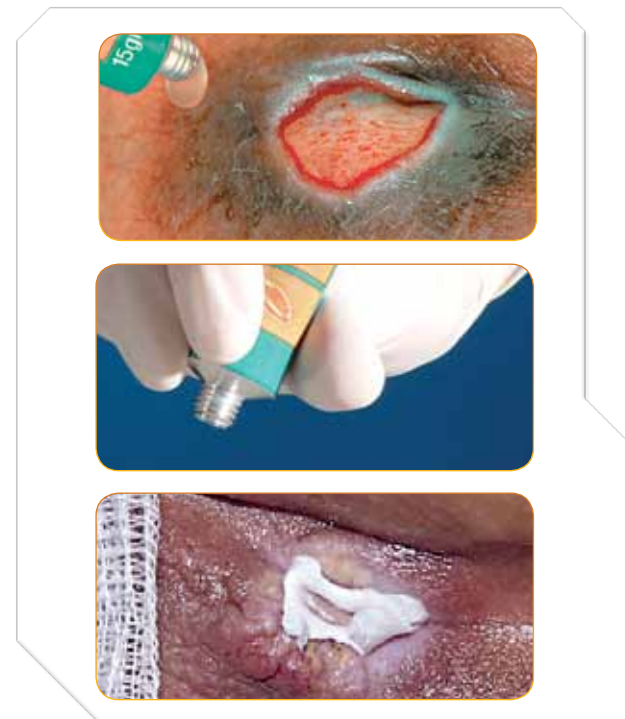

Especialmente formulado para proporcionar humedad.

■ Indicaciones:

3M Tegaderm[®] Hidrogel está indicado como apósito primario para heridas dérmicas de espesor parcial y total que sean poco o nada exudativas:

- Úlceras por presión.
- Úlceras venosas.
- Úlceras arteriales.
- Úlceras diabéticas.
- Heridas quirúrgicas con complicaciones.
- Infectadas sólo bajo la supervisión de un profesional sanitario.
- Quemaduras superficiales y de espesor total.
- Desgarros de piel.
- Abrasiones.
- Dermatitis por irradiación.
- Úlceras que muestren una costra seca y fibrosa.

■ Precauciones:

Inicialmente puede que la herida aumente de tamaño y profundidad como consecuencia del retiro del tejido innecesario. Este cambio en la herida se relaciona con el mejoramiento de la apariencia de esta.

3M Tegaderm[®] Hidrogel puede ser utilizado en heridas infectadas bajo la supervisión de un profesional de la salud.

■ Aplicación:

- Usted puede usar Película Protectora Sin Ardor Cavilon[®] para proteger la piel circundante a la herida.
- Aplique 3M Tegaderm[®] Hidrogel, de manera que cubra el 90% de la herida sin sobrepasar los bordes.
- Aplique un apósito secundario apropiado para manejar y mantener la humedad en el lecho de la herida.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
91110	Tegaderm [®] Hidrogel	15 gr por tubo	Caja	10 tubos