

# Tegaderm® Superabsorber



## Atrapa el exudado

## y comienza a ahorrar

Diseñado para manejar altos niveles de exudado a costos considerablemente más bajos.

Gracias a su absorción vertical, este innovador apósito estéril, disminuye el riesgo de maceración en los bordes de las heridas.




Útil en úlceras venosas, úlceras por presión, úlceras por pie diabético y otras que produzcan gran cantidad de exudado.

### CARACTERÍSTICAS:

- Su interior de **policrilato** de sodio y celulosa, absorbe exudado junto con las **metaloproteasas** y **bacterias** presentes en él, las retiene dentro de su estructura.
- Posee una cubierta interna antiadherente de color blanco y una capa superior hidrófoba de color verde, que evita la fuga de fluidos. Ambas de material no tejido de polipropileno.

### VENTAJAS:

- Absorbe más que las espumas tradicionales.
- Remueve el exceso de **metaloproteasas** (MMP) y las **bacterias** presentes en el exudado.
- Permite disminuir la frecuencia de cambio de apósitos en heridas altamente exudativas.
- Puede usarse en conjunto con terapias compresivas.
- Mantiene el medio ambiente húmedo y optimiza la cicatrización.

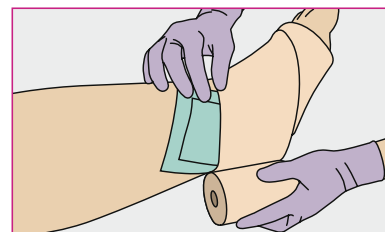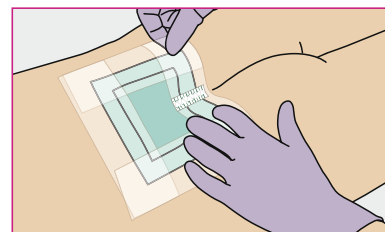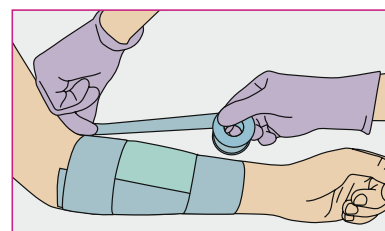

## BENEFICIOS:

- Altamente absorbente.
- Fácil aplicación y remoción.
- Confortable de usar.
- Superficie permanece seca al tacto.
- Gentil con su presupuesto.
- Puede ser utilizado tanto como un apósito primario o secundario.

## INSTRUCCIONES DE USO:

Indicaciones: Heridas exudativas limpias o infectadas como heridas operatorias, úlceras venosas, úlceras por presión, úlceras de pie diabético y otras con altos niveles de exudado.

1. Seleccione un tamaño de Apósito que permita dejar 2.5 cms, como mínimo, superpuestos sobre la piel intacta.
2. Para las heridas profundas, utilice rellenos absorbentes tales como Tegaderm® Alginato o Tegaderm® Alginato Ag.
3. Aplique el apósito Tegaderm® Superabsorber con el lado blanco hacia la herida. El lado verde es el respaldo hidrófobo que evita la fuga de exudado a través del apósito.
4. Fije el apósito en los bordes con cinta adhesiva u otro aseguramiento, como Cinta de Silicona® de 3M o Cinta Medipore® H de 3M.
5. En heridas infectadas, cambie según protocolo de su institución.

## PRECAUCIONES DE USO:

- Usar con lado blanco en contacto con la herida.
- No usar en contacto con mucosas, vísceras, huesos o tendones, ni en heridas con bajo nivel de exudado.
- No utilizar apósito Tegaderm® Superabsorber para rellenar cavidades, ya que aumenta de volumen al absorber el exudado.
- No cortar ni reesterilizar.

## Innovación diseñada para absorber y contener exudado, incluso bajo compresión.



CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA: CAJA	UNIDADES POR CAJA
90701	3M® Tegaderm® Superabsorber	10 x 10 cm	Caja	10
90702	3M® Tegaderm® Superabsorber	20 x 10 cm	Caja	10

[www.3msalud.cl](http://www.3msalud.cl)

3M Chile S.A.  
División Salud  
Santa Isabel 1001  
Providencia, Santiago  
Atención al Consumidor: 600 300 3636  
atencionconsumidor@3m.com

**3M**