



Apósito con Plata Tegaderm® Ag Mesh

- El apósito con plata 3M Tegaderm® Ag Mesh libera plata iónica en forma rápida, efectiva y sostenida en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS

El apósito con plata 3M Tegaderm® Ag Mesh es un apósito no tejido que contiene sulfato de plata en concentración de 8 mg/g de apósito. El sulfato de plata se libera como iones de plata y crea una barrera antimicrobiana eficaz hasta 7 días. Su estructura suave y no oclusiva se adapta al lecho de la herida y a distintos niveles de cantidad de exudado.

VENTAJAS

3M Tegaderm® Ag Mesh se puede cortar, doblar o empacar dentro de la herida. Posee mayor versatilidad de uso, ya que puede ser usado en heridas y úlceras con leve, moderado o abundante exudado.

No deja residuos en la herida y produce tinción de piel mínima o nula.

Gracias a su formulación, las partículas de plata cubren la superficie de las fibras de algodón del apósito. Cuando entran en contacto con solución salina o el exudado de la herida, el sulfato de plata se disuelve liberando iones de plata en forma rápida y sostenida. Se puede combinar con distintos tipos de apósitos como hidrogeles, alginatos o espumas hidrofílicas.

BENEFICIOS

Los apósitos 3M Tegaderm® Ag Mesh ofrecen una rápida reducción de la carga microbiana. Además de ser una Barrera antimicrobiana de duración prolongada (Hasta 7 días; consulte protocolos locales)

Estudios han demostrado efectividad contra una gran variedad de micro organismos, incluyendo bacterias resistentes a antibióticos, virus y hongos.



Su estructura suave y no oclusiva se adapta al lecho de la herida.

■ Indicaciones:

El apósito antimicrobiano Tegaderm® Ag Mesh se puede utilizar en heridas infectadas o colonizadas como:

Úlceras venosas, Úlceras arteriales, Úlceras por presión, Heridas quirúrgicas abiertas, etc.

■ Modo de Empleo

Siga el protocolo clínico para la prevención y control de las infecciones de su institución.

Si va a usar un apósito adhesivo secundario, recorte el vello alrededor de la herida.

Limpie la herida y la piel circundante.

Valore la herida y seleccione el tamaño del apósito de modo tal que cubra la herida hasta el borde de la misma, sin que se superponga sobre la piel circundante. El apósito Tegaderm® Ag Mesh puede cortarse, doblarse o empacarse dentro de cavidades para permitir este procedimiento.

Fije el apósito con una cobertura secundaria adecuada para ayudar a controlar el exudado y mantener la herida húmeda.

Para heridas secas o con escaso exudado, puede humedecer el apósito con solución salina o hidrogel húmedo a la herida.

En heridas con exudado moderado o abundante no es necesario humedecer el apósito. Puede combinarlo con alginatos o espumas hidrofílicas.

Cambie el apósito cada vez que sea necesario. La frecuencia del cambio depende de muchos factores como el tipo de herida, la cantidad de exudado y los protocolos locales.

El apósito Tegaderm® Ag Mesh mantiene su eficacia hasta por siete días. Si al momento de cambiarlo, el apósito está adherido a la superficie de la herida, sáturelo con solución salina normal estéril o agua estéril, deje que se ablande y retírelo cuidadosamente.

APLICACIÓN BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA

Precauciones

El apósito 3M Tegaderm® Ag Mesh con sulfato de plata no se debe utilizar en personas con hipersensibilidad conocida a la plata o al algodón. Este producto no está indicado para ser usado como esponja quirúrgica o en quemaduras de tercer grado.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
90500	Tegaderm® Ag Mesh	5 cm x 5 cm	Caja	5 unidades
90501	Tegaderm® Ag Mesh	10 cm x 12.7 cm	Caja	5 unidades