



Apósito Absorbente Tegaderm[®] Alginato

- 3M Tegaderm[®] Alginato apósito de alta integridad que controla la humedad y provee un ambiente óptimo para la cicatrización.

CARACTERÍSTICAS

Los apósitos de alginato 3M Tegaderm[®] Alginato están compuestos por materiales sin tejer que son de color blanquecino con un contenido de humedad del 22% aproximadamente. Las fibras absorbentes de estos apósitos están compuestas de alginato al 100% de grado farmacéutico. El polisacárido natural contiene dos monómeros básicos formadores de azúcar: ácido gulurónico y ácido manurónico.

Los apósitos 3M Tegaderm[®] Alginato contienen alginatos al 50% de ácido manurónico y ácido gulurónico combinando ambas propiedades: rápida gelificación y no desintegración.

Los iones Sodio del lecho de la herida son reemplazados por los iones Calcio del apósito, lo que produce un gel hidrofílico. El intercambio iónico estimula los procesos de hemostasis controlando sangrados menores.

VENTAJAS

Los apósitos de alginato 3M Tegaderm[®] Alginato son muy moldeables y crean un ambiente idealmente apropiado para el tratamiento de úlceras de espesor parcial o total de exudado de moderado a elevado. Además gelifican más lentamente pero mantienen la consistencia y no se desintegran pudiendo retirarse de una sola vez, no dejando residuos en la herida.

BENEFICIOS

3M Tegaderm[®] Alginato puede ser retirado fácilmente de la herida por una suave irrigación, reduciendo el daño potencial del delicado tejido que rodea la herida durante los cambios de apósito. Además puede utilizarse hasta siete días.



Rápida gelificación y no desintegración.

Recomendaciones de uso:

Heridas que requieran controlar exudado de moderado a abundante.
En zonas dadoras de injerto.
Indicado para controlar hemorragias leves

Forma de uso

Preparación de la piel:
Si es necesario, desbridar la herida siguiendo su protocolo. Limpiarla e irrigarla.
Limpiar la piel circundante y secarla bien. Se recomienda eliminar el exceso de vello para mayor comodidad del paciente.

Aplicación:

Seleccionar el apósito del tamaño adecuado para las dimensiones de la herida. Los apósitos de alginato 3M Tegaderm[®] Alginato se pueden recortar para adaptarlos a la zona afectada.
Aplicar el apósito sobre el lecho de la herida, de manera que cubra lo menos posible el área circundante.
Colocar sobre la zona un apósito secundario adecuado.

Durante el uso:

Observar la zona de la herida para asegurarse de que el apósito secundario está intacto y no existan fugas.

Cambio del apósito:

Retirar el apósito secundario y el de alginato no gelificado. Aclarar cualquier posible resto de gel irrigando la zona suavemente o con pinzas estériles.
Si el apósito parece seco, saturar con solución salina estéril para facilitar su desprendimiento.

PRECAUCIONES DE USO

Los apósitos de alginato 3M Tegaderm[®] Alginato no deben utilizarse en heridas con un grado de exudación mínimo. El drenaje de la herida sería inadecuado y el apósito podría adherirse a ella.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
90112	Tegaderm [®] Alginato	10 cm x 10 cm	Caja	10 unidades
90120	Tegaderm [®] Alginato Mecha	30.4 cm	Caja	5 unidades