



Sutúras Adhesivas Steri-Strip[®] Elástico

- 3M Steri Strip[®] Elástico es una sutura cutánea adhesiva de espuma, color piel para el cierre primario estético y flexible de la piel.

CARACTERÍSTICAS

3M Steri Strip[®] Elástico es una línea de tiras adhesivas estériles para el cierre cutáneo de material de espuma flexible de color piel, libre de látex. Además cuenta con adhesivo hipoalérgico sensible a la presión.

VENTAJAS

Las suturas cutáneas elásticas 3M Steri Strip[®] logran un buen afrontamiento en laceraciones o en incisiones quirúrgicas de baja tensión. Ideal para zonas de movilidad, zonas de contornos o en las que se espera la formación de edema.

3M Steri Strip[®] Elástico puede ser usado junto a suturas o corchetes o cuando estos se hayan retirado para seguir dando soporte a la piel.


Estas suturas cutáneas adhesivas no son invasiva y son segura para el cierre primario de heridas.

La aplicación y remoción del producto es simple y no dolorosa para el paciente.

BENEFICIOS

3M Steri Strip[®] Elástico aumenta la resistencia a la tensión de la herida en zonas móviles. Además reduce el potencial de infección.

Por ser color piel, entrega mejores resultados estéticos al momento de retirarlos y favorece la cicatrización.

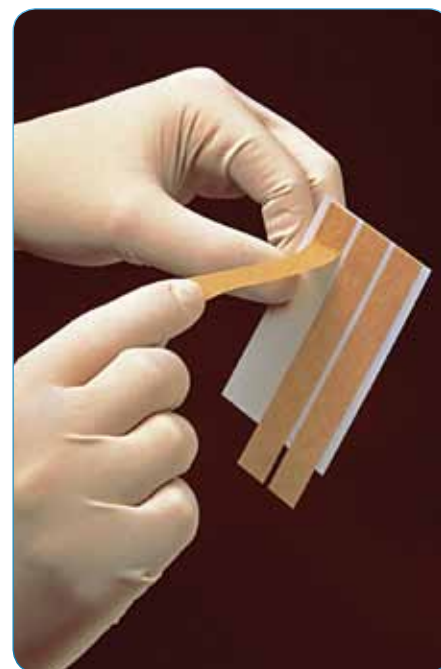

Entrega mejores resultados estéticos al momento de retirarlos y favorece la cicatrización.

■ Consideraciones:

Uso ideal para servicios de urgencias y quirófanos.

3M no recomienda su uso en heridas infectadas, en heridas con bordes irregulares o en heridas de alta tensión cutánea.

En heridas con piel aledaña grasa, con mucho vello o húmeda el desempeño del producto podría no ser el óptimo, es por esto que 3M no recomienda su uso en este tipo de situaciones.

■ Consejos para la aplicación de suturas adhesivas elásticas en heridas:


- Limpie y seque la piel aledaña.

- Una vez fuera del envase, saque el borde prepicado y retire la sutura adhesiva en un ángulo de 90° para que no se adhiera sobre si misma.

- Comience a aplicar las suturas adhesivas desde el centro de la herida.

- Presione fuertemente un extremo de la sutura, y luego afronte el borde de la herida para luego adherir la otra mitad de la sutura. No la aplique con tensión.

- Los bordes de la herida deben ser afrontados con precisión y una distancia de 3 a 5 mm.

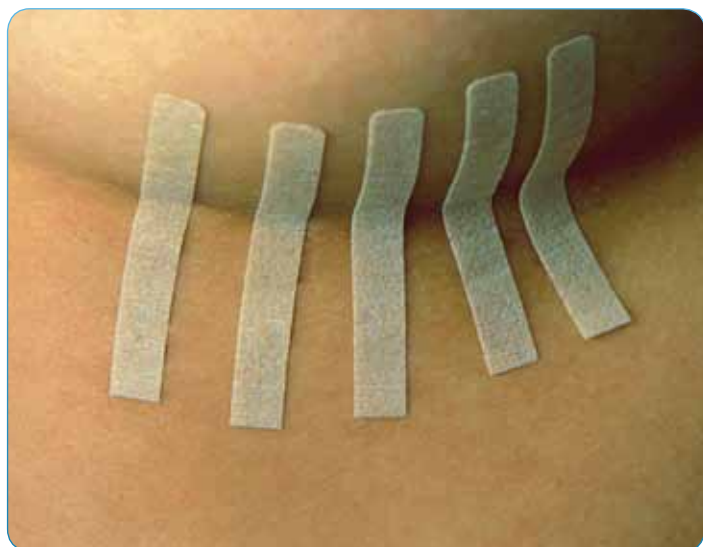

| Código Producto | Descripción | Tamaño / Unidad | Unidad de Venta | Unidades de Productos |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| E4541 | 3M Steri Strip [®] Elástico | 6 mm x 7.5 cm (3 unidades por sobre) | Caja | 50 |
| E4542 | 3M Steri Strip [®] Elástico | 6 mm x 3.8 cm (6 unidades por sobre) | Caja | 50 |



División Médica
3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001. Providencia
Santiago

atencionconsumidor@mmm.com
Tel. 600 300 3636
www.3M.cl