

# Suturas Adhesivas Steri-Strip<sup>®</sup> Reforzado

- 3M Steri Strip<sup>®</sup> Reforzado, sutura cutánea adhesiva para el cierre de primario de la piel.

## CARACTERÍSTICAS

3M Steri Strip<sup>®</sup> Reforzado es una línea de tiras adhesivas estériles para el cierre cutáneo primario de la piel.

Las suturas adhesivas 3M Steri Strip<sup>®</sup> Reforzado son de material poroso respirable de rayón y reforzados con filamentos de poliéster, con adhesivo hipoalérgico sensible a la presión y libre de látex.

## VENTAJAS

3M Steri Strip<sup>®</sup> Reforzado logra un buen afrontamiento en laceraciones o en incisiones quirúrgicas de baja tensión.


La sutura cutánea adhesiva no invasiva y segura para el cierre primario de heridas.

3M Steri Strip<sup>®</sup> Reforzado puede ser usado junto a suturas o corchetes, o cuando se hayan retirado estos para seguir dando soporte a la piel.

Es de aplicación y remoción simple. Además no es dolorosa para el paciente.

## BENEFICIOS

Steri Strip<sup>®</sup> mejora los resultados cosméticos de la cicatrización de la herida. Además de aumentar la resistencia a la tensión de una herida y reducir el potencial de infección.

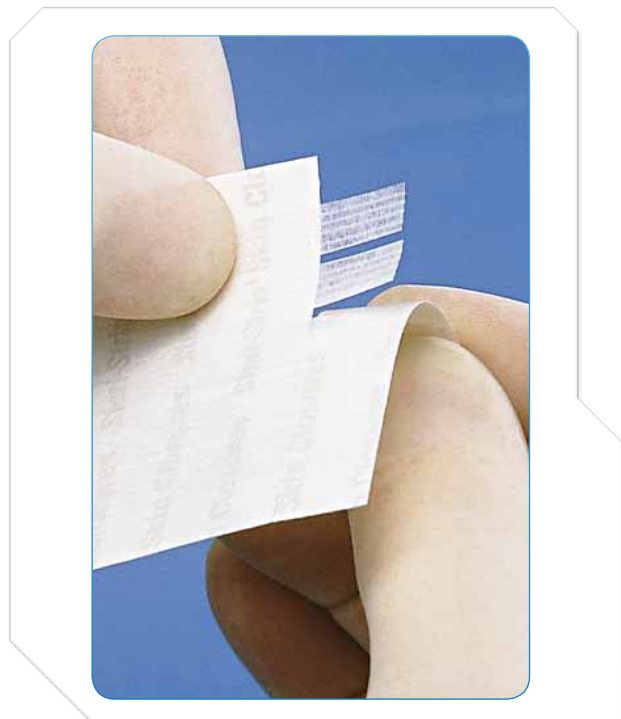

# Mejora los resultados cosméticos de la cicatrización de la herida.

## ■ Consideraciones para el uso de suturas adhesivas:

- Ideal para urgencias y quirófanos.
- No usar en heridas infectadas.
- No usar en heridas con bordes irregulares.
- No usar en heridas de alta tensión.
- No usar en heridas con piel circundante grasa, con mucho vello o húmeda.

## ■ Consejos para la aplicación de suturas adhesivas en heridas

Limpie y seque la piel circundante.

Una vez fuera del envase, saque el borde prepicado y retire la sutura adhesiva en un ángulo de 90° para que no se adhiera sobre si misma. Comience a aplicar las suturas adhesivas desde el centro de la herida hacia los bordes.

Presione fuertemente un extremo de la sutura, y luego afronte borde de la herida para luego adherir la otra mitad de la sutura. No la aplique con tensión.

Los bordes de la herida deben ser afrontados con precisión y una distancia de 3 a 5 mm.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
R1541	3M Steri Strip <sup>®</sup> Reforzado	6 mm x 7.5 cm (3 unidades por sobre)	Caja	50 sobres
R1542	3M Steri Strip <sup>®</sup> Reforzado	6 mm x 3.8 cm (6 unidades por sobre)	Caja	50 sobres
R1546	3M Steri Strip <sup>®</sup> Reforzado	6 mm x 10 cm (10 unidades por sobre)	Caja	50 sobres
R1547	3M Steri Strip <sup>®</sup> Reforzado	12 mm x 10 cm (6 unidades por sobre)	Caja	50 sobres
R1548	3M Steri Strip <sup>®</sup> Reforzado	25 mm x 12.5 cm (4 unidades por sobre)	Caja	25 sobres