



Apósito Transparente Tegaderm^R + Pad

- Apósito transparente con almohadilla absorbente no adherente.

CARACTERISTICAS

Apósito mixto. Consiste en un apósito transparente semipermeable con adhesivo hipoalergénico y material impermeable a los líquidos que permite el intercambio gaseoso natural de la piel; y una almohadilla central absorbente y no adherente.

La capa de contacto absorbente y no adherente de la almohadilla minimiza el dolor y la alteración del tejido de cicatrización al momento de la remoción del apósito.

La almohadilla brinda una excelente absorción comparada con los apósitos de gasa de algodón estándar.

Recomendado para heridas postquirúrgicas o superficies con exudado leve, quemaduras superficiales o abrasiones.

VENTAJAS

Apósito con marco de descarga, lo que se traduce en una fácil y rápida aplicación.

Amplia gama de tamaños para adecuarse a todas las necesidades de uso.

Permite al paciente el aseo personal con agua.

BENEFICIOS

Protege sitios de heridas postquirúrgicas.

Retiene los fluidos naturales de la herida en el lecho de ésta, lo que facilita la cicatrización.

La almohadilla absorbe el exceso de exudado, mientras la película previene que la herida se deshidrate.

Ayuda a prevenir la contaminación de la herida.

Minimiza el cambio de apósitos, ya que permite la inspección visual del almohadillado.

** 3M recomienda no utilizar este apósito en heridas infectadas.



Concepto de cicatrización en Medio Húmedo.

■ La humedad adecuada de la herida es beneficiosa para la cicatrización

Retener los fluidos naturales de la herida en el lecho de ésta, facilita la cicatrización. Este concepto se denomina Cicatrización de las heridas en medio húmedo. 3M Tegaderm[®]+Pad ayuda a mantener el ambiente de humedad adecuado para la herida. La almohadilla absorbe el exceso de exudado, mientras que la película previene que la herida se deshidrate. Esto permite que se formen nuevas células epiteliales más rápidamente, mejorando así la cicatrización de la herida. La película Tegaderm[®] es una barrera contra los fluidos, virus y bacterias y ayuda a prevenir la contaminación de la herida.



■ Uso indicado en:

- Heridas postquirúrgicas.
- Heridas con leve exudado.
- Heridas agudas como cortes, quemaduras, abrasiones y laceraciones.
- Asegurar o cubrir dispositivos médicos.
- Catererismo IV exudativo.

■ Recomendaciones de aplicación:

Se debe asegurar de que el sangrado del procedimiento esté detenido.

Remueva la base para exponer el adhesivo.

Centre el marco de descarga sobre la herida y deje caer sobre la piel.

Aplique sobre la piel con presión firme en el borde del apósito al momento de retirar el marco de descarga.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
3582	3M Tegaderm [®] + Pad	5 cm x 7 cm	Caja	50
3584	3M Tegaderm [®] + Pad	6 cm x 10 cm	Caja	50
3587	3M Tegaderm [®] + Pad	9 cm x 10.5cm	Caja	25
3589	3M Tegaderm [®] + Pad	9 cm x 15cm	Caja	25
3591	3M Tegaderm [®] + Pad	9 cm x 25cm	Caja	25
3593	3M Tegaderm [®] + Pad	9 cm x 35cm	Caja	25