



Sistema Compresivo Coban^R 2 Capas

- Sistema compresivo eficiente y cómodo, que logra compresión sostenida hasta 7 días para el tratamiento de edema y linfedema (Úlceras Venosas).

CARACTERISTICAS

Sistema compresivo 3M Coban^R 2 es un sistema de dos capas. La capa interna de Confort es una capa que por un lado es de espuma poliuretano que va en contacto con la piel y por el otro lado está compuesta por una capa de vendaje autoadherente 3M Coban^R libre de látex. Y la capa externa está compuesta por vendaje autoadherente 3M Coban^R libre de látex, modificada para proveer un corto estiramiento. Cuando se aplican se funden en un solo sistema compresivo cómodo, delgado y liviano que logra niveles de presión sostenidos.

VENTAJAS

Provee un inmejorable método de presión sostenida que mejora el retorno venoso y linfático.

La primera capa de confort que protege la piel y le da soporte a la segunda capa.

La segunda capa se debe aplicar al máximo estiramiento sin la necesidad de fijarse en los sistemas de rectángulos que usan otros sistemas compresivos.

Mantiene presión sostenida hasta siete días, logrando espaciar la curación y evitar que el paciente recurra de forma seguida a la curación.

Los niveles de presión logran reducir el edema y ayudan a la cicatrización de la herida, especialmente en Úlceras Venosas.

Por su sistema de fijación, logra disminuir el desplazamiento de capas al pasar los días.

El sistema de compresión es de un sólo uso (desechable).



Sistema compresivo eficiente y cómodo.

BENEFICIOS

Sistema compresivo 3M Coban[®] 2 Capas presenta un desempeño único que logra reducir el edema y linfedema en pacientes con úlceras crónicas, como las Úlceras Venosas. De muy buena tolerancia en la mayoría de los pacientes aplicándolo al máximo estiramiento.

Mejor aceptación del paciente, mejorando ostensiblemente el cumplimiento del tratamiento.

Por ser de corto estiramiento logra niveles seguro de compresión.

Por su bajo espesor el paciente vuelve a usar el calzado normal y mejorar sus calidad de vida.

Mantiene presión sostenida hasta siete días, logrando espaciar la curación, bajando los tiempos de enfermería y mejorando la calidad de vida del paciente.

Ayuda al músculo de la pantorrilla a ser más eficiente el retorno venoso, tanto en actividades como también en los momentos de reposo del paciente.



Consejos para la aplicación

Aplice la primera capa con la superficie de espuma hacia la piel sin tensión partiendo desde el quinto metatarso y desde el tobillo superponiendo un 10% de la capa anterior.

Aplice la segunda capa con el máximo estiramiento desde el quinto metatarso, cubriendo el tobillo y talón superponiendo el 50% de la capa anterior.

Solicite entrenamiento y DVD antes de aplicar en el paciente.

Precauciones

Sistema compresivo 3M Coban[®] 2 Capas debe ser usado bajo supervisión de un profesional capacitado. Pacientes con insuficiencia arterial conocida, insuficiencia cardiaca descompensada o diabetes con avanzada afección de los vasos sanguíneos pequeños no toleran la compresión.

Sistema compresivo 3M Coban[®] 2 Capas no ha sido diseñado para actuar como apósito para heridas. La herida debe ser manejada con los apósitos que se requieran según la condición de la herida.

Si se sospecha de un inadecuado flujo arterial antes de aplicar el Sistema compresivo 3M Coban[®] 2 Capas, se debe realizar un Índice Tobillo-Brazo. Si este es menor a 0,8 no se recomienda el uso del Sistema compresivo 3M Coban[®] 2 Capas.

En pacientes con diabetes, Sistema compresivo 3M Coban[®] 2 Capas se debe usar con precaución por las posibilidades de enfermedad microvascular.

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
2094	Sistema Compresivo 3M Coban [®] 2 Capas	Capa interna 10 cm x 2mts Capa externa 10 cm x 2mts no estirada Capa externa 10 cm x 4,5 mts estirada	Caja	1 Sistema Compresivo