

# Sistema de Cierre de Heridas Steri-Strip<sup>®</sup>

- 3M Steri Strip<sup>®</sup> Sistema de Cierre de Heridas, combina la rapidez de una sutura cutánea adhesiva con la protección de 3M Tegaderm<sup>®</sup> para el cierre primario de la piel.

## CARACTERISTICAS

La Línea 3M Steri Strip<sup>®</sup> Sistema de Cierre de Heridas son suturas adhesivas estériles para el cierre cutáneo. El sistema de cierre de heridas cuenta con una sutura Steri Strip<sup>®</sup> hecha de material poroso de rayón, libre de látex y reforzada con filamentos de poliéster. El adhesivo es hipoalergénico y sensible a la presión. Además incorpora un apósito transparente semipermeable 3M Tegaderm<sup>®</sup>.

## VENTAJAS

3M Steri Strip<sup>®</sup> Sistema de Cierre de Heridas logra un buen afrontamiento en laceraciones o en incisiones quirúrgicas de baja tensión. Es ideal para el cierre de la piel después de cirugías laparoscópicas, artroscopias o de incisiones pequeñas.

El Sistema de Cierre de Heridas puede ser usado junto a suturas o corchetes o cuando estos hayan sido retirados para seguir dando soporte a la piel.

3M Steri Strip<sup>®</sup> Sistema de Cierre de heridas, provee a la herida una barrera a prueba de agua y de contaminantes externos. Además es una sutura cutánea adhesiva no invasiva y segura para el cierre primario de heridas.

La aplicación y remoción del producto es simple y sin dolor para el paciente.

## BENEFICIOS

Durante el uso de 3M Steri Strip<sup>®</sup> Sistema de Cierre de Heridas, el paciente se puede bañar sin la necesidad de cubrir la herida con gasas u otro tipo de apósitos.

El uso del producto aumenta la resistencia a la tensión de la herida. Gracias a lo anterior se mejoran los resultados cosméticos y se favorece la cicatrización. Además se contribuye con la reducción del potencial de infección.

Este apósito puede permanecer hasta 7 días.




# Provee a la herida una barrera a prueba de agua y de contaminantes externos.

## ■ Consideraciones de uso :

- Uso ideal para cierre de heridas en servicios de Urgencia y Quirófanos.
- Especialmente para el cierre de heridas quirúrgicas laparoscópicas.
- 3M recomienda no usar este producto en heridas infectadas o con bordes irregulares.
- Situaciones como piel aledaña a la herida grasa, húmeda o con mucho vello, pueden afectar el desempeño de 3M Steri Strip® Sistema de Cierre de Heridas, por lo que se recomienda no usar el producto.

## ■ Consejos para la aplicación y remoción de 3M Steri Strip® Sistema de Cierre de Heridas.

- Limpie y seque la piel aledaña a la herida.
- Una vez fuera del envase, saque la ventana ovalada del 3M Tegaderm®.
- La sutura adhesiva quedará expuesta en la ventana ovalada.
- Retire la sutura adhesiva del óvalo y posicione en el centro de la herida presionando fuertemente y afrontando los bordes de la incisión.
- Saque la base del 3M Tegaderm® y aplique sobre la sutura adhesiva recién aplicada. También ejerciendo presión suficiente para reforzar el adhesivo.
- Para remover 3M Steri Strip® Sistema de Cierre de Heridas debe estirar desde un extremo el 3M Tegaderm® paralelo a la piel para no desprender la sutura adhesiva; Para luego proseguir con la sutura.

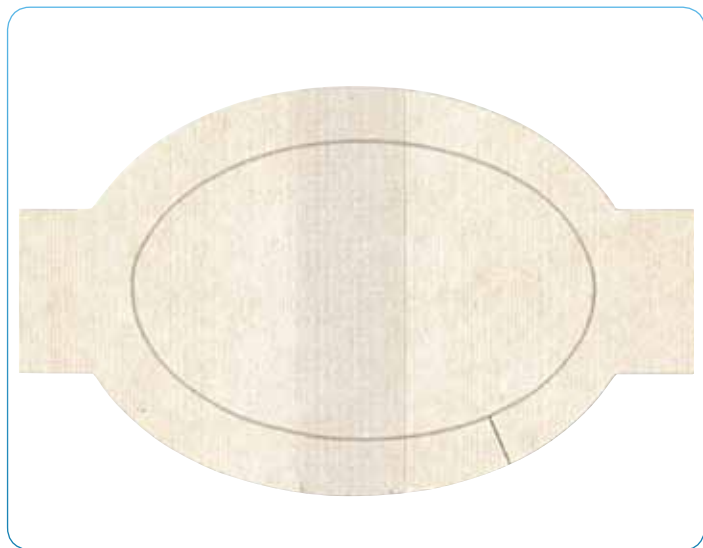

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
W8516	3M Steri Strip® Sistema cierre de heridas	12 mm x 4.7 cm (5 unidades por sobre)	Caja	25 sobres



División Médica  
3M Chile S.A.  
Santa Isabel 1001. Providencia  
Santiago

atencionconsumidor@mmm.com  
Tel. 600 300 3636  
www.3M.cl