


**3M**

**Cavilon™**

Skin Care Solutions

**Guide d'application**  
**3M™ Cavilon™ Advanced**

pour la prévention et la gestion de la dermatite  
associée à l'incontinence (DAI)

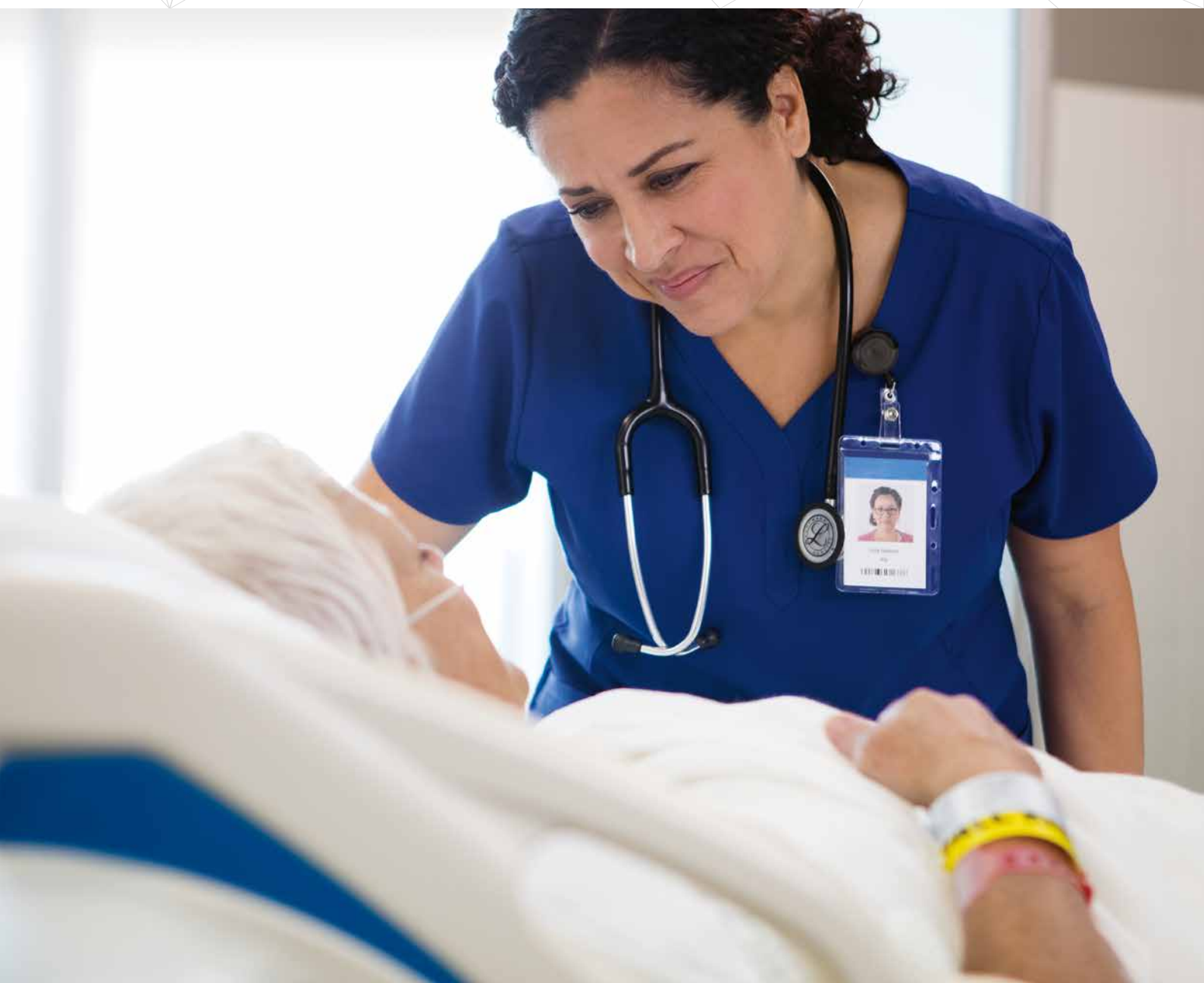

# Comment appliquer 3M™ Cavilon™ Advanced

pour la prévention et la gestion de la dermatite associée à l'incontinence (DAI)

## Matériel nécessaire :

- ▶ 3M Cavilon lingettes pour la toilette et le bain ou eau claire
- ▶ Linge doux non pelucheux
- ▶ 3M Cavilon Advanced
- ▶ Gants d'examen

## Préparez le matériel



Installez votre matériel sur une surface propre.



Ouvrez l'emballage de Cavilon Advanced et laissez l'applicateur dans la poche plastique.

## Installez et lavez le patient



Installez le patient (exposez la peau à nettoyer et laissez le patient autant que possible couvert, pour conserver la chaleur et préserver sa dignité).



Lavez la peau soigneusement et délicatement en utilisant un agent nettoyant de pH neutre pour la peau ou de l'eau claire. Séchez délicatement les zones de peau intacte. Si des zones d'érosion avec un écoulement séreux ou sanguin, épongez si nécessaire, l'excès avec une compresse de gaze.

## Changez de gants



Changez de gants.

**Chaque applicateur permet de couvrir une zone approximativement de la taille d'une feuille A4.**

**S'il est nécessaire de couvrir des zones plus étendues, il est possible d'utiliser plusieurs applicateurs.**

Pour des informations complémentaires sur les contre-indications, les précautions et les mises en garde, veuillez vous référer à la notice de Cavilon Advanced.\*

\*N'utilisez pas Cavilon Advanced en association avec quelque produit que ce soit contenant une barrière (p. ex. de la diméthicone)

## Appliquez 3M™ Cavilon™ Advanced



6 Tenez l'applicateur et placez votre pouce à l'extrémité du levier. Orientez l'éponge de l'applicateur vers le bas et appuyez fermement sur le levier pour briser l'ampoule interne.

*Quand l'ampoule se brise, vous entendrez un bruit de claquement ou d'éclatement ; il n'est alors plus nécessaire d'appuyer sur le levier.*



7 Gardez l'applicateur pointé vers le bas durant environ 10 secondes pour permettre au fluide d'imprégner l'éponge. Le fluide s'écoule par gravité de sorte que vous n'avez pas besoin de continuer à appuyer sur le levier.

*Le fluide ne va pas entièrement saturer l'éponge jusqu'aux coins.*



8 Appliquez délicatement l'éponge Cavilon Advanced sur la zone touchée et la peau environnante. Exécutez un mouvement de balayage régulier, avec une superposition minimale du produit. L'applicateur peut être utilisé dans toutes les directions.



9 Continuez l'application jusqu'à recouvrir l'ensemble de la zone à traiter. Il est important d'appliquer le produit sur toute la peau exposée aux selles et/ou à l'urine.



10 Laissez la zone sécher durant au moins 30 secondes.

*Si une zone a été oubliée, attendez jusqu'à ce que le fluide soit complètement sec avant une application supplémentaire.*



11 Si Cavilon Advanced est appliqué dans un pli cutané ou une autre zone de contact de peau-à-peau. Assurez-vous que les surfaces de peau ne soient plus en contact pour permettre au liquide de sécher complètement (au moins 30 secondes) avant le retour à la position normale.

## Informations supplémentaires



Renouvelez l'application 2 fois par semaine. Cavilon Advanced est imperméable et n'est pas enlevé par le nettoyage ordinaire. Le renouvellement plus fréquent peut aboutir à l'accumulation du produit.



Laissez le produit sécher durant au moins 60 secondes avant d'appliquer un pansement adhésif ou un sparadrap sur Cavilon Advanced.

**Le film s'éliminera, il n'est pas nécessaire de le retirer.** Dans le cas où vous souhaiteriez retirer Cavilon Advanced, utilisez un dissolvant pour adhésif contenant de l'hexaméthylsiloxane (HMDS) ou un polymère de silicone.

# Découvrez comment 3M™ Cavilon™ Advanced peut vous donner le pouvoir d'arrêter, de renverser, de prévenir et vous aider à mettre un terme à la DAI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [3MSchweiz.ch/EndIAD](http://3MSchweiz.ch/EndIAD) ou contactez votre responsable des ventes 3M.

## Informations de commande

3M Cavilon Advanced

N° article	Description	Dimension	Contenu/boîte	+ Pharmacode
5050G	3M™ Cavilon™ Advanced	applicateur de 2,7 ml	20	7125609



**3M (Suisse) S.à r.l.**  
**Health Care**

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon

Téléphone +41 (0)44 724 92 31

Téléfax +41 (0)44 724 92 38

Medical.ch@mmm.com

[3MSchweiz.ch/EndIAD](http://3MSchweiz.ch/EndIAD)

2017-0044

3M et Cavilon sont des marques déposées de la société 3M. © 3M 2017. Tous droits réservés.