

Leitfaden zur Zementierung und Vorbehandlung*

3M™ ESPE™ RelyX™ Unicem 2 Selbstadhäsiver Composite-Befestigungszement



Materialtyp	Beispiele	Vorbehandlung
Zirkoniumoxid (nicht ätzbar, hochfest)	3M™ ESPE™ Lava™ Plus Hochtransluzentes Zirkoniumoxid, BruxZir®	Sandstrahlen ($\leq 40 \mu\text{m}$), 2 Bar, Reinigen mit Ethanol <i>Alternativ: Silikatisierung mit Rocatec™ Verbundsystem von 3M™ und Silanisierung</i>
Aluminium (nicht ätzbar, hochfest)	Procera® AllCeram	Sandstrahlen ($\leq 40 \mu\text{m}$), 2 Bar <i>Alternativ: Silikatisierung mit Rocatec™ Verbundsystem von 3M™ und Silanisierung</i>
Glasfaserverstärkter Wurzelstift	3M™ ESPE™ RelyX™ Fiber Post	RelyX™ Fiber Post: Reinigen mit Ethanol

3M™ ESPE™ RelyX™ Ultimate Adhäsives Befestigungscomposite



Materialtyp	Beispiele	Vorbehandlung
Ätzbare Glaskeramik – feldspathaltig, leuzitverstärkt inkl. Lithiumdisilikat	VITABLOCKS® Mark II, IPS e.max®, IPS Empress®	Schritt 1: Ätzen mit Flusssäure Schritt 2: 3M™ ESPE™ Scotchbond™ Universal Adhäsiv
Resin-Nanokeramik	3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate CAD/CAM Restaurationsmaterial, Cerasmart™	Schritt 1: Sandstrahlen ($\leq 50 \mu\text{m}$), 2 Bar Schritt 2: 3M™ ESPE™ Scotchbond Universal Adhäsiv

3M™ ESPE™ Ketac™ Cem Plus Kunststoffmodifizierter Glasionomerzement



Materialtyp	Beispiele	Vorbehandlung
Metall, Metallkeramik	—	Sandstrahlen ($\leq 50 \mu\text{m}$), 2 Bar, Reinigen mit Ethanol

Bitte beachten Sie: Diese Empfehlungen beziehen sich auf von 3M hergestellte Produkte der RelyX™ Familie und sollten befolgt werden, sofern vom Hersteller des verwendeten Restaurationsmaterials nicht anders angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 3M Kundenbetreuung unter 0800-2753773.

* Eine vollständige Liste der Indikationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Produkts.



3M Deutschland GmbH
ESPE Platz
82229 Seefeld
Freecall: 0800-2753773
Freefax: 0800-3293773
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

3M (Schweiz) GmbH
3M ESPE Dental Products
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüslikon
Telefon: (044) 7249331
Telefax: (044) 7249238
3mespech@mmm.com
www.3MESPE.ch

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: (01) 86686434
Telefax: (01) 86686330
dental-at@mmm.com
www.3MESPE.at

www.3MESPE.de

70210002195/01 (05.2016)