

Réalisation de deux restaurations postérieures esthétiques



Fig. 1 : situation initiale : la 1^{ère} molaire présente un amalgame défectueux et la seconde prémolaire présente une carie initiale.



Fig. 2 : adaptation des matrices sectorielles métalliques, après préparations préalables finalisées et élimination de la lésion carieuse.

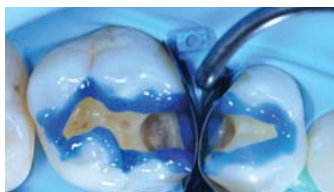


Fig. 3 : mordançage sélectif de l'émail 3M[™] Scotchbond[™] Universal Etchant pendant 15 secondes.



Fig. 4 : application de l'adhésif 3M[™] Scotchbond[™] Universal pendant 15 secondes, sur l'émail et la dentine et photopolymérisation pendant 10 secondes.



Fig. 5 : application de 3M[™] Filtek[™] One dans chaque cavité en un seul incrément jusqu'à 5 mm.



Fig. 6 : photopolymérisation des restaurations 10 secondes par face.



Fig. 7 : finition et polissage avec les roues spirales diamant 3M[™] Sof-Lex[™]. Résultats immédiats.



Fig. 8 : restaurations 3M[™] Filtek[™] One lors de la visite de contrôle. Les surfaces des restaurations sont lisses et brillantes pour un aspect esthétique naturel.

Cas clinique et photographies du Dr. Giuseppe Marchetti de Parme en Italie.



3M[™] Filtek[™] One

Réassort	Référence	Référence
Teinte	Seringue	Capsule
A1	4866A1	4867A1
A2	4866A2	4867A2
A3	4866A3	4867A3
B1	4866B1	4867B1
C2	4866C2	4867C2

Les réassorts de seringues contiennent : 1 seringue de 4 g ; notice technique ; mode d'emploi.

Les réassorts de capsules contiennent : 20 capsules de 0,2 g ; notice technique ; mode d'emploi.

www.3M.com/fr

3M

3M France
Département Soins Oraux Professionnels
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 65 96

SAS au capital de 10 572 672 €
RCS Pontoise 542078555

3M Filtek One et 3M Filtek Bulk Fill sont des dispositifs médicaux de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. 3M, 3M Science, Applied to Life, et Filtek sont des marques déposées de 3M ou 3M Deutschland GmbH. ©3M. Tous droits réservés. Mars 2017. P ESPE 0673.

