

Système de surveillance de la température Bair Hugger^{MC} 3M^{MC} Directives de mise en place

Brancher le capteur de température Bair Hugger^{MC} au câble du capteur. Introduire délicatement la languette du capteur dans le câble. S'assurer que le point violet est aligné avec le capteur.

(Avertissement : ne pas plier la languette du capteur.)



1

Préparer le site du capteur avec un tampon imbibé d'alcool, laisser sécher.

2




Placer le capteur au-dessus du bourrelet orbitaire, d'un côté ou de l'autre, en évitant le sinus frontal.

4

3

Retirer les doublures adhésives.

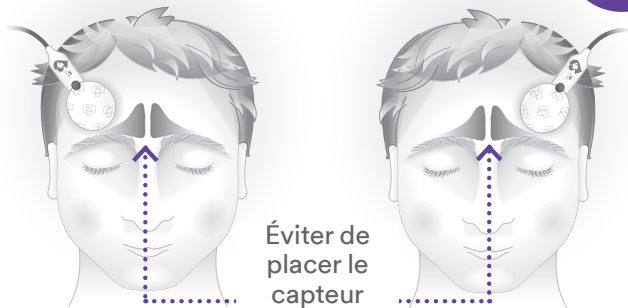

Éviter de placer le capteur sur le sinus frontal, car cela pourrait affecter la précision du capteur.



Avertissements et mises en garde

⚠ Avertissements : Pour réduire les risques liés à la macération de la peau :

- Ne pas utiliser le capteur sur la peau abîmée ou compromise

⚠ Mise en garde : Pour réduire les risques liés à la pression ou aux cordons et aux connecteurs écrasés ou entremêlés :

- Ne pas utiliser un bandeau ou un autre dispositif pour fixer le capteur au patient

⚠ Mises en garde : Pour réduire les risques liés à la mauvaise utilisation du système ou du capteur :

- Ne pas utiliser le capteur pendant plus de 24 heures

(Une utilisation prolongée peut compromettre la peau et entraîner une dégradation du matériel ou du rendement)

- Éviter d'exposer le capteur de surveillance de la température, le câble du capteur, le bloc d'alimentation et l'unité de contrôle aux solutions chirurgicales de préparation de la peau ou à d'autres fluides

- Ne pas repositionner le capteur

(Le fait de repositionner le capteur peut affaiblir l'adhésif du capteur, endommager le capteur ou compromettre le rendement du dispositif)

Le présent guide de mise en place est uniquement conçu pour servir de référence rapide. Consulter les directives d'utilisation du produit pour obtenir les directives complètes et d'autres renseignements importants sur l'utilisation du système de surveillance de la température Bair Hugger^{MC}.

www.BairHugger.com

Produits offerts au Canada par la :

Division des solutions pour la
 prévention des infections de 3M
 3M Canada
 300, rue Tartan
 London (Ontario) N5V 4M9
 Canada
 1 800 364-3577

3M Soins de santé/3M Health Care
 Division des solutions pour la
 prévention des infections
 2510 Conway Avenue
 St. Paul, MN 55144-1000
 É.-U.
 1 800 228-3957