

Masques chirurgicaux 3M™ à fixations auriculaires élastiques

Lavage hygiénique des mains - Identification des faces interne et externe



- ▶ Face externe : colorée ou présence du logo 3M.



- ▶ Face interne : blanche. Feuillet interne : doux.

Préparation du masque



- ▶ Barrette nasale vers le haut, placer les doigts sur la face interne.




- ▶ Avec le pouce et l'index de la main opposée, repousser la barrette nasale. La barrette a une forme arrondie pour épouser la crête nasale sans la blesser.



- ▶ Placer l'index au milieu de la barrette nasale. Le pouce et le majeur sont en contre-appui sur la face externe du masque.



- ▶ Ouvrir le masque dans le sens des plis : face externe convexe, face interne concave.

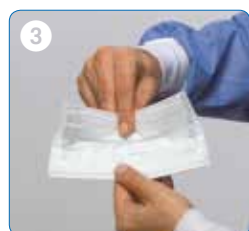

- ▶ Appliquer une pression sur l'index afin de plier la barrette nasale. Le pouce et le majeur viennent replier la barrette autour de l'index permettant d'arrondir cette dernière.

Mise en place du masque



- ▶ Le masque est prêt à être positionné sur le visage. Le masque doit couvrir le sommet de la crête nasale jusque sous le menton.



- ▶ Placer les élastiques derrière les oreilles.