

3M**Tegaderm™**

Haavanhoitoratkaisut

3M™ Tegaderm™ -reunallinen silikonivahtosidos

Kiinnitys kantapäähän

1. Puhdista haava ja sen ympäristö paikallisten hoitokäytäntöjen mukaan.
2. Kuivaa ympäröivä iho.
3. Arvioi haava.
4. Valitse sidoksen koko siten, että vaahdotyyny on haavaa suurempi.

Valmistelu ja asettaminen



1 Poista sidos pakkauksesta ja taita puoliksi.



2 Pidä kiinni sidoksen reunaliuskoista ja irrota valkoinen suojapaperi.



3 Aseta sidos haavan päälle. Paina sidoksen alempi puolisko kiinni ihoon aloittaen kantapään plantaaripuolelta.



4 Irrota sinisen paperin ensimmäinen osa vetämällä liuskoja kohti sidoksen ulkoreunoja.



5 Muotoile sidoksen jäljellä oleva osa kantapään posteriorisen osan päälle. Sidosten reunat voivat tarvittaessa olla päällekkäin.



6 Poista loput sinisestä paperista. Paina sidos kiinni ihoon.

Arviointi



1 Nosta jalkaa siten, että kantapää on ilmassa.



2 Aloita plantaaripuolelta ja vedä reunaa ensin ylöspäin molemmilla käsillä. Vedä reunaa sitten alaspäin, jotta pääset arvioimaan kantaluun alueen.







3 Kiinnitä sidos takaisin paikalleen. Tasoita reunat ja taitokset tarpeen mukaan.

Lisätietoja

3M™ Tegaderm™ -reunallinen silikonivahtosidos saa olla paikallaan korkeintaan seitsemän päivää. Vaihtoväliin vaikuttaa haavan tyyppi, haavaeritteen määrä ja kliininen tila. Jos haavaeritettä leviää sidoksen reunoille tai sidos vuotaa, on aikaa vaihtaa sidos.

Tilaustiedot

	Tuote	Luettelon numero	HCPSC-koodi	Koko	Sidosta/laatikko	Laatikkoa/pakkaus
	Sidos ilman reunoja	90631	A6210	10 × 11 cm	10	4
	Sidos ilman reunoja	90632	A6210	15 × 15 cm	10	4
	Sidos reunoilla	90643	A6212	5 × 5 cm	10	6
	Sidos reunoilla	90640	A6212	7,5 × 7,5 cm	10	6
	Sidos reunoilla	90641	A6212	10 × 10 cm	10	6
	Sidos reunoilla	90642	A6213	15 × 15 cm	10	4
	Kantapää yms.	90646	A6212	16,5 × 16,5 cm	5	4
	Sakraalialue, pieni	90647	A6213	15 × 17 cm	10	4
	Sakraalialue, iso	90648	A6213	18,5 × 22 cm	5	4

3M:n innovatiivisen liimakiinnityksen ansiosta 3M™ Tegaderm™ -silikonivahtosidosten käyttöaika on tuntuvasti markkinoiden johtavaa silikonivahtosidosta pidempi*, ja samalla ne ovat hellävaraisia iholle.

Lisätietoa tuotteista ja mahdollisuus tilata ilmaisia näytteitä on osoitteessa 3M.com/SiliconeFoam.

*4x4- ja 6x6-sidokset in vivo -tutkimusten EM-13977 ja EM-13978 perusteella.

3M

Suomen 3M Oy
Terveystuotteet
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Puh. (09) 52 521

3M ja Tegaderm ovat
3M Companyn tavaramerkkejä.
Kierrätähän paperin.
© 3M 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.
10/17