

医療用品 4 整形用品  
一般医療機器 アイパッド  
JMDNコード:11661000

## オプティクルード™ アイパッチ

再使用禁止


### 【警告】

1. 斜視・弱視の訓練に使用する場合には、装着する眼および装着時間は眼科医の指示に必ず従ってください。
2. 消毒液などを使用した場合には、本品貼付前に十分に乾かしてください。
3. 皮膚に強く粘着している場合、本品を剥がすときに皮膚の異常(表皮の剥離、水泡、発疹、発赤、痛みなど)を起こす可能性があります。外周から中心に向かって折り返しながらかゆ々と丁寧に剥がしてください。
4. 人によっては、本品の使用により皮膚の異常(腫れ、水泡、発赤、発疹、ただれ、痒み、毛包炎など)が発生する可能性があります。
5. 本品を剥がした後に、皮膚の色素の沈着や脱失をおこす場合や、瘢痕が形成されることがあります。

### 【禁忌・禁止】

1. 本品を貼付する部位およびその周辺の皮膚に異常(閉鎖していない傷、出血、腫れ、水泡、発赤、発疹、ただれ、痒み、毛包炎など)がある場合には直接本品を貼付しないでください。[本品は滅菌されていません。使用した場合、傷の悪化、治癒の遅延、感染につながる恐れがあります。]
2. 本品を使用したまま自動車等の運転はしないでください。[視野が狭くなり、安全の確認ができない恐れがあります。]
3. 一度使用したものを再使用しないでください。また汚れたり濡れたりしたものを使用しないでください。[製品の清潔が保たれず皮膚の異常(腫れ、水泡、発赤、発疹、ただれ、痒み、毛包炎など)が発生する恐れがあります。]
4. 本品を貼る皮膚に血液や、油分、水分などが付着している場合は、そのまま貼付しないでください。[そのまま貼付すると十分に粘着せず、貼付中に剥がれてしまう恐れがあります。]
5. 軟膏やクリームなどを塗布した皮膚に本品を貼らないでください。併用が必要な場合には医師の指示に従ってください。[本品の粘着力が低下し、剥がれる可能性があります。]
6. 眉毛や髪にかかるように貼らないでください。[十分に粘着せず貼付中に剥がれてしまう恐れがあります。また、剥がすときに苦痛をとまいません。]

### 【形状・構造及び原理等】

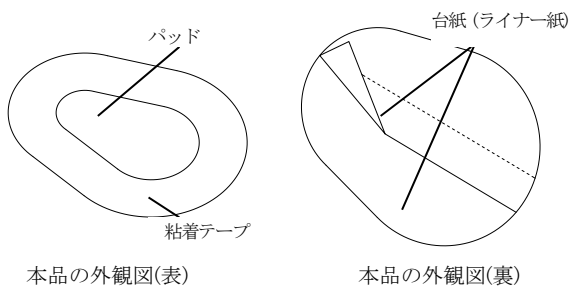

本品の外観図(表)

本品の外観図(裏)

本品は眼を保護するために用いるパッドつき粘着テープです。非固着性パッドに、微小多孔性のレーヨン不織布(肌色)からなる粘着テープを貼りあわせたもので、粘着テープ部にはアクリル系粘着剤が塗布されています。1枚の本品に2枚の台紙(ライナー紙)が貼られています。本品は眼の保護や斜視・弱視の訓練などに使用するものです。

人体に接触する部分の組成:

- アクリル系粘着剤(粘着テープ部)
- ポリエチレンフィルム/レーヨン繊維(パッド部)

### 【使用目的又は効果】


本品は眼の保護又は分泌物の吸収に使用する。

### 【使用方法等】

#### 《使用方法に関連する使用上の注意》

1. 貼り方
  - 1) 本品貼付部位およびその周辺の汗や油分を十分に抜き取るか、洗浄して、皮膚を良く乾かしてください。
  - 2) 台紙を剥がし、眉毛や髪などにかからないように本品を貼付してください。その際、皮膚に過度の緊張がかからないように注意してください。皮膚を引っ張って貼るなどの緊張をかけすぎると、皮膚に引きつれや水泡ができたり、本品の粘着力が弱まったりすることがあります。
2. 剥がし方
 

皮膚が持ち上らないように押さえながら、粘着テープ部を折り返すように、本品の鼻側から耳の方向に向けてゆっくと丁寧に剥がしてください。

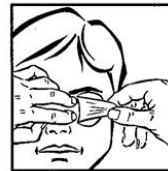

### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - 1) 本品を使用した経験のない方は、医師に相談の上、指示にしたがって使用することをお勧めします。
  - 2) 医師に相談の際はこの添付文書を持参してください。
  - 3) 視野が狭くなるため、本品を使用したまま自転車等の乗りものの運転はしないでください。
  - 4) 粘着製品により皮膚の異常を起こしやすい方は、使用前に医師にご相談ください。本品はアレルギーテスト実施済みですが、全ての方にアレルギーが起こらないという訳ではありません。
  - 5) 使用中に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談して適切な処置を受けてください。
  - 6) 使用中に本品が汚染された場合は、適宜交換してください。
  - 7) 本品を貼付する部位およびその周辺の皮膚に異常(出血、腫れ、水泡、発赤、発疹、ただれ、痒み、毛包炎など)がある場合は直接本品を貼付しないでください。

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要なときに読めるように大切に保管してください。

2. その他の注意

本品使用後は、医療施設においては、医療廃棄物として適切に処理してください。また、ご家庭の場合は、各自治体の定めた方法で廃棄してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

高温・多湿を避けて保管してください。また、未使用品は外箱に入れて保管してください。

2. 有効期間

使用の期限：本品の包装に記載[自己認証（製造元データによる）]

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**製造販売業者**

\* 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

**\* 販売業者**

名称：スリーエム ジャパン株式会社

TEL：0570-011-321（カスタマーコールセンター）

オブティクルードは3M社の商標です。

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要ときに読めるように大切に保管してください。