

ステリ・ドレープ™ アイソレーションバッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. プラスチック・ドレープを介して除細動をかけないこと。
[分流がおきたり、除細動の効果が不十分になる可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエチレン製のバッグで1枚ずつ滅菌包装されている。バッグ開口部にはひもが付いている。

【使用目的又は効果】

外科処置中の腸の水分損失を防ぐために一時的に用いる柔軟性のある容器である。

【使用方法等】

1. 術野を各施設または医師の処方により消毒する。
2. 本品の開口部を広げて、隔離部位を収納する。
3. 必要に応じて開口部両端のひもを引いて、開口部を閉じる。このとき、ひもを強く締め過ぎないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー反応を起こした場合には、直ちに本品の使用を中止し、医師に相談し適切な処置を行うこと。
2. その他の注意
 - 1) 本品は、再滅菌しないこと。
 - 2) 高温を発する機器類に接しないように注意すること。
 - 3) 包装が破損又は汚損、水漏れしている場合は使用しないこと。
 - 4) 本品は滅菌済み製品なので、使用直前に開封して使用すること。
 - 5) 高温多湿や直射日光を避け、水漏れしないように保管すること。

【保管方法及有効期間等】

1. 保管方法
室温保存
2. 有効期間
使用の期限：個包装及び外箱に記載 [自己認証（製造元データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：スリーエム ジャパン株式会社
TEL：0570-011-321（カスタマーコールセンター）

外国製造所の国名及び製造業者の名称

米国、3M社（3M Company）

ステリ・ドレープは3M社の商標です。