

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 保護栓
JMDN : 70280000

キュロス™ プロテクタ (オスルアーロックコネクタ用)

再使用禁止

【警告】

火気厳禁[引火性液体を含有しているため。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】


- 保管方法
高温・多湿を避けて保管
火気厳禁
- 有効期間
有効期限は製品包装に記載 [自己認証 (製造元データ) による]

*【形状・構造及び原理等】

本品は、70%イソプロピルアルコールを充填したポリエチレン製のキャップである。

国際規格準拠のオスルアーコネクタ部 (ロックタイプ) に接続して使用する。

(製品例)

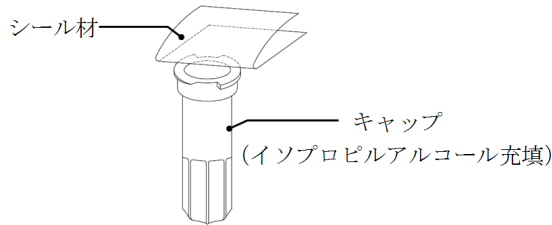

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

** 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

** 販売業者

名称：スリーエム ジャパン株式会社

TEL：0570-011-321 (カスタマーコールセンター)

キュロスは3M社の商標です。

【使用目的又は効果】

本品は輸液セット等に接続して、汚染防止・保護に用いるキャップである。

【使用方法等】

- シール材を剥がして開封する。
- 輸液セットのオスルアーコネクタ部に本品を押し回して接続する。
- オスルアーコネクタを輸液セットに再接続する際に本品を外し、廃棄する。その時、コネクタを手で確実に固定して本品を外すこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 接続する部分が汚染されている場合には、アルコール綿などで清拭、消毒してから接続すること。
- 接続する機器の材質を確認し、接続部分への保護キャップ装着や、アルコール剤使用による影響が予想される場合には充分検討の上使用すること。
- 本品を接続している輸液セットの三方活栓やシリンジを操作する際に製品中のイソプロピルアルコールが輸液セット中に逆流しないよう注意すること。クランプがある場合には閉じてから操作を行うこと。
- 製品中のイソプロピルアルコールが眼に入らないように注意すること。万一眼に入った場合にはすぐに数分間注意深く洗うこと。(数分間の洗浄後、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。) その後も洗浄を続けたあと、眼科医の診断を受けること。