


Anlegen

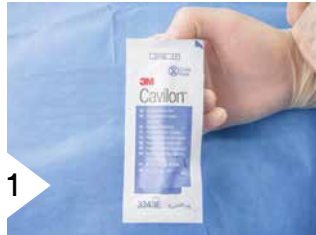

1

Um bei Patienten mit empfindlicher Haut Verletzungen durch medizinischen Kleber (MARS) in der Umgebung der Einstichstelle zu vermeiden, tragen Sie zunächst im Haftbereich des Verbands 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz auf. Sparen Sie den Bereich von 2 cm um die Einstichstelle aus.



2

Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Tegaderm CHG-Verband.



3

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche des Verbands. Drehen Sie nun den Verband mit der Klebefläche zur Haut.



4

Platzieren Sie das CHG-Gelkissen mittig über der Einstichstelle und fixieren Sie den Verband, ohne ihn zu dehnen. Bei angenähten Kathetern platzieren Sie, wenn möglich, das Gelkissen über Einstichstelle und Naht.



5

Führen Sie den Katheterlumen durch die Schlüssellochkerbe und modellieren Sie den Verband unterhalb des Katheterlumens gut an.



6

Entfernen Sie nun langsam den Applikationsrahmen und glätten Sie die Kanten des Verbands. Drücken Sie den Verband zur besseren Haftung gut an.



7

Zur Abdichtung des Katheters platzieren Sie den breiten eingekerbten Fixierstreifen unter den Katheterlumen.



8

Dokumentieren Sie den Verbandwechsel entsprechend der hausinternen Vorschriften. Kleben Sie den Dokumentationsstreifen über dem Austritt des Katheterlumens gut an.

Entfernen



1

Den Verband erneuern Sie entweder gemäß der hausinternen Vorschriften oder bei Sättigung des CHG-Gelkissens.

Die Sättigung prüfen Sie durch leichten Fingerdruck auf das Gelkissen. Bildet sich die Druckstelle nicht zurück, sollte der Verband gewechselt werden.

Entfernen Sie zunächst den Dokumentationsstreifen und den Fixierstreifen. Ziehen Sie nun vorsichtig eine Seite des Verbands in Richtung Einstichstelle von der Haut ab.

Entfernen Sie den Verband langsam und in einem flachen Winkel.



2

Fassen Sie das Gelkissen beim Abziehen des Verbands mit Daumen und Zeigefinger, um es nicht zu beschädigen.

Halten Sie beim Abziehen des Verbands in Richtung Einstichstelle Haut und Katheter fest, um eine Dislokation zu vermeiden.

Befeuchten Sie das Gelkissen bei Bedarf mit einigen Tropfen Kochsalzlösung, um das Entfernen zu erleichtern.

