

Express Pesado /Liviano

Material de impresión en base a vinil
polisiloxano



■ Descripción

Silicona por Adición Express en base a vinil polisiloxano. El sistema consta de material pesado en combinación con material liviano. Para técnica de un paso o dos pasos operatorios. Material con un alto definición de detalle y gran estabilidad, pudiendo realizar el vaciado hasta 14 días después y más de un vaciado

■ Ventajas

- El material liviano se mezcla en forma precisa y automática a través de la Pistola Garant.
- Alta exactitud de detalles.
- Buena estabilidad dimensional, vaciado hasta 14 días después.
- Excelente recuperación elástica, 99.7%.
- Sin sabor ni olor.
- Tixotrópico.
- Excelente resistencia al desgarro, mejor impresión de márgenes.
- Se puede emplear en las técnicas de impresión simultánea y de dos pasos.

■ Indicaciones de Uso

- Impresiones de coronas y puentes
- Impresiones de inlays y onlays

■ Instrucciones de Uso

Para técnica de 1 o 2 pasos, la técnica de 1 pasos se puede realizar con el material pesado y el material liviano color verde, que poseen los mismos tiempos de polimerización. Para la técnica de un paso se puede utilizar el material pesado como cubeta y el material liviano color azul que posee un menor tiempo de polimerización

■ Presentación

Material Pesado / Putty

- 2 tarros de putty, 610 ml en total
- 2 cucharas

Express Material Liviano:

Polimerización Rápida (azul, 7301)

- 2 cartuchos, 50 ml cada uno
- 10 puntas de mezcla
- Tiempo de polimerización: 3.30 minutos

Polimerización regular (verde, 7302)

- 2 cartuchos, 50 ml cada uno
- 10 puntas de mezcla
- Tiempo de polimerización: 5 min.

Reposiciones para Express

- Puntas de mezcla, 50 unidades
- Adhesivo VPS para porta impresiones/cubeta, frasco 17 ml

Actualización Diciembre 2017