

Ketac Cem Easy Mix

Ionómero de Vidrio para cementar



■ Descripción

Ketac Cem Easy Mix Cemento de Ionómero de Vidrio indicado para cementaciones definitivas, con una fórmula fácil de mezclar.

De autopolimerización y Radioopaco

■ Ventajas

- Fácil mezcla, gracias a su formulación
- Dosificación fácilmente reproducible,
- Liberación de flúor superior
- Alta bio compatibilidad.
- Bajo grosor de película ofrece: menos alteraciones en la oclusión, menos tiempos operatorios en ajustes oclusales

■ Indicaciones de Uso

- Cementación de inlays, onlays, coronas y puentes hechos de metal o metal-cerámica
- Cementación de inlays, onlays, coronas y puentes hechos de composite o cerámica siempre que sean adecuados para la cementación convencional
- Cementación de postes y tornillos siempre que sean adecuados para la cementación convencional
- Cemento de fijación para su uso en bandas de ortodoncia

■ Instrucciones de Uso

Proporción de dispensación: 1 cucharada de polvo y 2 gotas de líquido

Tiempo de mezcla: 30 seg.

Tiempo de trabajo, incluyendo mezcla: 3:30 min.

Tiempo polimerización, desde inicio de la mezcla: 7:00 min.

■ Presentación

Kit Ketac Cem easy Mix

30 g polvo

12 ml. Líquido

1 block mezcla

1 cuchara

Guía Técnica

Kit Ketac Cem easy Mix

15 g polvo

6 ml. líquido

1 block mezcla

1 cuchara

Guía Técnica

Actualizado Diciembre 2017