

# RelyX Luting

Ionómero de Vidrio para cementación



## ■ Descripción

Es un cemento de ionomero de vidrio, modificado con resina, liberador de fluor, radiopaco y autopolimerizable. Ofrece una mayor resistencia de unión que los cementos de ionómero de vidrio convencionales. Su fórmula es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo PFMs, coronas metálicas o pediátricas y restauraciones de zirconia.

## ■ Ventajas

- Facilidad de mezcla, carga y asentamiento por su consistencia tipo “mouse”.
- Baja solubilidad mejor integridad marginal.
- Alta resistencia a la fractura.
- Liberación de flúor sostenida, para pacientes con alto riesgo de caries.
- Virtualmente sin sensibilidad post operatoria.
- Posee una polimerización rápida, es fuerte y de fácil uso.
- Posee adhesión química a la estructura dental, no requiere un primer o acondicionador previo

## ■ Indicaciones de Uso

Para cementación de:

- Coronas de porcelana fusionada a metal (PFM)
- Coronas y puentes de cerámica sobre metal
- Coronas, Puentes, Inlays y Onlays de metal
- Coronas Provisionales prefabricadas de metal
- Coronas y Puentes de Zirconia o Alumina (ej: Lava™ ó Procera® AllCeram)
- Postes prefabricados o vaciados
- Bandas de ortodoncia

## ■ Instrucciones de Uso

Mezclar: Polvo/ líquido en relación 1:1 por 30 seg.  
Mezcla resultante con consistencia cremosa o de mouse.  
Tiempo de trabajo : 2,5 min.  
Eliminar los excesos endurecidos después de 2 a 3 min.  
Tiempo total de fraguado, desde el inicio de la mezcla de 6 min.



1

### Mixing:

- Use an equal number of powder scoops and liquid drops.
- Fluff the powder. Dispense 3 level scoops for crown, 6 for bridge.
- Hold liquid vial vertically and dispense 3 drops for crown, 6 for bridge. Keep the vial tip clean.
- Mix all the powder into the liquid, about 30 seconds.



2

### Load the crown/bridge:

- Spread the cement over all the internal surfaces of the crown/bridge.
- Working time is 2.5 minutes.



3

### Placement:

- Seat the crown/bridge.
- Wait at least 3 minutes after placement.
- Remove excess cement with an appropriate instrument.

## ■ Presentación

Kit Introductorio  
16 g de RelyX Luting polvo  
9 ml de RelyX Luting líquido  
Cuchara dispensadora  
Block de mezcla  
Guías técnicas

Actualización Enero 2017