


3M™ Aura™ N95 微粒子用マスク (医療用) 1870+

正しい着脱方法

折りたたみ式



着用方法

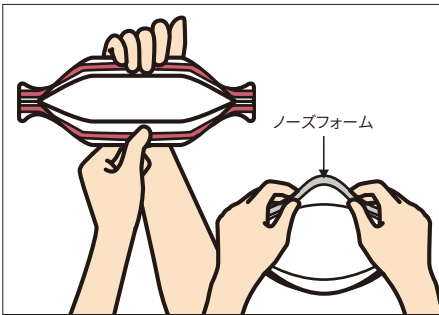

1 マスクをパッケージから取り出し、上下を確認します。図のようにゴムバンドを上にして持ちます。



2 ノーズフォーム中央を指で押してノーズクリップを曲げながら、鼻あて部と顎あて部を完全に開きます。その時、上下ゴムバンドを上下に分けてください。



3 ノーズフォームが鼻の位置になるように、また顎あて部が顎を包むようにかぶせ、マスクを顎にしっかり押さえながら上ゴムバンドを頭頂部につけます。



4 次に、下ゴムバンドを頭頂部を経て、首の後ろにまわします。鼻あて部と顎あて部を顔に合わせて広げます。



5 両手の指でノーズクリップが鼻に密着するように軽く押します。



6 両手でマスクを覆い、空気の漏れをチェックして密着の良い位置にマスクを合わせます。

[ユーザーシールチェック]

ノーズクリップと鼻の間や、顎あてと顎の間に隙間がでやすいので、ご注意ください。


取り外し方法



1 マスク表面には触らないようにして、マスクの首の後ろのゴムバンドを外します。



2 次に頭頂部のゴムバンドを外します。

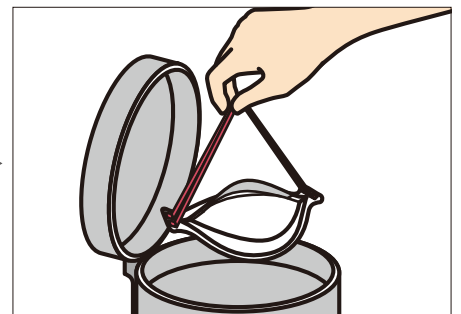

3 マスクを顔から外し、各施設の規定に従い廃棄または保管してください。

2020年3月発行

3M、Auraは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
HPM-578-D(03200.5)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)