


3M™ VFlex™ N95 微粒子用マスク (医療用) 1804/1804S

正しい着脱方法

折りたたみ式



着用方法

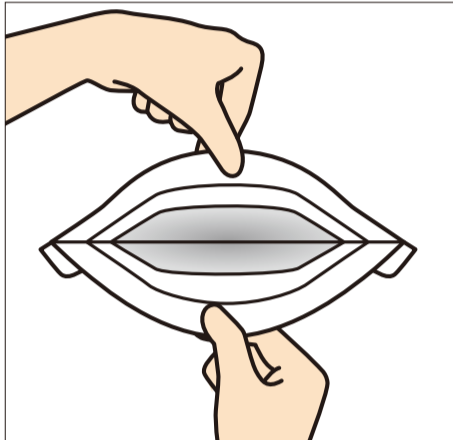

1 マスクの鼻あて部と顎あて部を持ち、上下に広げカップ型にします。ゴムバンドがマスクの上面にくるようにしてください。



2 マスクを顔にあてます。マスクが顎を包み込むようにイメージしてください。



3 マスクを片手で押さえたまま、1本目のゴムバンド (2本のうちどちらでもかまいません) を首の後ろにまわします。
ワンポイント 片方のゴムバンドは、分けておくとおつけやすいです。



4 2本目のゴムバンドを頭頂部につけます。



5 鼻あて部と顎あて部を顔に合わせて広げます。



6 マスク本体の左右のタブを両手に持ち、タブが顔に対して水平になるようにマスクの位置を調整します。



7 両手の指でノーズクリップが鼻に密着するように軽く押します。



8 両手でマスクを覆い、空気の漏れをチェックして密着の良い位置にマスクを合わせます。
[ユーザーシールチェック]

取り外し方法



1 マスク表面には触らないようにして、マスクの首の後ろのゴムバンドを外します。



2 次に頭頂部のゴムバンドを外します。



3 マスクを顔から外し、各施設の規定に従い廃棄または保管してください。