

Família de Integradores Químicos para Esterilização a Vapor

3M Comply™ SteriGage™™

Pacote Desafio com Integrador Tipo 5

A tecnologia avançada do integrador facilita sua leitura e uso.



A tecnologia do 3M Comply™ SteriGage™™ PCD com Integrador Químico para vapor pode ser usada para controle de carga?

Ao fornecer resultados imediatos no desempenho do processo de esterilização, um Pacote Desafio (PCD) com Integrador Químico pode ser usado para monitorar cargas de produtos para saúde (PPS) **não implantáveis**. O 3M Comply™ SteriGage™™ PCD com Integrador Químico para vapor apresenta um desafio ao processo de esterilização equivalente ao pacote de 16 toalhas recomendado pela AAMI. Após o processamento, o integrador deve ser retirado do PCD e o resultado pode ser facilmente interpretado através de “Aceito” ou “Rejeitado”. Se você não estiver monitorando todas as cargas de esterilização a vapor com um PCD com Indicador Biológico, considere usar o 3M Comply™ SteriGage™™ PCD com Integrador Químico para vapor em conjunto com o 3M Attest™™ PCD com Indicador Biológico Super-rápido, conforme descrito na tabela. Desta forma, você terá informações sobre o desempenho do processo de esterilização para todas as suas cargas.

Resultado preciso. Imediato.

Aplicações recomendadas

<p>3M Attest™™ Super Rapid - PCD com Indicador Biológico</p>		<p>Todas as cargas contendo implantes</p>	<p>Teste de eficácia da esterilização de rotina</p>
<p>3M Comply™ SteriGage™™ PCD com Integrador de Químico</p>		<p>Todas as outras cargas não monitoradas por 3M™ Attest™™ Super Rapid - PCD com Indicador Biológico</p>	

Projetado para entregar garantia imediata e precisa na esterilização a vapor.



Certificação Kitemark™ (BSI)

3M Comply™ SteriGage™

Integrador Químico Tipo 5



Por que o controle do pacote é importante?

O monitoramento interno do pacote verifica se as condições necessárias para esterilização foram atingidas no ponto onde o Integrador Químico foi colocado dentro do pacote e confirma se as condições específicas de exposição foram atendidas. Ao usar Integradores Químicos internos, você pode detectar problemas "locais" que às vezes ocorrem devido a erros humanos, problemas da autoclave ou problemas na qualidade da esterilização.

3 poderes


Os Integradores Químicos 3M Comply™ SteriGage™ são projetados para integrar com precisão pequenas mudanças em todos os parâmetros críticos da esterilização. Sua resposta deve equivaler ou exceder os requisitos de performance da ISO 11138 para IB. Integradores Químicos de Tipo 5 – como o 3M Comply™ SteriGage™ – são obrigados a se correlacionar com um IB em três relações tempo / temperatura: 121°C, 135°C e pelo menos uma temperatura intermediária, como 128°C. Além disso, o valor indicado a 121°C deve ser superior a 16,5 minutos. O 3M Comply™ SteriGage™ Integrador Químico Tipo 5 monitora os três parâmetros críticos de esterilização a vapor.

O integrador químico tipo 5 Comply™ SteriGage™ 1243 cumpre as normas ISO 11140-1:2014™.

Elimine erros de interpretação


- Fácil de ler • Mudança de limite

Não processado

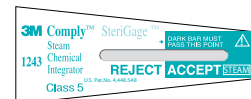


Processado - Aceito

A barra atingiu a janela ACCEPT (aceito) nas três amostras, indicando que as condições necessárias para a esterilização foram atendidas. Se a barra atravessar a região ACCEPT, é considerado aceito.

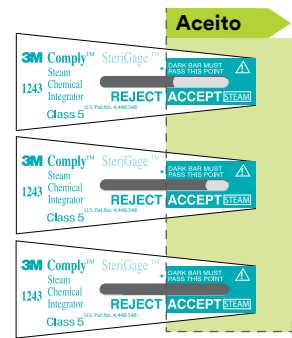


Processado - Rejeitado

A barra está na janela REJECT (rejeitado), indicando que as condições necessárias para a esterilização não foram atendidas. O pacote deve ser processado e a causa da falha de esterilização deve ser investigada. Se a barra estiver na região REJECT ou na linha, é considerada falha.

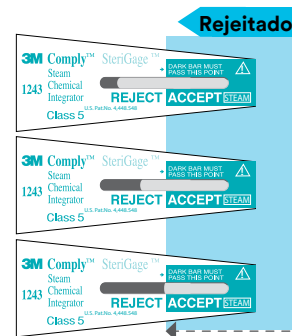

Indicador de Integração versus Curva de Morte Biológica

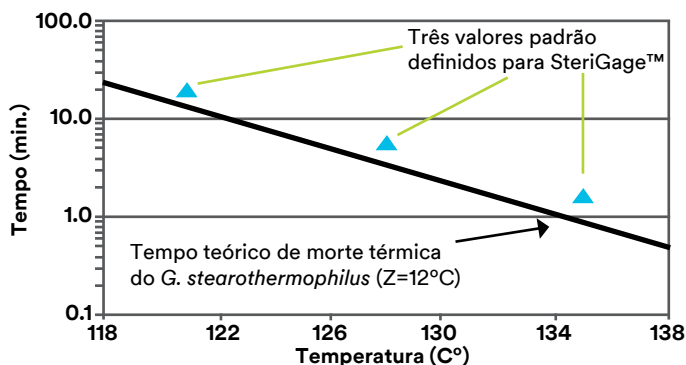

Referência	Código	Nome do produto	Quantidade/Caixa
41360	HB004282677 HB004282677	3M Comply™ SteriGage™ Pacote Desafio com Integrador Tipo 5	1 caixa c/ 16 unidades
1243A	H0001931031	3M Comply™ SteriGage™ Integrador Químico Tipo 5	1 caixa c/ 2 sacos c/500 unid
1243B	H0001931551	3M Comply™ SteriGage™ Integrador Químico Tipo 5	1 caixa c/ 10 sacos c/100 unid

Fale com a 3M

0800-0132333
falecoma3m@mmm.com
Divisão de Prevenção de Infecções
3M Health Care
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, Km 110
13181-900 - Sumaré/SP

facebook.com/3MCuidadosSaudeBrasil

youtube.com/3Mprevencaoinfeccao

www.3M.com.br/hospitalar

