

3M™ サージカルクリッパー プロフェッショナル

3M™ Surgical Clipper Professional


使用方法



Changing Blades 替刃の着脱



取り付け方
替刃の個装フィルムをはがし、本体の先端をスライドさせて替刃を取り付けます。

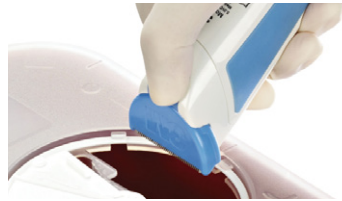

取り外し方
替刃を下に向け、親指で本体の替刃取り外しボタンを押して、替刃を廃棄してください。

替刃に触れることなく、衛生的に替刃の着脱ができます。



9680
3M™ サージカルクリッパー
プロフェッショナル用ブレード (替刃)

Clipping クリッピング




押し刈り



引き刈り

皮膚に対して水平、または少し角度をつけて、替刃を滑らせるように除毛してください。

Cleaning 使用後のお手入れ 3つのお手入れ方法

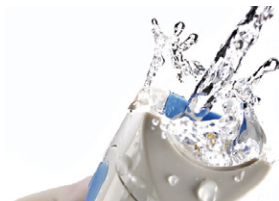

流水洗い
クリッパー本体は、温水などの流水で洗浄して清潔に保てます。



清拭
アルコール、消毒剤、中性洗剤などを少量含ませた布で清拭できます。



浸漬*
水または日本薬局方消毒用エタノールなどに浸漬することができます。浸漬後は流水で洗浄し、乾燥させてください。

※浸漬は15cm以下の深さで、15分を超えないようにしてください。使用可能な浸漬液については、取扱説明書をご確認ください。

Charging 充電

3時間でフル充電でき、約160分間の使用が可能です。充電中は、本体のインジケーターが点滅し、充電レベルを知らせます。



使用方法は、動画でも確認いただけます。
<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/pro/surgicalclipper/>

動画で見る
Instruction for use