

3M™ マスクにくっつくアイガード

正しい着脱方法

装着方法

1



マスクを正しくつけた状態で、眼を充分に覆う位置に合わせてマスクに押しあて装着します。

2




マスクにしっかりと圧着してください。



- ギラつきが気になって角度を変えたい場合や位置を調整したい場合は、つけ直しができます。装着位置を変えて再度圧着してください。
- 装着位置は、アイガードの白い部分(3M™ メカニカルファスナー)がマスクのノーズクリップより下につくよう調整してください。本製品は、素材によってノーズクリップ部分にはくっつかないことがあります。

取り外し方法

1

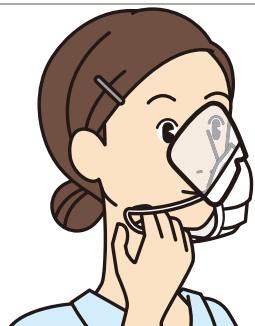

マスクと一緒に外してください。

2



施設の規定に従い廃棄してください。



3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
HPM-630-D(03200.5)IT

2020年3月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)