


3M™ マスクにくっつくアイガード

正しい着脱方法

装着前、取り外し前後に手指衛生を行ってください。

装着方法

手指衛生

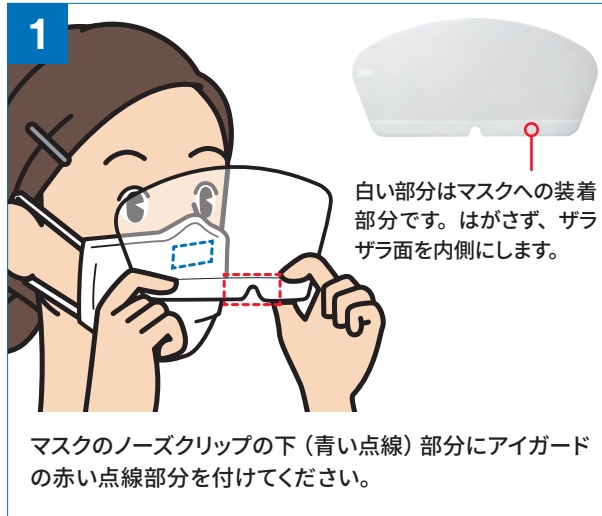

2



両サイドを少し上げてフィルムの角度を調節し、白い部分をマスクにしっかり押し当てます。



ギラつきが気になって角度を変えたい場合や位置を調整したい場合は、つけ直しができます。装着位置を変えて再度圧着してください。

取り外し方法

手指衛生



2



施設の規定に従い廃棄してください。

手指衛生



エアロゾル産成手技の実施時にN95マスク着用の際はキャップにつけると便利です。



動画でも特長や装着方法を分かりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。

