

3M™ Littmann® StethAssist™ Software オフライン登録方法

ソフトウェアをダウンロード後、オンライン登録ができない場合の対処方法について解説いたします。

StethAssist™ Softwareをダウンロード後、PCの入替え・ネット環境などにより、オンライン登録ができない場合にお試ください。

ソフトウェアのオフライン登録方法

製品の登録
本ソフトウェアの使用前に登録が必要です。

名前*	Hana
姓字*	Sagami
電子メール*	XYZ123@abc.com
電子メールを確認*	XYZ123@abc.com
組織名:	
住所:	
市町村*	Shinagawa
都道府県:	
国*	日本

* 必要なフィールド

② 再試行するか、オフラインで登録してください。

私は本ソフトウェアについて以下に同意します [プライバシーポリシー](#)

送信 オフラインで登録 アプリケーションを閉じる

1) ソフトウェアの登録画面で必須項目の「名前」、「姓字」、「電子メール」、「市町村」を入力後、「日本」を選択し、「同意」にチェックを入れて、①「送信」をクリック

②「再試行するか、オフラインで登録してください」となったら、

2) ③「オフラインで登録」をクリックしてください。

①

③

ソフトウェアのオフライン登録方法

オフライン登録

3Mリットマン聴診器の窓口には、1-800-228-3957までお電話いただくか、または電子メール (littmannsoftwaresupport@mmm.com) でお問い合わせください。また、お問い合わせの際は、以下の詳細をお伝えください。よろしくお願いいたします。

④

名前: Hana
姓: Sagami
電子メール: XYZ123@abc.com
組織名:
住所:
市町村: Shinagawa
都道府県:
国: 日本
シリアル番号: C6CF-E80B-7B77

⑤

シリアル番号... C6CF-E80B-7B77

⑥

応答コード: - -

⑦

オフラインで登録

戻る

アプリケーションを閉じる

「オフライン登録」画面

- ④のお問い合わせメールアドレス「littmannsoftwaresupport@mmm.com」宛に、⑤に表示されている「必要事項」と、⑥「シリアル番号」を入力した英文メール(次ページを参照)を送信してください。
- ⑦「アプリケーションを閉じる」をクリック。(ソフトウェアは一旦、ここで終了してください)

英文メール書き方(例)

メールの宛先(前ページの④):

「littmannsoftwaresupport@mmm.com」

送付文の例(英語でお送りください):

I tried to install the software, but could not finish the on line registration.
Would you please send me the code for off line registration ?

Name: <名前(ローマ字)>

Last Name: <姓(ローマ字)>

Email Address: <電子メールアドレス>

City: <市町村名(ローマ字)>

Country: <Japan>

Serial number: <前ページの⑥「シリアル番号」(注: 聴診器のシリアル番号ではありません)>

前ページの⑤の内容を英語で記載

Thank you.

ソフトウェアのオフライン登録方法

製品の登録
本ソフトウェアの使用前に登録が必要です。

名前*
姓*
電子メール*
電子メールを確認*
組織名:
住所:
市町村*
都道府県:
国*

* 必要なフィールド
② 再試行するか、オフラインで登録してください。
 *私は本ソフトウェアについて以下に同意します [プライバシーポリシー](#)

①

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential. **3M**

2-3日中に、「Please use this response code」という内容で、「応答コード」が送られてきます。

5) ソフトウェアを立ち上げる。

「製品の登録」画面

6) ③「オフラインで登録」をクリック。

ソフトウェアのオフライン登録方法

オフライン登録

3M リットマン聴診器の窓口には、1-800-228-3957までお電話いただくか、または電子メール (littmannsoftwaresupport@mmm.com) でお問い合わせください。また、お問い合わせの際は、以下の詳細をお伝えくださいますようお願いいたします。

④

名前: Hana
姓: Sagami
電子メール: XYZ123@abc.com
組織名:
住所:
市町村: Shinagawa
都道府県:
国: 日本
シリアル番号: C6CF-E80B-7B77

⑤

シリアル番... ⑥
応答コード:

⑧

⑨

© 3M 2018. All Rights Reserved. 3M Confidential. **3M**

「オフライン登録」の画面

7) ⑧「応答コード」(ハイフンの位置に注意)を入力
⑨「オフラインで登録」をクリックすると、すぐに聴診器とのペアリングに進みます。