



Cavilon™

Skin Care Solutions

Ohje 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvon käyttöön

Inkontinenssin aiheuttaman dermatiitin (IAD) ehkäisyyn ja hoitoon



Ohje 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvon käyttöön

Inkontinenssin aiheuttaman dermatiitin (IAD) ehkäisyyn ja hoitoon

Tarvittavat tuotteet:

- ▶ 3M™ Cavilon™ Pesu- ja puhdistuspyyhkeet tai pelkkää vettä
- ▶ Nukkaamattomia liinoja
- ▶ 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvoa
- ▶ Suojakäsineet

Esivalmistelut



1 Laita tuotteet puhtaalle tasolle.



2 Avaa Cavilon Advanced Ihonsuojakalvon pakkaus ja anna aplikaattorin olla muovisessa pussissa.

Laita potilas hyvään asentoon ja puhdista iho



3 Laita potilas hyvään asentoon (paljasta vain puhdistettava ihoalue ja peittele muuten potilas, jotta potilaalla on lämmin ja hyvä olla).



4 Puhdista ihoalue hellävaraisesti pH-tasapainoitetulla puhdistusaineella tai pelkällä vedellä.
Kuivaa alue varovasti. Jos iho on rikkoutunut ja erittävä, kuivaa ihoaluetta tarvittaessa taitoksella.

Vaihda suojakäsineet



5 Vaihda suojakäsineet.

Aplikaattorista riittää ihonsuojakalvoa noin A4 paperin kokoiselle ihoalueelle.

Voit käyttää useamman aplikaattorin tarvittaessa peittämään koko ihoalueen.

Katso Cavilon Advanced Ihonsuojakalvon käyttöohjeet mahdollisia kontraindikaatioita, varotoimenpiteitä ja varoituksia varten.

*Cavilon Advanced Ihonsuojakalvoa ei tule käyttää minkään muun ihonsuojatuotteen kanssa (esim. dimeticone).

Sivele 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvo



6 Tartu aplikaattoriin ja aseta peukalo vivun päähän.

Osoita aplikaattorin vaahtomuovipää alaspäin ja paina vipu peukalolla alas, jotta aplikaattorin ampulli rikkoutuu.

Voit kuulla pokahtavan äänen, kun ampulli rikkoutuu; vipua ei tarvitse enää painaa tämän jälkeen.



7 Pidä aplikaattori osoitettuna alaspäin ja anna nesteen valua noin 10 sekunnin ajan alaspäin vaahtomuoviin. Neste valuu itsestään alas, eikä vipua tarvitse enää painaa.

Neste ei täysin imeydy vaahtomuovin reunoille saakka.



8 Sivele vaahtomuoviaplikaattorilla Cavilon Advanced Ihonsuojakalvoa vahingoittuneelle alueelle sekä ympäröivälle iholle. Tee tasaista ja sivelevää liikettä ja vältä päällekkäistä pyyhkimistä. Aplikaattorilla voi pyyhkiä kaikkiin suuntiin. Aplikaattorin vipua ei tarvitse painaa enää tässä vaiheessa.

Aplikaattoria ei tarvitse puristaa. Ylimääräinen puristaminen saattaa aiheuttaa nesteen valumista ja ihoalueen liiallista kastumista.



9 Jatka tuotteen sivelemistä, kunnes koko alue on käsitelty. On tärkeää, että kalvo on sivelty koko sille alueelle, joka altistuu virtsalle ja/tai ulosteelle.



10 Anna alueen kuivua ainakin 30 sekuntia. Jos huomaat jonkin alueen jääneen ilman ihonsuojakalvoa, odota kunnes kalvo on kuivunut ja käsittele sitten puuttuva alue.



11 Jos olet sivellyt kalvoa poimuiselle ihoalueelle tai alueelle, jossa ihot ovat vastakkain, pidä ihoalueet erillään ja anna kalvon kuivua kunnolla (vähintään 30 sekuntia).

Lisätiedot



Ihonsuojakalvoa tulee levittää kaksi kertaa viikossa.

Cavilon Advanced Ihonsuojakalvo on vedenkestävä eikä se lähde peruspuhdistamisen yhteydessä. Liiallinen kalvon lisääminen kasaantuu iholle.



Anna kalvon kuivua ainakin 60 sekuntia ennen kuin asetat liimallisen sidoksen tai kirurgisen teipin ihoalueen päälle.

Kalvo kuluu itsestään pois, eikä sitä tarvitse erikseen poistaa. Jos kalvo halutaan poistaa jostain syystä, käytä liimanpoistoainetta (tulee sisältää: hexametyldisiloxane tai silikonipolymeriä).

On suositeltavaa käyttää liimanpoistoainetta (tulee sisältää: hexametyldisiloxane tai silikonipolymeriä), kun liimallista sidosta tai teippiä poistetaan ihoalueelta, joka on käsitelty Cavilon Advanced Ihonsuojakalvolla.

Koe kuinka 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvo auttaa sinua pysäyttämään, hoitamaan ja estämään IAD:n

Lisätietoja osoitteessa www.3msuomi.fi/EndIAD tai ota yhteyttä paikalliseen tuoteasiantuntijaan.

Tilaustiedot

3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvo

3M Tuotenumero	Koko	kpl/pakk.
5050G	2,7 ml applikaattori	20



Suomen 3M Oy
Terveystuotteet
Keilaranta 6
02510 ESPOO
Puh. (09) 52 521
www.3M.fi
www.Cavilon.fi

Cavilon on 3M Companyn omistama tuotemerkki.
Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa. ©3M 2018.
Kaikki oikeudet pidätetään. BR531149-2FI180319.