

Stetoskopets anatomi

Illustrationen herunder viser et 3M™ Littmann® stetoskop. I denne finder du generelle oplysninger samt fakta, som er specifikke for Littmann stetoskoper.

Øreoliven

Øreoliven er de dele, som indsættes i øret. De skal sidde tæt til og udelukke udefrakommende støj, så du kan fokusere på auskultationen. Alle Littmann stetoskoper er udstyret med snap-tight, bløde øreoliven.

Slange- og bøjlesæt


Lyden passerer fra bryststykket gennem fleksible slanger og derpå gennem metalbøjlesættet. Littmann stetoskopets bøjlesæt er fremstillet af en aluminiumslegering (som anvendt i rumfart og luftfart), som giver både styrke og lettere vægt.

Headset

Headsettet består af to bøjler bærestykke og øreoliven. Littmann stetoskopets headset kan justeres for at sikre god tilpasning til ørekanalerne ved at klemme øreslangerne sammen eller trække dem fra hinanden.

Slange

Slangen tilvejebringer stien for lyden. Littmann stetoskoper har slanger af næste generation, som har bedre modstandskraft over for hudfedt og alkohol, så deres holdbarhed er længere.

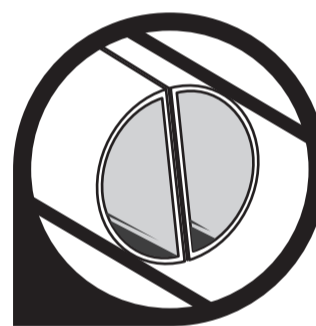

Slange med dobbelt lumen

3M™ Littmann® Cardiology stetoskoper har slanger med dobbelt lumen: to lydster indeni i én udvendig slange, hvilket hjælper med at eliminere friktionsstøjen fra traditionelle dobbeltslanger.

Stamme

Stammen forbinder slangen med bryststykket. På Littmann stetoskoper med dobbeltsidet bryststykke bruges stammen til at indeksere, eller åbne, siden af det bryststykke, du ønsker at bruge.

Bryststykke

Bryststykket placeres på patienten for at opfange lyde. Nogle Littmann modeller har et enkeltstid bryststykke med flydende membran. Andre har et dobbeltsidigt bryststykke med en membran på den ene side og en klokke på den anden side. Nogle klokker er altid åbne, mens andre er lukkede med en flydende membran, afhængigt af modellen.

Flydende membran

En flydende membran er en 3M opfindelse, hvormed du nemt kan skifte mellem at høre høj- og Slange- og bøjlesæt blot ved at justere trykket på bryststykket.

Få mere at vide om brug af stetoskoper.

3M™ Littmann® Learning Institute App har masser af træningsressourcer til auskultering, som hjælper dig med at skærpe din evne til at høre gennem et stetoskop. Basisversionen af appen kan downloades gratis fra iTunes App Store (til iOS-enheder) eller Google Play (til Android-enheder).

www.littmann.dk

© 3M 2018. Alle rettigheder forbeholdes.

3M
Littmann®
Stethoscopes

