

3M™ Curoso™ Dezinfekční uzávěr pro bezjehlové konektory

Dezinfekční uzávěry Curoso™ určené pro bezjehlové konektory typu luer, slouží jako dezinfekce a fyzická bariéra zabraňující kontaminaci.

Curoso funguje jako pasivní dezinfekce a ochrana bezjehlových konektorů na principu 1-minutové lázně v alkoholu a 70% isopropyl alkoholu, čímž je dosaženo vysokého dezinfekčního účinku. Uzávěr může sloužit jako fyzická bariéra proti kontaminaci až po dobu 7 dnů, pokud není odstraněn.

Poznámka: tento výrobek je určen pouze pro bezjehlové konektory.



Výhody Curoso™ dezinfekčního uzávěru bezjehlových konektorů


Účinná dezinfekce. Dezinfekční uzávěr Curoso provede dezinfekci za 1 minutu a bezjehlové konektory zůstanou čisté po dobu až 7 dnů. Pasivní dezinfekce vyloučí lidský faktor, protože dezinfikuje pokaždé stejně.

Stačí našroubovat. Dezinfekční uzávěr Curoso se dá lehce našroubovat a zůstane bezpečně na svém místě. Hodí se pro všechny běžně používané bezjehlové konektory typu luer a splňuje požadavky Infusion Nursing Standards z r. 2011.

Jasně barvy pro předpisovou dezinfekci. Výrazná barva uzávěru umožňuje okamžitě ověřit, že je konektor čistý. Snadné a spolehlivé dodržování pravidel dezinfekce je tak zaručeno.

Flexibilní a pohodlná manipulace. Pro větší pohodlí a lepší kontrolu účinnosti jsou dezinfekční uzávěry Curoso k dispozici v balení jako jednotlivé kusy nebo jsou dodávány na stripu, který lze zavěsit na infuzní stojan.

Curoso™ dezinfekční uzávěry pro bezjehlové konektory Dezinfekční účinnost v čase

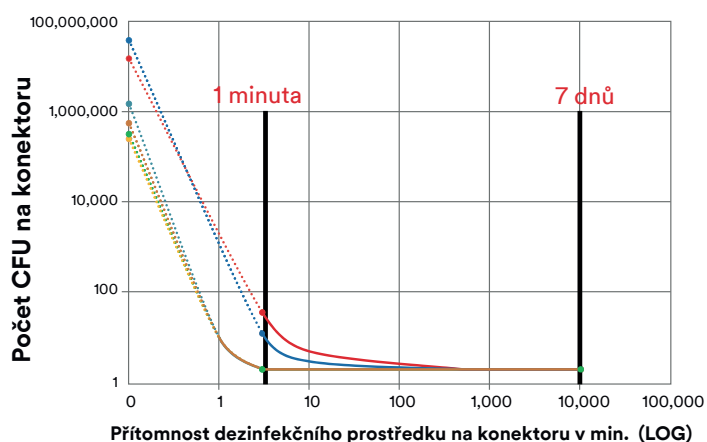

Údaje z nezávislé laboratoře. Účinnost Curoso™ dezinfekčních uzávěrů byla testována in vitro na 6 běžných organismech a podle výsledků došlo k více než 99,99 % poklesu počtu organismů (> 4 log).

- | | |
|------------------|-----------------|
| — S. aureus | — P. aeruginosa |
| — S. epidermidis | — C. albicans |
| — E. coli | — C. glabrata |






Odtrhněte.



Přiložte.



Našroubujte.

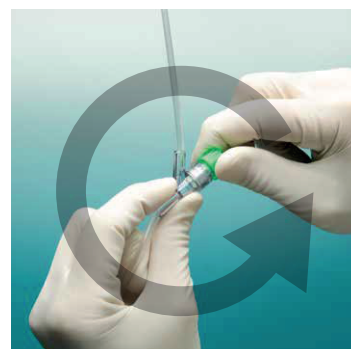

Návod k použití:

1. Odtrhněte fólii nebo oddělte od stripu Curosur™ dezinfekční uzávěr pro bezjehlové konektory.
2. Po sejmutí fólie přiložte a našroubujte dezinfekční uzávěr Curosur™ na konec bezjehlového konektoru.
3. Dezinfekční uzávěr Curosur™ musí zůstat na bezjehlovém konektoru alespoň 1 minutu a smí být nasazen po dobu až 7 dnů (168 hodin), nebo po dobu zamýšleného použití, pokud není sejmut.
4. Po každém použití byste měli na bezjehlový konektor použít nový dezinfekční uzávěr Curosur™.
5. Po použití uzávěr vyhodte.

Kdy je třeba mechanicky čistit?



...když odstraňuji
dezinfekční uzávěr
bezjehlových konektorů
Curosur? NE!



...mezi sekvenčními
infuzemi?
ANO!



...když je konektor
viditelně špinavý?
ANO!



...pokud je konektor
delší dobu odkrytý?
ANO!

Informace pro objednání

Název produktu	Katalogové číslo	Materiál	Balení	
3M™Curosur™ dezinfekční uzávěr pro bezjehlové konektory jednotlivě	CFF1-270R	7100101995	270 ks/balení, 10 balení/krabice 2 700 ks/krabice	
3M™Curosur™ dezinfekční uzávěr pro bezjehlové konektory stripy	CFF10-250R	7100101996	10 ks/strip, 25 stripů/balení, 10 balení/krabice, 2 500 ks/krabice	

3M

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha
Tel: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
www.3M.cz/zdravotnictví

Použité tiskoviny odevzdejte k recyklaci.
3M, 3M Science. Applied to Life. a Curosur
jsou ochranné známky společnosti 3M.
© 2017, 3M. Všechna práva vyhrazena.

