

3M**Tegaderm™**

Lösungskonzepte für die Wundversorgung

3M™ Tegaderm™ Silikon-Schaumverbände

Sakralapplikation

1. Wunde und umliegende Haut gemäß den hausinternen Richtlinien reinigen.
2. Wundumgebung gründlich trocknen.
3. Wunde beurteilen.
4. Einen Verband in geeigneter Größe auswählen, so dass die Schaumaufgabe größer als die Wundfläche ist.

Vorbereitung und Positionierung



1 Den Verband der Verpackung entnehmen und in der Mitte falten.



2 Die beiden seitlichen Laschen festhalten und das weiße Schutzpapier abziehen.



3 Den Verband an den seitlichen Laschen halten und im steilen Winkel zuerst mittig in der Analfalte positionieren. Dabei die Gesäßhälften auseinander halten.



4 Den Verband von der Gesäßfalte aus behutsam von innen nach außen an die Haut anmodellieren.



5 Das blaue Trägerpapier von der Mitte beginnend, einzeln und flach in Richtung Außenkante abziehen.



6 Den Verband durch Drücken an den abgedeckten Hautbereich anformen.

Beurteilung



1 Den klebenden Rand des Verbands von der Oberkante des Verbands her mit beiden Händen von der Haut ablösen.



2 Den Verband behutsam zurückziehen, um die darunterliegende Haut der knöchernen Vorsprünge beurteilen zu können.







3 Den Verband wieder anlegen. Die Ränder glätten und gegebenenfalls anpassen, um Falten zu eliminieren.

Zusätzliche Informationen

Als Flaggschiff der innovativen Klebetechnologie von 3M bietet der 3M™ Tegaderm™ Silikon-Schaumverband eine deutlich längere Tragedauer als führende Silikon-Schaumverbände anderer Hersteller². Der Verband kann bis zu sieben Tage lang auf der Wunde verbleiben. Dazu ist er besonders sanft zur Haut und für alle Exsudatmengen (schwach bis stark) geeignet. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt vom Wundtyp, der Exsudatmenge und der klinischen Situation ab. Wenn das Exsudat die Verbandränder erreicht bzw. aus dem Verband auszutreten beginnt, muss der Verband gewechselt werden.

Bestellinformationen

	Artikel Nr.	Informationen	Abmessung	Stück pro Packung	Packungen pro VE ¹
	90631	Wundverband ohne Haftrand	10 cm x 10,8 cm	10	4
	90632	Wundverband ohne Haftrand	15 cm x 15 cm	10	4
	90643	Wundverband mit Haftrand	5 cm x 5 cm	10	6
	90640	Wundverband mit Haftrand	7,5 cm x 7,5 cm	10	6
	90641	Wundverband mit Haftrand	10 cm x 10 cm	10	6
	90642	Wundverband mit Haftrand	15 cm x 15 cm	10	4
	90646	Ferse & Kontur mit Haftrand	16,5 cm x 16,5 cm	5	4
	90647	Sakral, klein mit Haftrand	15 cm x 17 cm	10	4
	90648	Sakral, groß mit Haftrand	18,5 cm x 22 cm	5	4

¹ Versandeinheit

² 10 cm x 10 cm und 15 cm x 15 cm-Wundverbände, basierend auf in-vivo-Studien EM-13977 und EM-13978

 Ausserklinischer Vertrieb durch Fresenius Kabi Deutschland GmbH

3M

3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11
41453 Neuss
Telefon +49 (0)21 31 14-0
Telefax +49 (0)21 31 14 44 32
3MMedica.de@mmm.com
www.3MMedica.de

3M Österreich GmbH
Health Care
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Telefon +43 (0)186 686-0
Telefax +43 (0)186 686-330
Medizin-at@mmm.com
www.3M-Medizin.at

3M (Schweiz) GmbH
Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon +41 (0)44 724 92 31
Telefax +41 (0)44 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/healthcare

3M und Tegaderm
sind Marken von 3M.
Bitte recyceln.
© 3M 2017.
Alle Rechte vorbehalten.
2017-0089 / EB12-0031