

Hälapplicering

1. Rengör såret och den omgivande huden enligt gällande rutiner.
2. Torka försiktigt den omgivande huden.
3. Inspektera såret.
4. Välj ett förband i lämplig storlek, så att skumdynan är större än sårområdet.

Förberedelser och förbandsapplicering



1 Ta upp förbandet ur förpackningen och öppna flikarna på ena sidan.



2 Håll samman sidflikarna och ta bort den vita baksidan.



3 Placera förbandet över såret. Börja på plantarsidan av hälen och tryck försiktigt förbandets nedre halva mot huden.



4 Ta bort den första delen av den blå folien genom att dra flikarna mot förbandets ytterkant.



5 Forma resten av förbandet över hälen bakre del och överlappa förbandets kanter om så behövs.



6 Ta bort resten av den blå folien. Tryck lätt så att förbandet fäster vid huden.

Bedömning



1 Lyft benet så att hälen är i luften.



2 Börja från plantarsidan och lyft försiktigt kanten uppåt med båda händerna och dra neråt för att undersöka hälsområdet.







3 Fäst förbandet på nytt. Släta till kanterna och justera om så behövs, för att undvika veck.

Ytterligare information

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband med kant kan sitta kvar i upp till sju dagar. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på typen av sår, mängden sårvätska och den kliniska situationen. När sårvätskan har spridit sig till förbandets kanter eller förbandet börjar läcka, är det dags att byta.

Beställningsinformation

	Information	3M Art.nr	Storlek	Förband/ låda	Lådor/ kartong
	Förband utan häftande kant	90631	10 × 11 cm	10	4
	Förband utan häftande kant	90632	15 × 15 cm	10	4
	Förband med häftande kant	90643	5 × 5 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90640	7,5 × 7,5 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90641	10 × 10 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90642	15 × 15 cm	10	4
	Häl och kontur med häftande kant	90646	16,5 × 16,5 cm	5	4
	Sakrumformat, litet, med häftande kant	90647	15 × 17 cm	10	4
	Sakrumformat, stort, med häftande kant	90648	18,5 × 22 cm	5	4

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband är baserat på 3Ms innovativa häftämnesteknologi och möjliggör betydligt längre användningstid än det konkurrerande och världsledande silikonskumförbandet*, samtidigt som det är skonsamt för huden.

På 3M.com/SiliconeFoam kan du läsa mer om produkten.

*Förband i storlek 10 x 10 cm respektive 16,5 x 16,5 cm, baserat på in vivo-studierna EM-13977 och EM-13978

3M

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 78 Sollentuna
Telefon 08-92 21 00
E-post kundservice@mmm.com
Webb www.3M.se

3M och Tegaderm
är varumärken som tillhör 3M.
För återvinning.
© 3M 2017. Med ensamrätt.
10/17