

Sakrumapplicering

1. Rengör såret och den omgivande huden enligt gällande rutiner.
2. Torka försiktigt den omgivande huden.
3. Inspektera såret.
4. Välj ett förband i lämplig storlek, så att skumdynan är större än sårområdet.

Förberedelser och förbandsapplicering



1 Ta upp förbandet ur förpackningen och vik det på mitten.



2 Håll samman sidflikarna och ta bort den vita baksidan.



3 Håll upp sidflikarna och placera förbandet över såret. Sära på skinkorna, så blir det enklare att sätta förbandet på plats.



4 Börja vid glutealklyftan och tryck försiktigt förbandet mot huden från mitten och utåt.



5 Med början i mitten, ta bort den blå folien en sektion i taget genom att dra den mot förbandets ytterkant.



6 Tryck för att forma förbandet efter det aktuella hudområdet.

Bedömning



1 Börja högst upp på förbandet och lyft upp den häftande kanten från huden med båda händerna.



2 Dra försiktigt bort förbandet så att du kan se de underliggande bendelarna.







3 Fäst förbandet på nytt. Släta till kanterna och justera om så behövs, för att undvika veck.

Ytterligare information

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband med kant kan sitta kvar i upp till sju dagar. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på typen av sår, mängden sårvätska och den kliniska situationen. När sårvätskan har spridit sig till förbandets kanter eller förbandet börjar läcka, är det dags att byta.

Beställningsinformation

	Information	3M Art.nr	Storlek	Förband/ låda	Lådor/ kartong
	Förband utan häftande kant	90631	10 × 11 cm	10	4
	Förband utan häftande kant	90632	15 × 15 cm	10	4
	Förband med häftande kant	90643	5 × 5 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90640	7,5 × 7,5 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90641	10 × 10 cm	10	6
	Förband med häftande kant	90642	15 × 15 cm	10	4
	Häl och kontur med häftande kant	90646	16,5 × 16,5 cm	5	4
	Sakrumformat, litet, med häftande kant	90647	15 × 17 cm	10	4
	Sakrumformat, stort, med häftande kant	90648	18,5 × 22 cm	5	4

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam förband är baserat på 3Ms innovativa häftämnesteknologi och möjliggör betydligt längre användningstid än det konkurrerande och världsledande silikonskumförbandet*, samtidigt som det är skonsamt för huden.

På 3M.com/SiliconeFoam kan du läsa mer om produkten.

*Förband i storlek 10 x 10 cm respektive 16,5 x 16,5 cm, baserat på in vivo-studierna EM-13977 och EM-13978

3M

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 78 Sollentuna
Telefon 08-92 21 00
E-post kundservice@mmm.com
Webb www.3M.se

3M och Tegaderm
är varumärken som tillhör 3M.
För återvinning.
© 3M 2017. Med ensamrätt.
10/17