

New

お得な  
大容量



**TP1-L50** (50mL)    **TP1** (30mL)

**TP2** (3mL)

### 滴下ボトルタイプ

ボトルを傾けるだけで  
滴下できます。

### ワイプタイプ

剥がしたい箇所に  
ピンポイントで使用できます。  
個包装パッケージで衛生的。

お客さまのご要望にお応えして  
**滴下ボトルが  
半透明にリニューアル!**

New

この窓から、  
残りの液量が見えます!



## 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバー

未滅菌

製品番号	タイプ/容量 (mL)	入れ目		希望小売価格 (税抜き)
		本/箱	袋/箱	円/箱
TP1	滴下ボトル/ 30	1	—	1,300
TP1-L50	滴下ボトル/ 50	1	—	1,650
TP2	ワイプ/ 3	—	30	2,350

はくり剤

- 鼻や口から吸入しないよう注意してください。
- 目、鼻、口等に入らないよう注意してください。  
万一入った場合は、直ちに多量の水でよく洗浄し、  
医師の診療を受けてください。

### 使用上の注意

- 傷んだ皮膚、傷、粘膜、腫れ物、湿疹、皮膚の感染部位、刺入部等へは使用しないでください。
- 粘着製品の剥離時に傷口が発見された場合には、傷口にかからないように使用してください。また傷口にかかる可能性がある場合には、使用を中止してください。
- お肌に異常が生じていないかをよく注意して使用してください。
- 本製品の使用によって皮膚の赤み、はれ、かゆみ、色抜け(白斑等)、黒ずみ、炎症の兆候(腫れ、熱感等)が現れた場合には、直ちに使用を中止してください。赤みや炎症が続く場合は、医師の診察を受けてください。
- 生後1ヶ月未満の乳児または体が小さい乳児への使用の可否は、医師の判断を仰いでください。

### 成分

ヘキサメチルジシロキサン、ソルビタンモノオレエート、トリカブリン

### 火気厳禁 第4類第一石油類 危険等級II

手術室での滴下ボトルタイプの使用は避けてください。  
手術室で使用される場合は、ワイプタイプをご使用ください。

添付の取扱説明書を、必ず読んでからご使用ください。

3M、Cavilon、キャビロンは3M社の商標です。

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部  
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.  
HPM-340-M(0419)

2019年4月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバー

粘着製品をお肌からやさしく剥がせるはくり剤

やさしく“パラっと”  
はがして“サラっと”

粘着力を弱めて、剥がす時の刺激と  
皮膚の損傷を低減します。

非アルコール性(低刺激タイプ)



粘着製品を皮膚から無理に剥がそうとすると、お肌にダメージを与えてしまいます。また、同じ箇所に粘着製品を貼ったり剥がしたりを繰り返すと、かぶれや損傷の原因となります。



お肌へ負担の少ない方法で剥がしましょう。

## 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバーは 粘着剤をお肌から やさしく剥がせます。

やさしく  
パラっと

### “パラっと” 素早く剥がれる

皮膚と粘着剤のわずかな隙間に入り、粘着剤を皮膚から浮かせて剥がします。

はがして  
サラっと

### 剥がした後の洗浄がラク

ベタつきが少なく、“サラっと”した使用感です。剥がした後の皮膚の洗浄がラクに行えます。

低刺激


### デリケートなお肌に安心

非アルコール性のはくり剤で、低刺激です。アレルギーテスト済み。

(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)

### シリコーン系のはくり剤

#### パラっと剥がせるひみつ

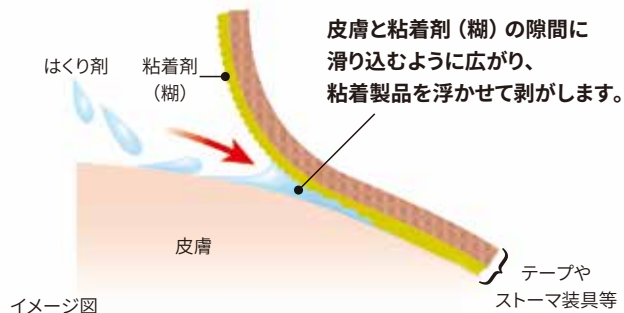

New



TP1-L50  
(50mL)

TP1  
(30mL)

## TP1-L50/TP1

### 滴下ボトルタイプ

ボトルを傾けるだけで滴下できます。



ボトルを押すと、はくり剤が出過ぎますのでご注意ください。容器の先端は皮膚に直接つけないようにご注意ください。

### 滴下ボトルタイプの使用例

#### 【ストーマ装具等を剥がす場合】



1 ストーマ装具の上部からはくり剤を滴下し少しめくります。

ボトルは傾けるだけで押す必要はありません。

2 接着面と皮膚の間に上から少しずつ滴下していくと、ストーマ装具はパラっと剥がれていきます。

強く引っ張る必要はありません。

—ストーマ装具

滴下できない局所の粘着製品を剥がす場合は、TP2をご使用いただくか、綿棒等にはくり剤を染み込ませてご使用ください。



## TP2

### ワイプタイプ

たっぷり3mLのはくり剤を含浸

- 狭い範囲や局所にも、ピンポイントで使用可能
- やわらかく、肌ざわりのよいワイプ素材
- 個包装パッケージで衛生的

開封時に、はくり剤を衣類にこぼさないようご注意ください。ワイプで肌をゴシゴシ擦らないようご注意ください。

### ワイプタイプの使用例

#### 【ストーマ装具等を剥がす場合】



1 パウチの中のはくり剤を少量ずつ滴下し、端部をめくります。

ストーマ装具 —

2 ワイプを肌に滑らせるようにして、剥がしてください。

強く引っ張る必要はありません。

#### 【サージカルテープ等の粘着製品を剥がす場合】



1 ワイプを少しつまみ、はくり剤を皮膚と粘着剤の隙間に染み込ませて端部をめくります。

—サージカルテープ

2 ワイプを肌に滑らせるようにして、剥がしてください。

180度折り返しながら剥がします。

180°

パウチの中に残っているはくり剤も、ご使用いただくことができます。

添付の取扱説明書を、必ず読んでからご使用ください。