

# クリンプロ™ シーラント

小窩裂溝封鎖材

極細チップと塗布しやすいシリンジタイプ。 前処理も選べて、さらに使いやすくなりました。

# 狙い通りに適量を塗布できます。

# 極細先端チップ

フローが良いので、軽い押し出し圧で微細な小窩裂溝にも狙い通りに適量塗布できます。


クリンプロ™シーラント 管の直径:約0.4mm

コンポジットレジン

(当社従来品)

管の直径:約 0.9mm



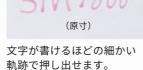

# シリンジタイプ

小児の口腔内にも直接塗布しやすい、手軽でコンパクトなシリンジです。

# ペーストの色が変化

塗布範囲が分かりやすいピンク色から、光照射して硬化すると、歯に なじむ白色に変化します。





塗布範囲が分かる ピンク色

歯になじむ 白色に変化

# さらにこんな特長も備えてます。



冷蔵不要






撹拌不要

フッ素徐放

常温保管できます。 振らずにすぐ使えます。 フッ素を徐放します。

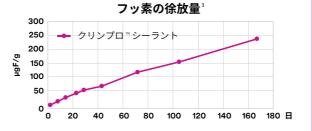

1:3M internal data

クリンプロ™ シーラントを 実際にお試しいただいた 開業医の方々の感想です。

押し出しやすい 91.3%

(ピンク) が良い

硬化後の色 (白色) が良い 72.8%

パーセント値は、(満足)(やや満足)の合計です。

# 患者さんに合わせて、前処理を選択できます。

### エッチングで前処理

# スコッチボンド™ユニバーサル エッチャント シリンジ



- フローが良くなり、使いやすい。
- ●濃い青色の材料で、歯面が見やすい。



### アドヒーシブで前処理

### スコッチボンド™ユニバーサル アドヒーシブ

歯科用象牙質接着材・歯科セラミックス用接着材料・ 歯科金属用接着材料・歯科用知覚過敏抑制材料





- CR 充填等に使う接着材が、前処理材としても使用可能。
- ●水洗不要のため、短時間での処置が可能。
- ●エッチングの苦手な患者さんにおすすめ。

# 大臼歯小窩裂溝への術式




エアースケーラー等を用いて歯面を清掃 する。着色部にはポリッシングブラシに よる研磨を行う。

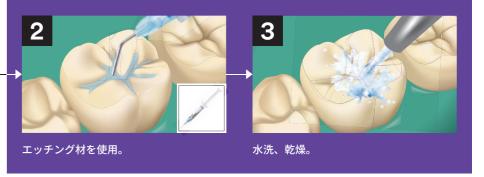

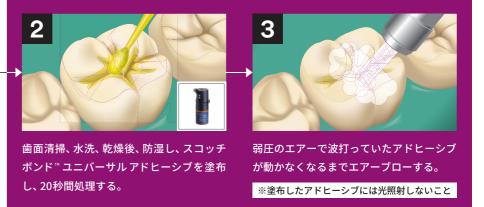



クリンプロ™シーラントを塡塞。

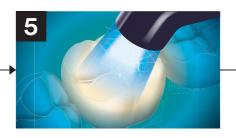

光照射(高出力 LED:10 秒/ハロゲン:20 秒)



白色に変化。歯になじんで目立たない。 小綿球で未重合層をふき取り、咬合チェック を行う。



### クリンプロ™ シーラント スターターキット

(前処理エッチングタイプ)

#### 内容:

- ・シーラント シリンジ 1.2mL×1本
- ・シーラント ディスペンシング チップ×10個
- ・スコッチボンド™ ユニバーサル エッチャント シリンジ 3mL×1本
- エッチャントディスペンシングチップ×25個

製品番号:12646E 希望医院価格:8,100円



#### クリンプロ™ シーラント スターターキット (前処理アドヒーシブタイプ)

#### 内容:

- ・シーラント シリンジ 1.2mL×1本
- ・シーラント ディスペンシング チップ×10個
- ・スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブ 5mL×1本

製品番号: 12646U 希望医院価格:15,100円

#### 補充品

#### クリンプロ™ シーラント シリンジ

内容:

・シーラント シリンジ 1.2mL×1本

・シーラント ディスペンシング チップ×10個

製品番号: 12627 希望医院価格:4400円

#### クリンプロ™ シーラント ディスペンシング チップ

製品番号:12626T 希望医院価格:750円

#### スコッチボンド™ユニバーサル エッチャント シリンジ

内容:

・3mL×2本

・エッチャント ディスペンシング チップ (25個) ×2袋

製品番号:41263 希望医院価格:9500円

#### エッチャント ディスペンシング チップ

内容:25個 製品番号:41274 希望医院価格:1,050円

#### スコッチボンド™ユニバーサル アドヒーシブ ボトルタイプ

内容:

・5mL×1本

製品番号:41258 希望医院価格:12.600円

#### クリンプロ™予防歯科製品(セルフケア)シリーズ



薬用歯みがき 医薬部外品

歯科医院専売品 素濃度 1450ppm

6歳未満にはお使い いただけません。



薬用歯みがき 医薬部外品 歯科医院専売品

フッ素濃度 950c

#### クリンプロ™ 歯みがき ペースト F1450

内容:90g 内装入数:6本 製品番号:

ソフトミントフレーバー:8211 シトラスミントフレーバー:8212

希望医院価格:1,030円/本、参考患者価格:1,280円/本

※販売単位は1箱(6本入)です。

#### クリンプロ™ 歯みがき ペースト

内容:90g 内装入数:6本 製品番号:

・ソフトミント フレーバー:8251 DFN シトラスミントフレーバー:8253

希望医院価格:950円/本、参考患者価格:1,180円/本

※販売単位は1箱(6本入)です。



#### クリンプロ™ デンタル フロス 個装タイプ

内容:32本/袋 内装入数:3袋 製品番号:8263

希望医院価格:430円/袋、参考患者価格:540円/袋

**Tooth! Navi** 3Mの「歯と健康を守る」サイト

※販売単位は1パック(3袋入)です。

#### クリンプロ™予防歯科製品(プロフェッショナルケア)シリ・



#### クリンプロ™ クリーニング ペースト PMTC用

■1太入り 内容:50g×1本 製品番号:**8241** 希望医院価格:1.680円

■ダブルパック 内容:50g×2本 製品番号:**8241W** 希望医院価格:3,180円



#### クリンプロ™ XT バーニッシュ 知覚過敏抑制材料

内容: •5g×1本 ・練板紙×1冊 製品番号:12248S

希望医院価格:9,500円

3M 歯と健康 Q

3 M コールセンター

販売名:クリンプロシーラント 認証番号:222AKBZX00098000 / 販売名:クリンプロトゥース クリーム αs(ソフトミント フレーバー)、クリンプロトゥース クリーム α c(シトラスミント フレーバー ) (医薬部外品)

販売名:クリンプロ トゥース クリーム s(ソフトミント フレーバー )、クリンプロ トゥース クリーム c(シトラスミント フレーバー )(医薬部外品)

販売名: クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用 届出番号: 13B1X10109000259 / 販売名: クリンプロ XT バーニッシュ 認証番号: 221AKBZX00082000 販売名: スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブ 認証番号: 224AKBZX00054000 / 販売名: スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ 認証番号: 224AKBZX00142000

3M、クリンプロ、スコッチボンドは、3M社の商標です。

※掲載の内容および希望医院価格は、2019年10月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

Web

Q 3 M 歯科

00,0120-332-329 Please Recycle, Printed in Japan. 9:00~17:00 /月~金(土日祝年末年始は除く) フリーダイヤルが繋がらない場合は、 DEN-868-FJ (101905) PN/e. 03-6409-3157をご利用ください。

スリーエム ジャパン株式会社 歯科用製品事業部

http://go.3M.com/dental-jp

© 3M 2019. All Rights Reserved.