

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ ペンタ™ アルジネート印象材 ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器

業界初※ この1台でアルジネートもシリコンも使用可能




※2017年8月時点、日本で販売されている製品を対象とした3M調査による。


業界初※ 1台の練和器で、アルジネートにもシリコーンにも使用可能です。

※2017年8月時点、日本で販売されている製品を対象とした3M調査による。

ペンタミックス™ 自動練和器は、
全てのペンタ™ 印象材製品の
使用が可能です。

3M™ ペンタ™ アルジネート印象材の 製品特長

 爽やかなアップルミントの
香りで不快感を和らげます。

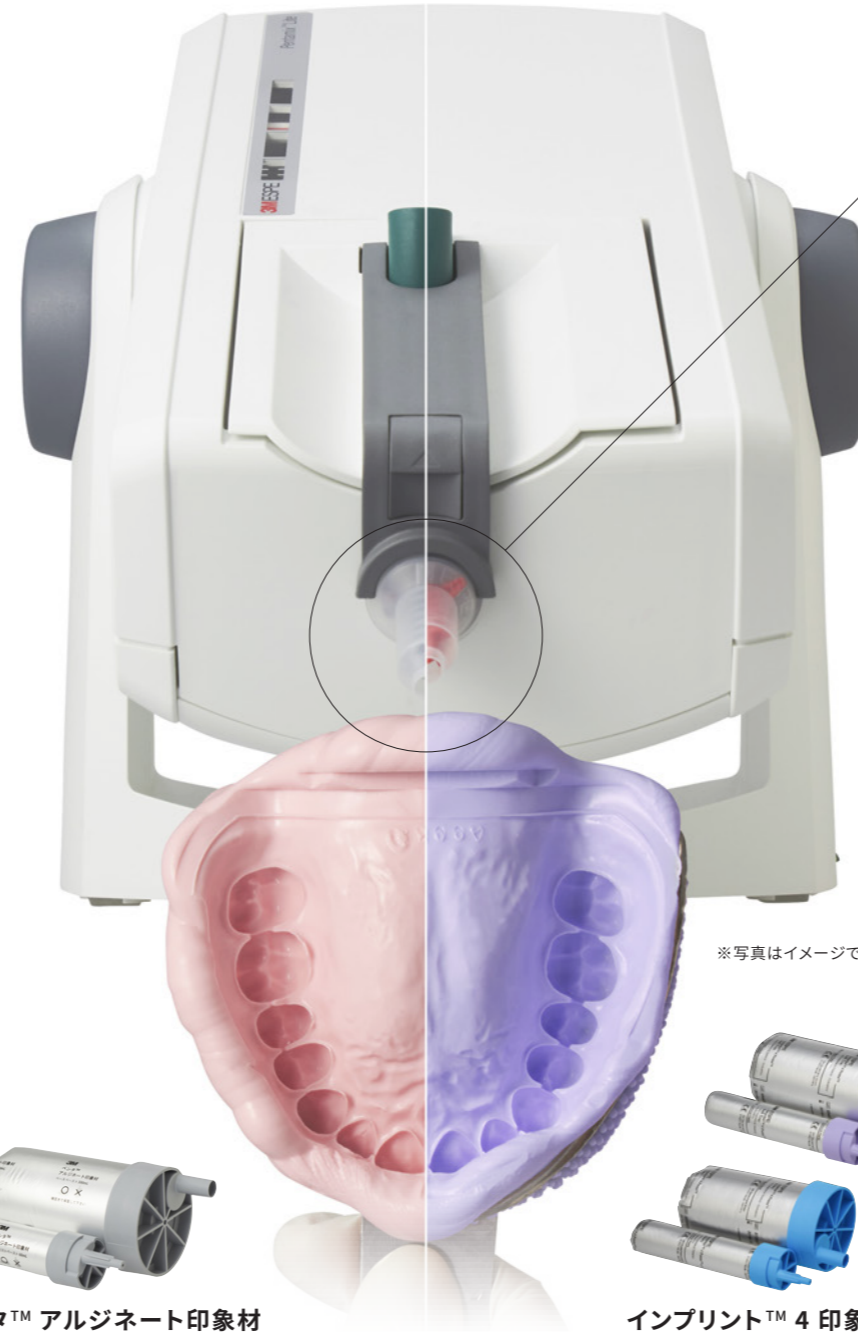

3M™ ペンタ™ アルジネート
ミキシングチップは
清掃することで、
再使用可能です。



1 滑沢な印象表面性状



ペンタミックス™ 印象材自
動練和器での練和により、
均一な練和が可能です。また
寒天とのなじみが良く、緻密
な模型表面が得られます。

※写真はイメージです

3M™ ペンタ™ アルジネート印象材

インプリント™ 4 印象材

3 ボタンひとつで簡単練和

自動練和器の練和ボタンを押すだけで短時間で印象採得の準備が可能です。



手練り
(3M社手練りアルジネート印象材)※2

計量

練和

盛り
付け

90秒

3M™ ペンタ™
アルジネート印象材

練和・盛り付け

30秒



60秒
短縮※3

トータル操作時間※4: 1分20秒 口腔内保持時間※5: 2分30秒

※2 日本未発売 ※3 下顎Mサイズトレーの場合
※4 練和開始から硬化の始まりまでの経過時間 (JIS-T6505: 2005 23°C環境下) ※5 37°C環境下



2 気泡が少なく、均一な練和

手練り
(3M社手練りアルジネート印象材)※1

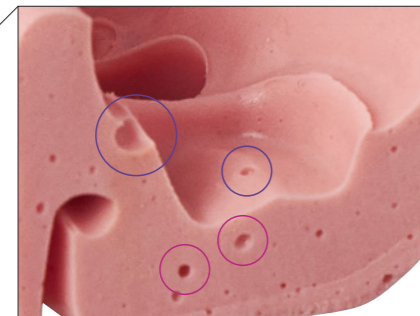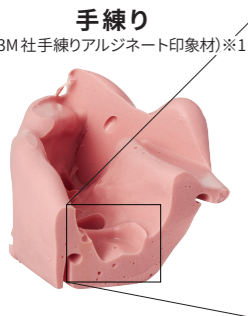

手練りでは、支台歯周辺部に気泡が混
入しやすく、石膏模型の精度に影響を
及ぼすリスクがあります。


3M™ ペンタ™
アルジネート印象材

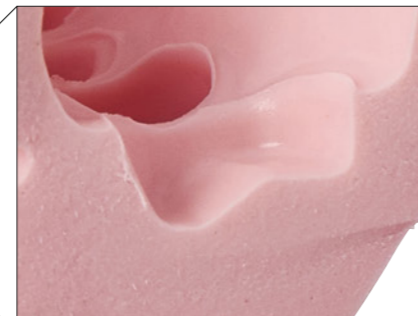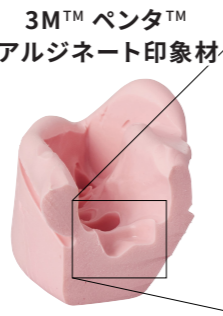

自動練和による安定した練和により、
気泡が少なく均一な練和が可能になり、
再印象・再製のリスクが低減します。

※1 日本未発売

4 無駄なく経済的

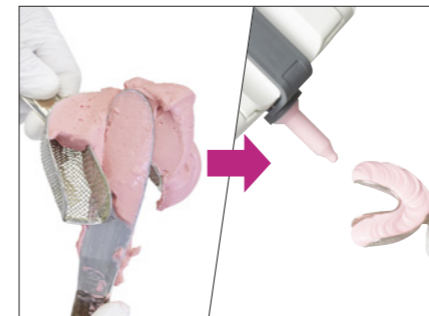

必要量をトレーに直接盛り付けることで、
無駄な印象材の廃棄量を削減することが
できます。

5 作業環境改善



練和時の粉末の飛散もなく、水も不要の
ため、診療スペース内での利用など、
設置場所の自由度も高まります。

6 印象材の切替も簡単



カートリッジ毎の交換で、シリコーン
印象材への交換も簡単です。

ペンタミックス™ 印象材自動練和器をお持ちでない方に

ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器 導入パック




- 内容：
- ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器 ×1台
 - インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ソフトトレー ボディ 360mL×1セット (71550)
 - インプリント™ 4 印象材 ライト ボディ 50mL×1本 (71558)
 - ペンタ™ ミキシングチップレッド×10本 (77949)
 - ギャラン™ ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)
 - 3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)
 - 3M™ ペンタ™ アルジネート 印象材 (360mL) ×5セット (8080)
 - 3M™ ペンタ™ アルジネート ミキシングチップ ×5個 (8083)
 - ペンタミックス™ ライト カートリッジ×1個 (77944)
 - 清掃用ブラシ×1個

希望医院価格：129,000円

製品番号：
8070：50Hz 東日本用
8071：60Hz 西日本用

すでにペンタミックス™ 印象材自動練和器をお使いの方に

3M™ ペンタ™ アルジネート 印象材 導入パック

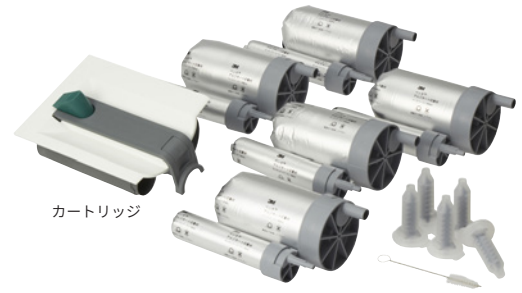

- 内容：
- 3M™ ペンタ™ アルジネート 印象材 (360mL) ×5セット (8080)
 - 3M™ ペンタ™ アルジネート ミキシングチップ ×5個 (8083)
 - ペンタミックス™ ライト カートリッジ ×1個 (77944)※
 - 清掃用ブラシ×1個

希望医院価格：17,100円
 製品番号：**8061**

※ペンタミックス™ 3 印象材自動練和器用と
 ペンタミックス™ 2 印象材自動練和器用も
 同じ価格でご用意しております。

製品番号：
8062：ペンタミックス™ 3 印象材自動練和器用
8063：ペンタミックス™ 2 印象材自動練和器用

カートリッジ無しを導入パックも
 ご用意しています。
 製品番号：**8060**
 希望医院価格：9,450円

3M™ ペンタ™ アルジネート 印象材 リフィルパック



内容：3M™ ペンタ™ アルジネート 印象材 (360mL) ×5セット
 製品番号：**8080** / 希望医院価格：6,200円



内容：3M™ ペンタ™ アルジネート 印象材 (360mL) ×20セット
 製品番号：**8082** / 希望医院価格：21,920円



内容：3M™ ペンタ™ アルジネート ミキシングチップ ×5個
 製品番号：**8083** / 希望医院価格：3,350円

関連製品



ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器

■50Hz 東日本用 製品番号：**78000**
 希望医院価格：98,000円

■60Hz 西日本用 製品番号：**77908**
 希望医院価格：98,000円

■ペンタミックス™ ライト カートリッジ
 内容：1個
 製品番号：**77944**
 希望医院価格：9,000円



インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ソフトトレー ボディ

内容：ベースペースト 300mL×2本
 キャタリストペースト 60mL×2本
 製品番号：**71550**
 希望医院価格：27,300円

■ダブルパック
 内容：ベースペースト 300mL×4本
 キャタリストペースト 60mL×4本
 製品番号：**71550W**
 希望医院価格：47,300円



インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ヘビー ボディ

内容：ベースペースト 300mL×2本
 キャタリストペースト 60mL×2本
 製品番号：**71484**
 希望医院価格：31,500円

■ダブルパック
 内容：ベースペースト 300mL×4本
 キャタリストペースト 60mL×4本
 製品番号：**71484W**
 希望医院価格：54,600円

販売名：3M ペンタアルジネート印象材 認証番号：229AKBZX00023000 / 販売名：ペンタミックスライト 印象材自動練和器 届出番号：13B1X10109000256 / 販売名：ペンタミックス3 印象材自動練和器 届出番号：13B1X10109000188
 販売名：インプリント4 印象材 認証番号：225AKBZX00168000 / 販売名：ペンタミキシングチップレッド 届出番号：13B1X10109000127 / 販売名：ギャランミキシングチップ 届出番号：13B1X10109000210
 販売名：3M ESPE イントラオーラル シリンジ 届出番号：13B1X10109000254

3M、ESPE、インプリント、ペンタ、ペンタミックス、ギャランは、3M社またはその関連会社の商標です。

※掲載の内容および希望医院価格は、2018年7月現在のものです。
希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。



スリーエム ジャパン株式会社
 ヘルスケアカンパニー

歯科用製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2018. All Rights Reserved.
 DEN-1514-BJ (061810) PN/e.

Web

3M コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
 フリーダイヤルが繋がらない場合は、
 03-6409-3157をご利用ください。