



Clarity™

Soluciones Estéticas para Ortodoncia

Preguntas más frecuentes 3M™ Clarity™ Ultra *Brackets* Autoligantes

Colocación y posicionamiento

1. ¿Los *brackets* autoligantes 3M™ Clarity™ Ultra se envían con las puertas abiertas o cerradas?

Los *brackets* Clarity Ultra se envían con las puertas abiertas, con la finalidad de maximizar su eficiencia al eliminar el paso extra de abrir las puertas para colocar el arco de alambre.



2. ¿Cómo deben colocarse los *brackets* Clarity Ultra?

Los *brackets* Clarity Ultra tienen marcadores verticales y horizontales que sirven como guía para la colocación. Sujetando con un instrumento oclusal/gingival se pueden cerrar las puertas. Para minimizar la fuerza en el concentrador de estrés vertical con una empuñadura mesial/distal, el *bracket* debe recogerse y posicionarse colocando el instrumento en el borde basal del *bracket* y no en la parte alta en las aletas.

3. ¿Qué instrumento se recomienda utilizar para la colocación de los *brackets*?

Las pinzas porta-*brackets* (por ejemplo, REF 804-171) se recomiendan para sujetar y posicionar el *bracket*, ya que ejercen una fuerza menor y más consistente.

4. ¿Cómo retiro la marca de tinta del *bracket*?

Los marcadores de referencia a color sirven de guía visual vertical y horizontal para el posicionamiento de los *brackets*. Los puntos de identificación de colores también se utilizan en la mayoría de los *brackets*. Estos marcadores de referencia y puntos de identificación son solubles en agua. Las marcas de

referencia deben retirarse después de la adhesión, pero antes de la colocación del arco de alambre. Para retirar la tinta de manera más rápida, haga que el paciente se cepille y se enjuague con agua tibia.

Adhesión

1. ¿Cómo evito la acumulación de adhesivo debajo de la puerta?

Para *brackets* que no tienen el Sistema de Recubrimiento Adhesivo 3M™ APC™ Flash-Free, limpie todo el exceso de debajo de la puerta para prevenir la inhibición de la función de la puerta y acumulación de placa. Minimice el potencial de que el adhesivo deje una mancha y reduzca el riesgo de rompimiento del *bracket* durante el procedimiento de remoción de adhesivo.

2. ¿Los *brackets* Clarity Ultra pueden estar doblemente ligados?

Sí. Usted puede ligar doblemente los *brackets* Clarity Ultra. Puede utilizar ligaduras elastoméricas y cadenas, y/o ligaduras metálicas si es necesario.

3. ¿Puedo usar elásticos Clase II con *brackets* Clarity™ Ultra?

Sí. Todos los *brackets* Clarity Ultra superiores e inferiores para caninos y premolares tienen un gancho distal que facilita colocaciones auxiliares.

Apertura y cierre


1. ¿Tengo que usar el 3M™ Unitek™ Instrumento de Apertura y Cierre?

El uso del instrumento Unitek de apertura y cierre para el Sistema Ultra SL (REF 804-155) se recomienda ampliamente. La punta de apertura le permite abrir los *brackets* sin estresar demasiado la puerta. La punta de cierre lo asiste en la inserción del arco de alambre.



2. ¿Cómo cierro la puerta del *bracket* Clarity Ultra usando el instrumento?

1. Descanse las muescas del instrumento de apertura y cierre Unitek (REF 804-155) en el arco, con el puntero alineado debajo de la puerta abierta del *bracket*.
2. Asegúrese de que el arco esté completamente asentado presionando ligeramente o apretando el arco con la herramienta.
3. Apriete la herramienta, empujando el puntero contra la puerta abierta. Continúe apretando hasta que la puerta se cierre.
4. Es posible escuchar un clic cuando la puerta se cierra.

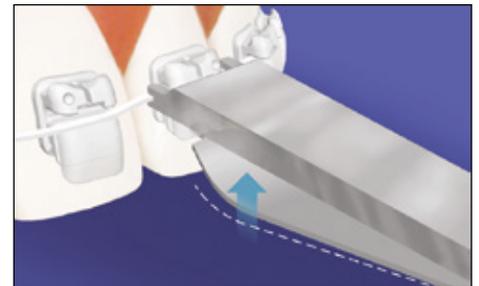

3. ¿Qué sucede si los dientes están muy chuecos como para cerrar la puerta usando el Instrumento Unitek de Apertura y Cierre?

Puede usar sus dedos para cerrar la puerta.

4. ¿En qué dirección se abren las puertas?

Los *brackets* Clarity Ultra se abren de forma oclusal en la parte superior y gingival en la inferior.

5. ¿Cómo puedo confiar en que la puerta del *bracket* está cerrada completamente en su lugar?



El *bracket* está diseñado para hacer clic al abrirse y cerrarse como indicador auditivo y táctil.

Preguntas más frecuentes

3M™ Clarity™ Ultra

6. ¿Cómo abro la puerta de los *Brackets* Autoligantes 3M™ Clarity™ Ultra?

Para abrir la puerta, inserte la punta del 3M™ Unitek™ Instrumento de Apertura-Cierre (REF 804-155) en la ranura horizontal que está justo arriba de la puerta, y gire el instrumento 90 grados (1/4 de vuelta) en cualquier dirección. Esta acción abre la puerta y usted puede escuchar un clic.

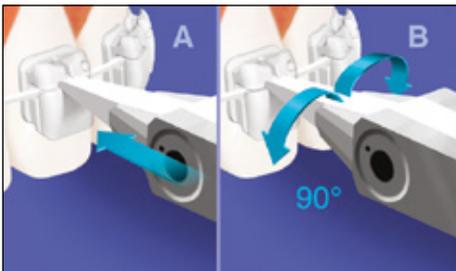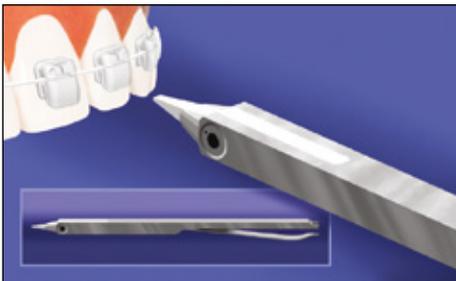

Remoción del *bracket*

1. ¿Qué instrumento debo usar para remover el *bracket*?

Para una experiencia de remoción adecuada se requiere el 3M™ Unitek™ Instrumento de Remoción (REF 804-175) para el sistema de *brackets* Clarity Ultra.




2. ¿Cómo deben descementarse los *Brackets* Autoligantes 3M™ Clarity™ Ultra?

Los *Brackets* Clarity Ultra cuentan con un concentrador de estrés para fracturarse por la mitad al ser removidos. Remueva el adhesivo sin el arco y la ligadura.

Tome el instrumento Unitek de remoción de modo tal que la muesca de la guía central y el logo de 3M estén hacia arriba. Ubique la guía central del instrumento verticalmente en el centro del *bracket*, de forma perpendicular a la ranura del arco. Asegúrese de que quede posicionado simétricamente, nivele a ras del *bracket* y perpendicular al *bracket*.

Presione ligeramente y luego mueva el *bracket* mesial y distalmente; levántelo con mucho cuidado, manteniendo el *bracket* sujetado con el instrumento para conservar las piezas removidas en las puntas del instrumento.

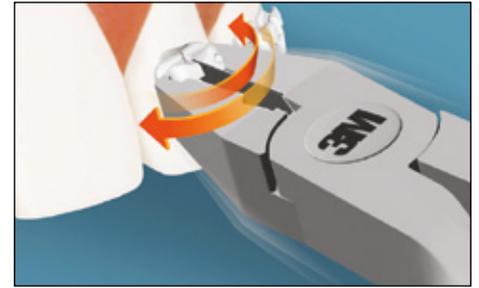

3. ¿Pueden retirarse los *brackets* Clarity Ultra con el arco colocado?

No. Para minimizar la posibilidad de perder piezas cerámicas, el arco debe ser removido durante el retiro de los *brackets* Clarity Ultra.

Tratamiento general

1. ¿Cómo limitan los *brackets* Clarity Ultra la interferencia oclusal de los *brackets* de cerámica?

Las puertas de los *brackets* tienen una superficie oclusal cónica, diseñada para ayudar a minimizar la interferencia oclusal. Están diseñados para acomodar las guardas de las ligaduras para su protección. Se pueden utilizar dispositivos oclusales de mordida cuando sea necesario.

2. ¿Con qué otros sistemas de *brackets* se pueden usar los *brackets* Clarity Ultra?

Los *brackets* Clarity Ultra se pueden usar en el mismo arco con 3M™ Clarity™ ADVANCED *Brackets* Cerámicos o con 3M™ Victory Series™ *Brackets* Metálicos Bajo Perfil (LP), dado que las dimensiones de entrada/salida son las mismas. Los *brackets* Clarity Ultra también se pueden usar con los Tubos Bucales 3M™ Victory Series™ Superior Fit.

Para información adicional consulte las instrucciones de uso. REF 011-703.



3M Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 EUA

Teléfono 1-800-423-4588
Web 3M.com/ortho

3M, APC, Clarity, Unitek y Victoria Series son marcas registradas de 3M.

© 3M 2018. Todos los derechos reservados.