

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ マルチポア™ ドライ サージカルテープ



速乾性のある基材を採用し、
水分の影響を受けにくく、
しっかりとした固定をサポートします。





しっかり 固定

外部からの水分の影響を受けにくく、
固定のゆるみ、はがれのリスクを低減します。

速乾性断面イメージ


外から入った水分は1層目から2層目に移行するため、基材表面をドライに保ちます。

速乾性のある基材を使用

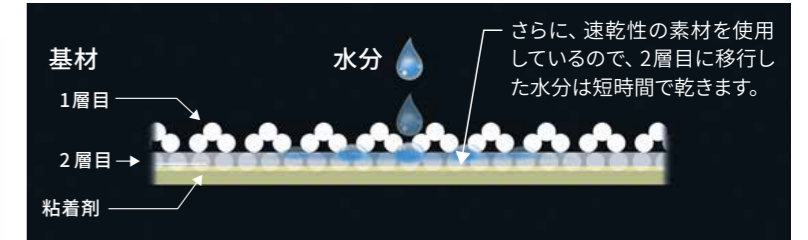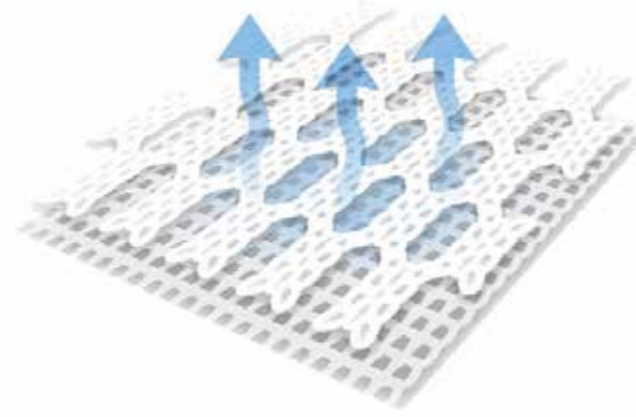

重ねて貼る時の 注意点

テープを貼った上からよく押さえてください。圧着させることで、より安定した固定力を得ることができます。

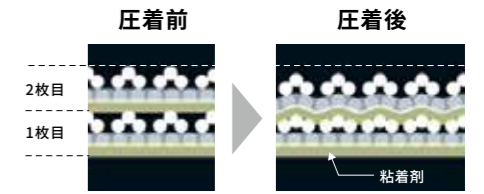


肌への やさしさ

縦・横に伸縮することで、
機械的刺激やつっぱり感を軽減します。



縦・横に適切な伸縮性

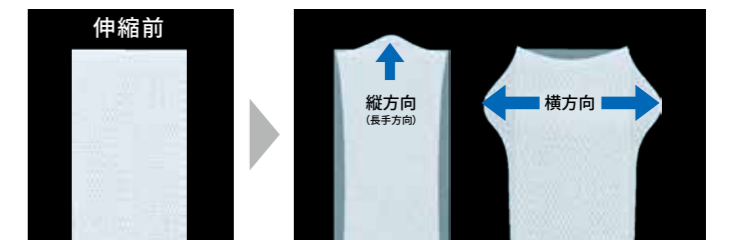

縦横方向への伸びやすさにより、皮膚になじみやすく、貼付中の皮膚への機械的刺激やつっぱり感を軽減します。

用途例



気管内チューブ固定



ドレーン固定



末梢動脈ルート固定



硬膜外麻酔チューブ固定

※写真は各用途の一例をお示ししたものです。

3M™ マルチポア™ ドライ サージカルテープ

製品番号	テープ幅×全長	ライナー紙 スリット	入れ目		希望病院価格 円/箱
	mm×m		巻/箱	箱/パック	
3730-12.5	12.5×5	なし	12	12	1,950
3730-25	25×5		24		7,800
3730-37.5	37.5×5		12		5,850
3730-50	50×5	あり	6	6	7,800
3730-75	75×5				5,850
3730-100	100×5				7,800



3730

個包装パック

製品番号	テープ幅×全長	ライナー紙 スリット	入れ目		希望病院価格 円/箱
	mm×m		巻/箱	箱/パック	
3750-25	25×5	なし	2	6	800
3750-50	50×5	あり	1		



3750-50

注意事項

貼付前

- 本品は低アレルギー性*のアクリル系粘着剤を使用しておりますが、粘着性製品により皮膚トラブルを起こしやすい方やアレルギー体質の方は事前に医師にご相談ください。
- ※アレルギーテスト済み。全ての方にアレルギーが起きないという訳ではありません。

貼付時

- 本品は未滅菌品です。
創部、穿刺部などの無菌手技が必要とされる部位や、皮膚に異常のある部位に直接貼らないでください。
- 強い固定力が必要なご用途では、テープが粘着する面積を大きくしたり、予め粘着力の高い別の製品をご使用いただくなど十分ご注意ください。
- テープを貼る前に、皮膚を清潔にし、消毒薬などの液体は完全に乾かしてください。
- 皮膚の状態や器具類の材質によっては、付きにくい場合があります。特にシリコーン素材、フッ素系樹脂の表面には付きにくいのでご注意ください。
- 臨床上必要な場合以外はテープや皮膚をひっぱらずに貼り、上からよく押さえて十分に密着させてください。
- 皮膚やカテーテル類の表面に油分や水分があると付きにくい場合があります。

貼付中

- 動きのある部位への貼付や圧迫固定用途では、使用中に皮膚がひっぱられることにより、発赤や水疱など皮膚トラブルを起こす場合があります。
- 過度な動きや負荷がかかると、剥がれることがあります。
- 汚れたり、濡れたりした場合は、新しい製品に貼りかえてください。
- 長時間皮膚が蒸れた状態になると皮膚トラブルの原因となりますのでご注意ください。
- 皮膚の状態や器具類の材質によって、強く粘着して剥がしにくくなったり、剥離後の皮膚や器具類に粘着剤が残る場合があります。
- 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください。

剥離時


- 皮膚の負担を軽くするため、テープを約180度に折り返し、皮膚が持ち上がらないように手で押さえながら、体毛の方向に逆らわずゆっくりと剥がしてください。
- 本品はリムーバーを用いて剥離しないでください。のり残りが起こる場合があります。
皮膚に負担をかけないで剥がすためには、ベビーオイル等を塗布しながら剥がしてください。

保管時

- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所にて保管してください。

テープを正しくお使いいただくためのポイント

本品を剥がす場合は、皮膚の負担を軽くするため、テープを約180度に折り返し、皮膚が持ち上がらないように手で押さえながら、体毛の方向に逆らわずゆっくりと剥がしてください。

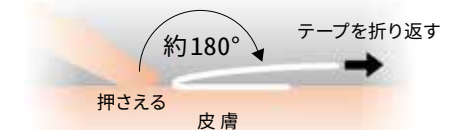

3M, Multipore, マルチポアは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

皮膚創傷ケア製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.
HPM-363-D(111701)DN

2017年11月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます