

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M™ シングルペーシエント聴診器

接触予防対策に 血液・体液汚染対策用に

# 1人の患者さんに 1つの聴診器を！

隔離予防策を必要とする患者さんのケアにおいて、  
交差感染のリスクを軽減するために推奨される予防策の1つです。



One patient  
One stethoscope



Help Reduce  
Cross-Contamination

# 優れた音響性能と快適性。



臨床上十分な音響性能を備えた聴診器です。皮膚に強く押し当てると高周波音、軽く押し当てると低周波音が聴こえます。



## こんな場面での使用を提案します。

scene

1

### 接触予防策が必要な患者さんの専用聴診器に

隔離予防策において患者専用の機器を用いることはCDCガイドラインで推奨されています。本製品は通常の聴診器と区別できるよう特別な色を付けています。

## CDC2007『隔離予防策のためのCDCガイドライン』第4章勧告V.B. 接触予防策より抜粋：

推奨度

IB<sup>\*</sup>

急性期病院、長期ケア医療環境、そのほかの居住環境では、(血圧計のカフなどは)ノンクリティカルの使い捨て患者ケア用医療器具を使用したり、患者専用の機器を用いる。機器を複数の患者に共有せざるを得ない場合は、別の患者に使用する前にクリーニングし、消毒すること。

<sup>\*</sup> IB：実施が強く推奨され、信頼できる臨床研究、疫学的研究、強力な理論的証拠により支持された勧告

scene

2

### 血液や体液に汚染される可能性の高い場面での交差感染防止対策に



#### 正しい使用方法

イアーチューブの前後の向きを確認し、正しい方向(右写真参照)になるようにイアーチップを耳に挿入してください。



間違った挿入方法



正しい挿入方法



#### 使用上の注意

- 専用患者への使用が終了した場合や、使用中の血液、液体その他の汚染物等で目に見えて汚染された場合、本品が破損した場合は、施設の基準に従って適切な方法で破棄すること。
- 洗浄、消毒のため薬液に浸したり、滅菌したりしないこと。

<sup>\*</sup> 本製品は通常の聴診器と区別できるよう特別な色を付けています。

<sup>\*</sup> 3M<sup>TM</sup> シングルパシエント聴診器には天然ゴムラテックスを使用しておりません。

製品名	製品番号	入れ目	
		器/箱	箱/ケース
3M <sup>TM</sup> シングルパシエント聴診器	SPS-YA1010	10	4

販売名：3M シングルパシエント聴診器 医療機器届出番号：13B1X10109000266

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.  
HPM-817-B(0119)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます