

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# 3M™ キャスティング製品

3M™ Casting Products



# Casting

## 3M™ スコッチキャスト™ プラス キャスティング・テープ

3M™ Scotchcast™ Plus Casting Tape

### 特長

- 縦、横方向に加え、斜め方向にも伸縮性があるため、様々な形にフィットします。
- テープがさらっとしてべたつくことなくスムーズに巻けます。モールドディングも容易です。
- 軽く、運動がしやすく、かつ耐久性があります。
- 短時間で硬化し、強くしっかりと固定します。テープ同士の接着性が良く、層間剥離が少ない設計です。

### [使用方法]

- テープを水中で3回揉んだ場合のセットタイム※は約4分です。
- 水中で揉まずに2～3秒浸してから巻いた場合のセットタイムは約5分です。

※セットタイム：水に浸してからテープを巻き終え、モールドディングを行った後、キャストから手を放しても形が維持される程度に硬化するまでの時間



### 3M™ スコッチキャスト™ プラス キャスティング・テープ

製品番号	テープ巾×全長	カラー	入れ目 巻/箱
82002	5.0cm (2in) × 3.6m	ホワイト	10
82003	7.6cm (3in) × 3.6m		
82004	10.1cm (4in) × 3.6m		
82005	12.7cm (5in) × 3.6m		
82002B	5.0cm (2in) × 3.6m	ブルー	
82003B	7.6cm (3in) × 3.6m		
82004B	10.1cm (4in) × 3.6m		
82002L	5.0cm (2in) × 3.6m	ライトブルー	
82003L	7.6cm (3in) × 3.6m		
82004L	10.1cm (4in) × 3.6m	ピンク	
82002X	5.0cm (2in) × 3.6m		
82003X	7.6cm (3in) × 3.6m		
82004X	10.1cm (4in) × 3.6m		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000223 販売名：スコッチキャスト プラス

# Soft Casting

## 3M™ スコッチキャスト™ ソフト キャスト

3M™ Scotchcast™ Soft Cast

### 特長

- 硬化後も適度な弾力性と柔軟性を保ちます。
- 巻く層数により固定力を調節することが可能です。
- 簡易な装具を作成することが可能です。
- 硬化後も柔らかさがあり、エッジ部分が肌に触れても不快感が少ないです。

### 適用例

- 上肢等、荷重のかからない部位の骨折。
- 捻挫、靭帯損傷。



### [除去方法]



ハサミで切る  
除去はハサミで切るか、ほどいて外すこともできます。ハサミで切れば、簡単に着離脱できます。



ほどいて外す

### 3M™ スコッチキャスト™ ソフト キャスト

製品番号	テープ巾×全長	カラー	入れ目 巻/箱
82101	2.5cm (1in) × 1.8m	ホワイト	10
82102	5.0cm (2in) × 3.6m		
82103	7.6cm (3in) × 3.6m		
82104	10.1cm (4in) × 3.6m		
82105	12.7cm (5in) × 3.6m		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000221 販売名：スリーエム ソフト キャスト

添付文書を読んでからご使用ください。

# Splint

## 特長

- キャスト材を取り出すことなく、そのまま濡らすことができるので、作業性が向上します。
- 被覆面は、通気性に優れた不織布を使用しているためムレが少なく、長時間装着しても快適さが損なわれません。
- 7層のキャスト材を使用しており、硬化早期から固定に必要な強度が出ます。
- キャスト材は縫い合わされていないので、モールドイングの際に腕や足の形に馴染みやすく形成しやすい設計です。

## [使用方法]



開封したスプリントを室温の水に浸し、3~4回しっかりと水中でもんでください。

※使用時にゴム手袋は不要です。

- ・スプリントを水中で3~4回揉んでよく絞り巻くと、約2~3分で硬化し、約15分後に最終的な強度が得られます。
- ・不織布とキャストの間に水を流し入れ乾かしてから巻くと、約5~6分で硬化し、約15分後に最終的な強度が得られます。




豊富なサイズにより様々な部位に対応し、モールドイングによりカスタムフィットが得られます。



72312



73004

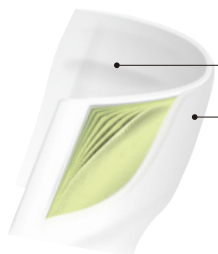

患部面：フェルトパッド（撥水性）

被覆面：不織布

### プリカットタイプ

#### 3M™ スコッチキャスト™ コンフォーマブル シーネ

製品番号	テープ巾×全長	使用箇所	カラー	入れ目 枚/箱
72210	5.1cm (2in) × 25.4cm	前腕用	ホワイト	10
72312	7.6cm (3in) × 30.5cm			
72335	7.6cm (3in) × 88.9cm	前腕及び上腕用		
72415	10.1cm (4in) × 38.1cm	前腕用		
72430	10.1cm (4in) × 76.2cm	前腕及び上腕、下肢用		
72530	12.7cm (5in) × 76.2cm	下肢用		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000222 販売名：スコッチキャストコンフォーマブルシーネ

### フリーカットタイプ

#### 3M™ スコッチキャスト™ コンフォーマブル ロールスプリント

製品番号	テープ巾×全長	カラー	入れ目
			ロール/箱
73002	5.0cm (2in) × 4.5m	ホワイト	1
73003	7.6cm (3in) × 4.5m		
73004	10.1cm (4in) × 4.5m		
73005	12.7cm (5in) × 4.5m		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000143 販売名：スコッチキャストコンフォーマブルロールスプリント

# Accessories



MS03  
(撥水性)



MW03

### 3M™ ストッキネット

ポリエステル製のチューブ包帯で、撥水性に富んでいます。

(撥水性)

製品番号	テープ巾×全長	カラー	入れ目
			巻/箱
MS01	2.5cm (1in) × 22.8m	ホワイト	1
MS02	5.0cm (2in) × 22.8m		
MS03	7.5cm (3in) × 22.8m		
MS04	10.0cm (4in) × 22.8m		

### 3M™ キャストパッド

ポリエステル製のクッション材です。

製品番号	テープ巾×全長	カラー	入れ目
			巻/袋
MW02	5.0cm (2in) × 3.6m	ホワイト	20
MW03	7.5cm (3in) × 3.6m		
MW04	10.0cm (4in) × 3.6m		
MW06	15.0cm (6in) × 3.6m		

2020年9月発行

3M、Scotchcast、スコッチキャストは、3M社の商標です。

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社  
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2020. All Rights Reserved.  
HPM-036-M (092002)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)