

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ キャスティング製品

3M™ Casting Products



Casting

3M™ スコッチキャスト™ プラス キャスティング・テープ 3M™ Scotchcast™ Plus Casting Tape

特長

- 縦、横方向に加え、斜め方向にも伸縮性があるため、様々な形にフィットします。
- テープがさらっとしてべたつくことなくスムーズに巻けます。モールディングも容易です。
- 軽く、運動がしやすく、かつ耐久性があります。
- 短時間で硬化し、強くしっかりと固定します。テープ同士の接着性が良く、層間剥離が少ない設計です。

[使用方法]

- テープを水中で3回揉んだ場合のセットタイム※は約4分です。
- 水中で揉まずに2～3秒浸してから巻いた場合のセットタイムは約5分です。

※セットタイム：水に浸してからテープを巻き終え、モールディングを行った後、キャストから手を放しても形が維持される程度に硬化するまでの時間



3M™ スコッチキャスト™ プラス キャスティング・テープ

製品番号	テープ巾×全長	カラー	入れ目
			巻/箱
82002	5.0cm (2in) × 3.6m	ホワイト	10
82003	7.6cm (3in) × 3.6m		
82004	10.1cm (4in) × 3.6m		
82005	12.7cm (5in) × 3.6m		
82002B	5.0cm (2in) × 3.6m	ブルー	
82003B	7.6cm (3in) × 3.6m		
82004B	10.1cm (4in) × 3.6m		
82002L	5.0cm (2in) × 3.6m	ライトブルー	
82003L	7.6cm (3in) × 3.6m		
82004L	10.1cm (4in) × 3.6m	ピンク	
82002X	5.0cm (2in) × 3.6m		
82003X	7.6cm (3in) × 3.6m		
82004X	10.1cm (4in) × 3.6m		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000223 販売名：スコッチキャスト プラス

Soft Casting

3M™ スコッチキャスト™ ソフト キャスト 3M™ Scotchcast™ Soft Cast

特長

- 硬化後も適度な弾力性と柔軟性を保ちます。
- 巻く層数により固定力を調節することが可能です。
- 簡易な装具を作成することが可能です。
- 硬化後も柔らかさがあり、エッジ部分が肌に触れても不快感が少ないです。

適用例

- 上肢等、荷重のかからない部位の骨折。
- 捻挫、靭帯損傷。



[除去方法]



ハサミで切る
除去はハサミで切るか、ほどいて外すこともできます。ハサミで切れば、簡単に着離脱できます。



ほどいて外す

3M™ スコッチキャスト™ ソフト キャスト

製品番号	テープ巾×全長	カラー	入れ目
			巻/箱
82101	2.5cm (1in) × 1.8m	ホワイト	10
82102	5.0cm (2in) × 3.6m		
82103	7.6cm (3in) × 3.6m		
82104	10.1cm (4in) × 3.6m		
82105	12.7cm (5in) × 3.6m		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000221 販売名：スリーエム ソフト キャスト

添付文書を読んでからご使用ください。

Splint

3M™ スコッチキャスト™ クイックステップ スプリント

3M™ Scotchcast™ QuickStep Splint

特長


- 両面ともクッションとなる通気性、撥水性のフェルトパッドを使用しており、裏表を気にすることなく作業できます。
- 7層のキャスト材を使用しており、水で硬化することで患部を固定できる強度が発現します。
- モールディングしやすく腕や足の形に馴染みやすい設計で、快適な装着をサポートします。

[使用方法]

- 1) 開封したスプリントを常温 (21 ~ 24℃) の水で濡らしてください。
※中心のキャスト材をトリミングする際はゴム手袋を着用してください。
- スプリントの中心にあるガラス繊維のキャスト材に常温の水を注いでください。
- キャスト材をトリミング後、フェルトパッドを再接着させる前にスプレーボトルから水を噴霧しキャスト材を濡らすこともできます。
- スプリントを常温の水に浸す場合は、水中で2 ~ 3回もんで水から取り出し、絞ってよく水を切ってください。
- 2) 濡らした後のスプリントは、水をよく切って乾いたタオルの上に置き、全面をよく押しつけて残りの水分を取ってください。
- 3) スプリントは約3 ~ 4分で硬化し、約20分後に硬化が完了します。



豊富なサイズにより様々な部位に対応し、モールディングによりカスタムフィットが得られます。

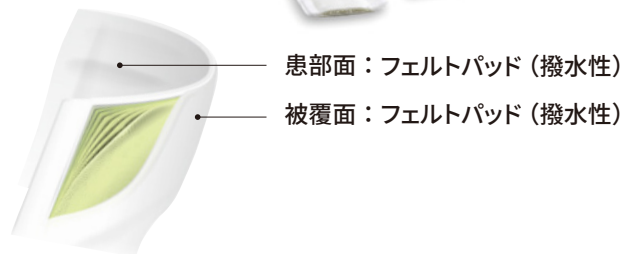

3M™ スコッチキャスト™ クイックステップ スプリント (プリカット)

製品番号	テープ巾 × 全長	使用箇所	カラー	入れ目 枚/箱
75210	5.0cm (2in) × 25.4cm	前腕用	ホワイト	10
75312	7.6cm (3in) × 30.5cm			
75335	7.6cm (3in) × 88.9cm	前腕及び上腕用		
75415	10.1cm (4in) × 38.1cm	前腕用		
75430	10.1cm (4in) × 76.2cm	前腕及び上腕、下肢用		
75530	12.7cm (5in) × 76.2cm	下肢用		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000276 販売名：スコッチキャスト クイックステップ スプリント

3M™ スコッチキャスト™ クイックステップ スプリント (ロールスプリント)

製品番号	テープ巾 × 全長	カラー	入れ目 ロール/箱
74002Q	5.0cm (2in) × 4.5m	ホワイト	1
74003Q	7.6cm (3in) × 4.5m		
74004Q	10.1cm (4in) × 4.5m		
74005Q	12.7cm (5in) × 4.5m		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000276 販売名：スコッチキャスト クイックステップ スプリント

Accessories



MS03
(撥水性)



MW03

3M™ ストッキネット

ポリエステル製のチューブ包帯で、撥水性に富んでいます。

(撥水性)

製品番号	テープ巾 × 全長	カラー	入れ目 巻/箱
MS01	2.5cm (1in) × 22.8m	ホワイト	1
MS02	5.0cm (2in) × 22.8m		
MS03	7.5cm (3in) × 22.8m		
MS04	10.0cm (4in) × 22.8m		

3M™ キャストパッド

ポリエステル製のクッション材です。

製品番号	テープ巾 × 全長	カラー	入れ目 巻/袋
MW02	5.0cm (2in) × 3.6m	ホワイト	20
MW03	7.5cm (3in) × 3.6m		
MW04	10.0cm (4in) × 3.6m		
MW06	15.0cm (6in) × 3.6m		

2021年12月発行

3M、Scotchcast、スコッチキャストは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
HPM-036-N (12210)JT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)