

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ ステリ・ドレープ™ アイソレーションドレープ

3M™ Steri-Drape™ Isolation Drapes (未滅菌)

3M™ ステリ・ドレープ™ タオールドレープ

3M™ Steri-Drape™ Towel Drapes (滅菌)



未滅菌品の用途

- 消毒前の使用
- 術野以外の用途にも

3M™ ステリ・ドレープ™ アイソレーションドレープ

不潔域の隔離や、
消毒液の垂れ込み防止などに
幅広く使用できます。



特長

- しなやかなポリエチレンフィルムのドレープで、なじみやすく粘着剤付きなので、ドレーピングしにくい場所でも固定できます。
- 防水フィルムなので液体の浸透を防ぎ、バリア性が得られます。
- プリカットタイプと自由な長さにカットできるロールタイプがあります。
- 余分な包装材を使用していないので廃棄物削減につながります。
- 簡単に使用でき、スタッフの清掃時間の短縮につながります。

使用方法 (ロールタイプ)



1 ブレードハンドルが手前に来るように左手でディスペンサーを持ちます。

2 必要な長さのドレープを引き出し、ブレードハンドルを押し下げてブレード(刃)を露出させます。

3 ドレープを上部よりすばやくめくるようにしてブレード(刃)にあてて切り取ります。

4 ドレープを切り取ったら直ちにブレードハンドルを元に戻します。

貼付方法 (プリカットタイプ)



1 ライナーを10cm程剥がし、端から貼付していきます。

2 ライナーを剥がしながら、シワができないように注意して、圧着し貼付します。


3 貼付完了です。

貼付時の注意




粘着部にシワができると、写真のように液垂れの原因になります。シワができないように圧着してください。


未使用例

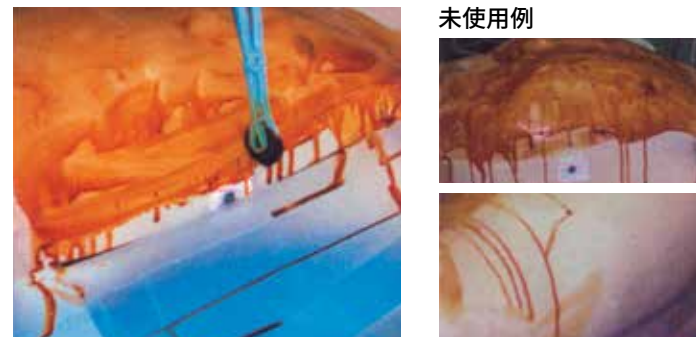

使用例

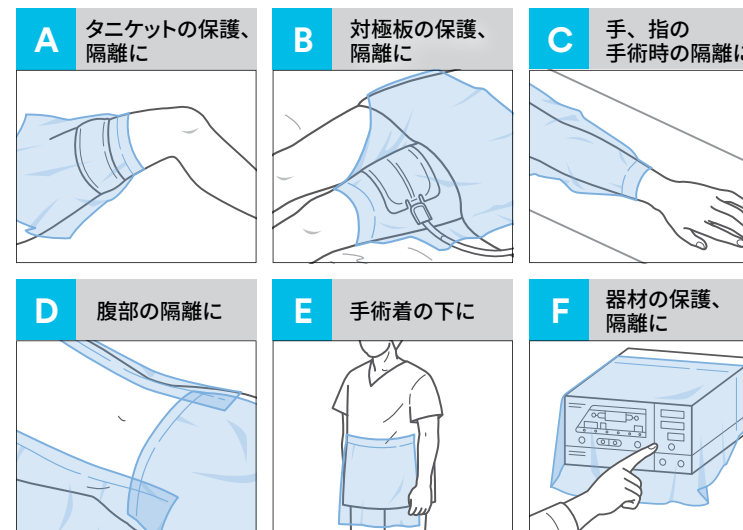

※手術中に操作が必要な器材には滅菌済をご使用ください。

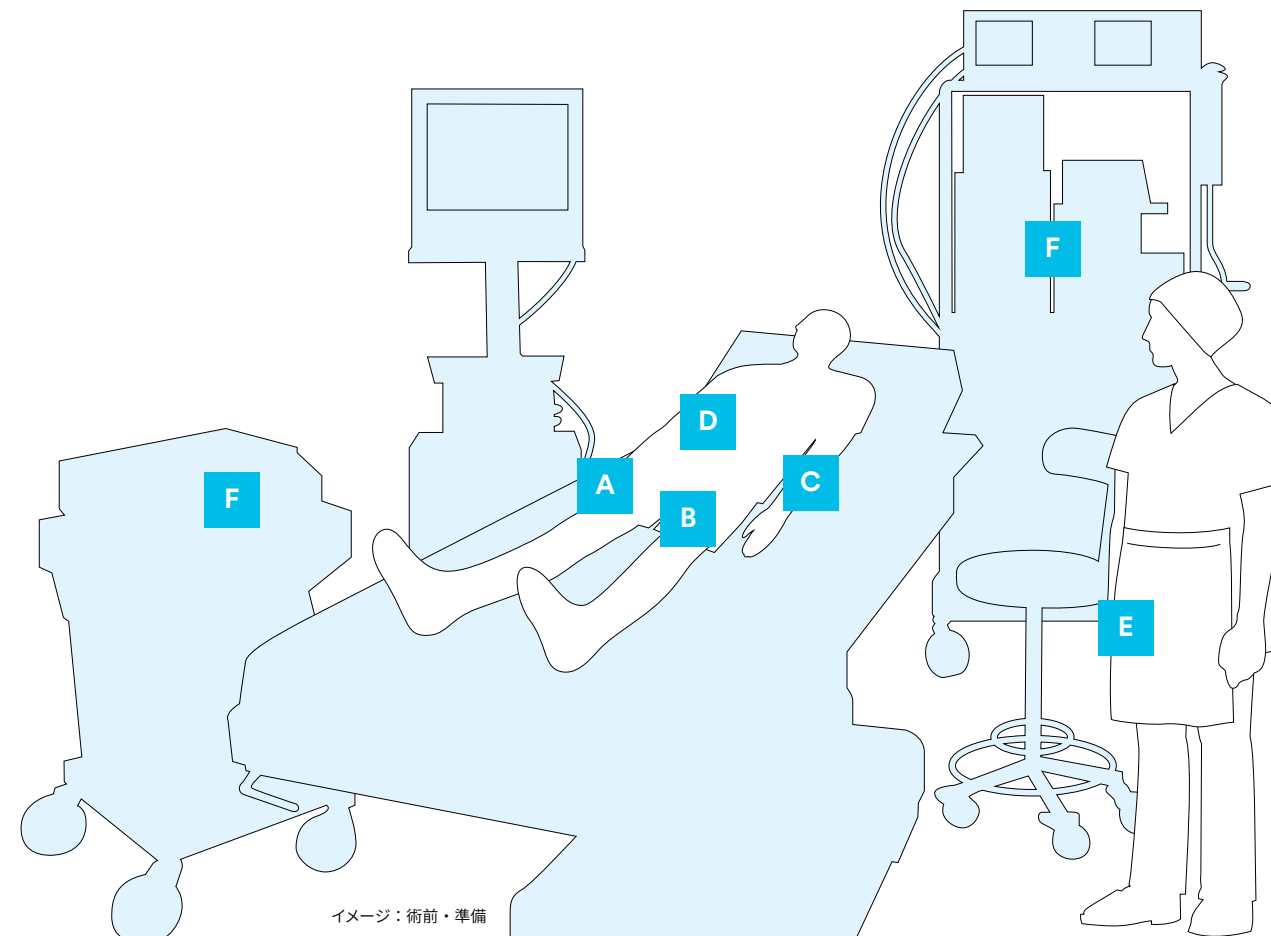

イメージ：術前・準備

滅菌品の用途

- 消毒後の使用
- 術野周辺の用途

3M™ ステリ・ドレープ™ タオルドレープ



清潔域の位置決めや、
術野確保のために使用できます。



特長



- 滅菌品なので、消毒後の術野確保(下貼り)に使用できます。
- しなやかなポリエチレンフィルムのドレープで、なじみやすく粘着剤付きなので、ドレーピングしにくい場所でも固定できます。
- 防水フィルムなので液体の浸透を防ぎ、バリア性が得られます。(不織布のバリア性補強に)
- 45×30cmと45×60cmの2サイズがあります。
- 簡単に使用でき、スタッフの清掃時間の短縮につながります。

使用例

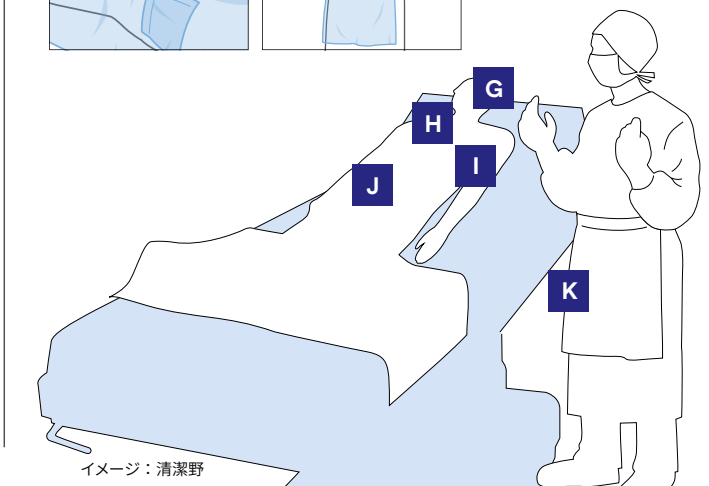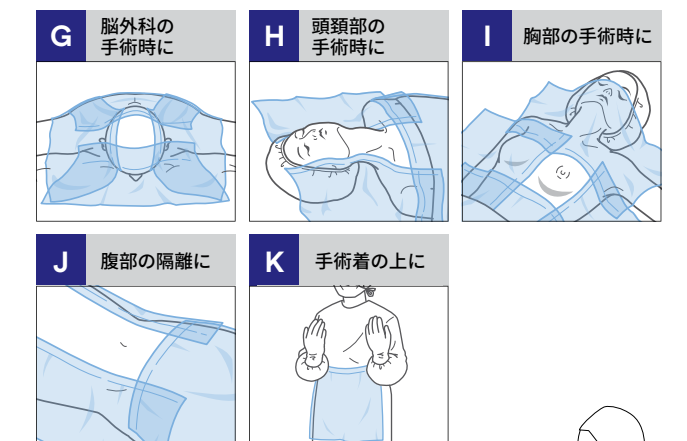

イメージ：清潔野

剥がし方

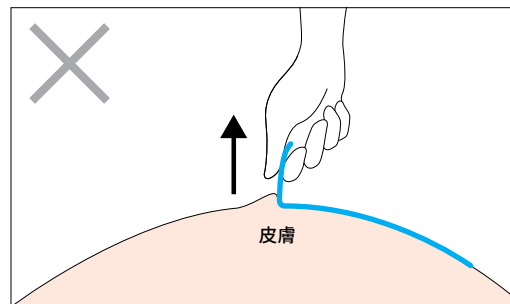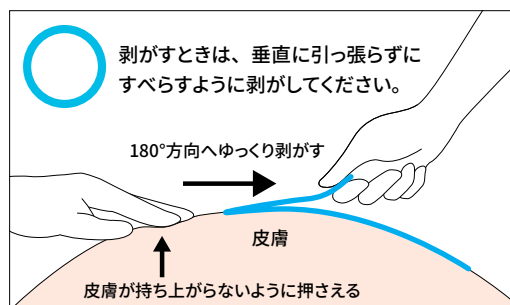

使用上の注意

術前消毒

- 3M™ ステリ・ドレープ™ アイソレーションドレープは未滅菌です。
- 術前の消毒範囲を十分確保できる位置に貼付してください。
- 清潔で乾いた皮膚に貼付してください。
- テープは圧着し、シワ・浮き・剥がれがないことを確かめてください。
- 足元の消毒液垂れにご注意ください。

その他

- かぶれなどの皮膚障害が生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談し適切な処置を行ってください。
- 創傷被覆用ドレッシング材として使用しないでください。
- 本品はポリエチレンフィルムとアクリル系粘着剤からなり、焼却可能です。
- 高温・多湿を避けて保管してください。
- 使用期限は個包装及び外箱に記載されています。



3M™ ステリ・ドレープ™ アイソレーションドレープ

未滅菌

製品番号	外寸 (cm) / 仕様	入れ目		希望病院価格 円/箱
		枚/箱	個/箱	
1000NS	45×30 / プリカットタイプ	50	—	5,500
1010NS	45×60 / プリカットタイプ	50	—	6,000
1000DISP	30×2,280 / ロールタイプ ディスペンサー付	—	1	9,000
1000NSR	30×2,280 / ロールタイプ ディスペンサー1個付	—	8	49,000

3M™ ステリ・ドレープ™ タオールドレープ

ガンマ線滅菌

製品番号	外寸 (粘着部サイズ) cm	入れ目	希望病院価格 円/箱
		枚/箱	
1000	45×30 (45×3)	10	5,300
1010	45×60 (45×3)	10	7,100

3M, Steri-Drape, ステリ・ドレープは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部


<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
HPM-435-E(0219)

2019年2月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます