

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ キュロス™ プロテクタ (ニードルレスコネクタ用)


3M™ Curoso™ Port Protector for needleless valves




イソプロピルアルコールを含浸した フォーム付きキャップで「清潔維持」、 手順の「標準化」と清潔管理の「見える化」を実現します。

清潔維持

ニードルレスコネクタは、そのままの状態では菌や異物等が付着し汚染する可能性があります。輸液セット組み立て時に清潔な本品をはめておくことで、清潔な状態を保つことができます。

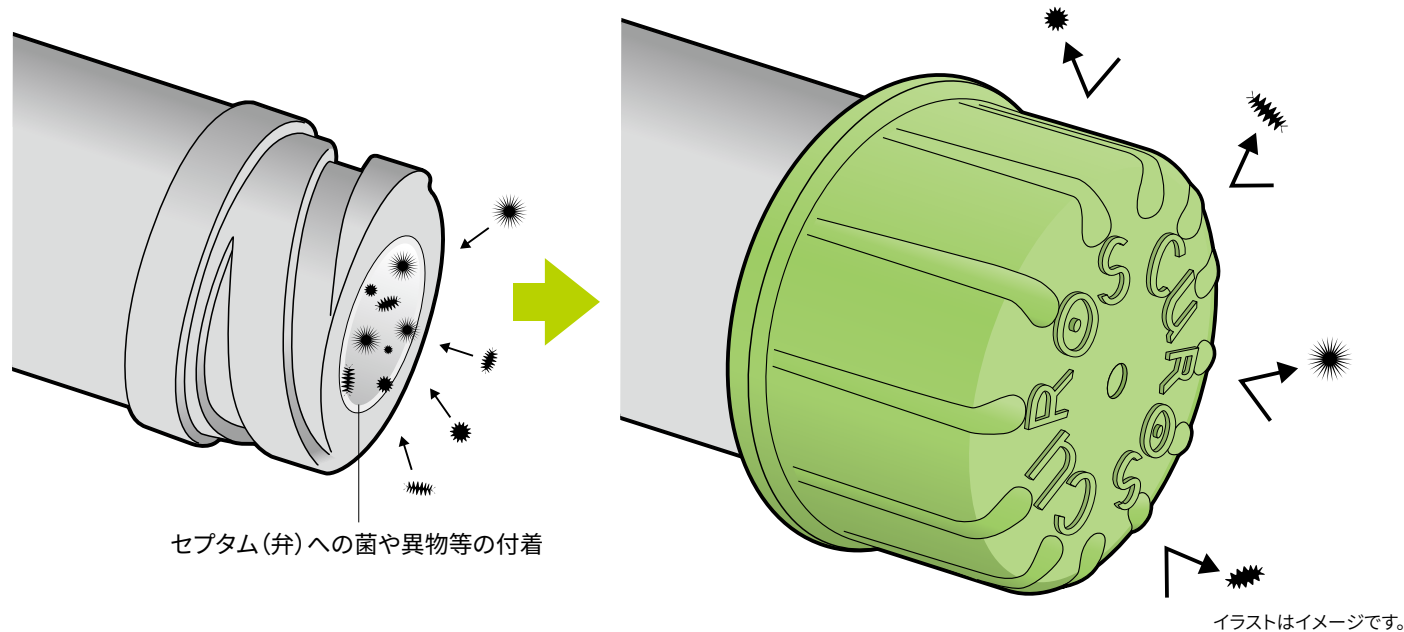

製品の構造

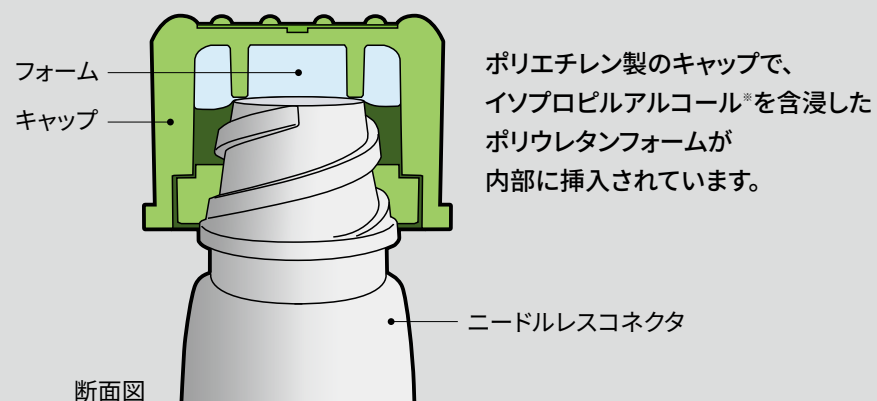

※イソプロピルアルコール70%含有

使い方

Step 1 シール材を剥がします。



Step 2 ニードルレスコネクタのメスルアー部に押し付けて回します。




Step 3 ニードルレスコネクタに輸液セット等を接続する直前に本品を外して廃棄します。



**Single
Use
Only!**

手順の標準化


ニードルレスコネクタの擦拭は医療従事者によって手技がばらつきがちです。輸液セット組み立て時に本品をあらかじめはめておくことで、ニードルレスコネクタの清潔管理手順の統一による標準化に貢献します。

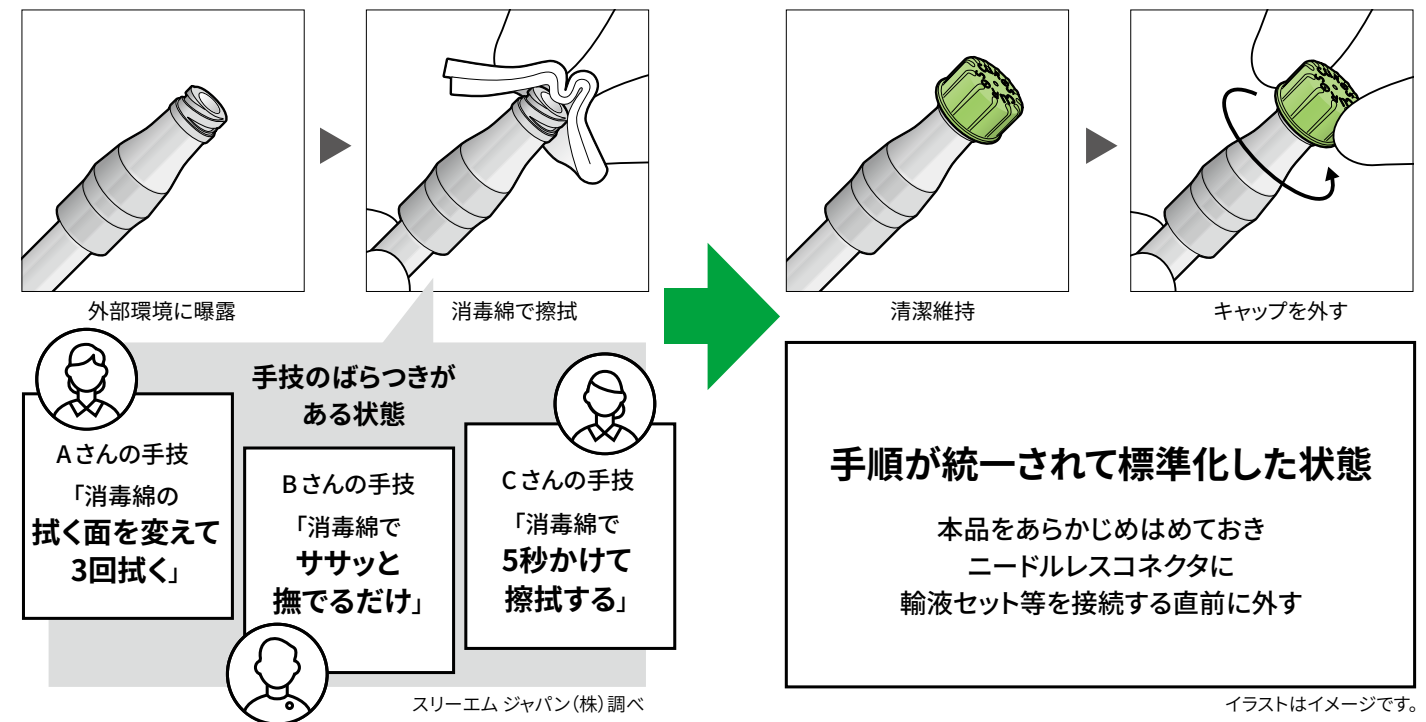


清潔管理の見える化

目立つ「緑のキャップ」で、院内ラウンド時に清潔管理ができていないか一目で確認することができます。また、「見える化」した手技をお互いに確認しあうことで、ニードルレスコネクタの清潔管理に対する意識の向上につながります。



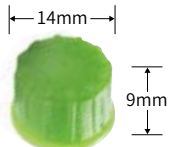

CFF1-270R
原寸大

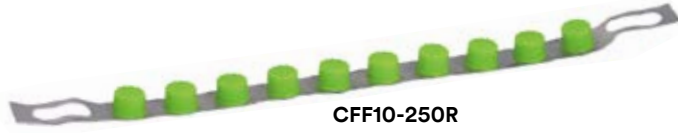

CFF10-250R

3M™キュロス™ プロテクタ (ニードルレスコネクタ用)

製品番号	仕様	入れ目	
		個/箱	本/箱
CFF1-270R	単品タイプ	270	—
CFF10-250R	10連タイプ	250	25

一般医療機器（保護栓） 医療機器届出番号：13B1X10109000262 販売名：キュロス™ プロテクタ

本製品は、ISO80369-7 準拠の閉鎖式ニードルレスコネクタに適応しています。

一部対応していないものもありますので、詳しくはカスタマーコールセンターへお問い合わせください。

【警告】

火気厳禁 [引火性液体を含有しているため。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 閉鎖式ニードルレスコネクタのメスルアー部のみに使用すること。
[開放式コネクタに使用すると製品中のアルコールが輸液ライン中に混入する可能性があるため。]



3M™キュロス™ プロテクタ (オスルアーロックコネクタ用)

製品番号	仕様	入れ目	
		個/箱	本/箱
CM5-200R	5連タイプ	200	40

一般医療機器（保護栓） 医療機器届出番号：13B1X10109000262 販売名：キュロス™ プロテクタ

【警告】

火気厳禁 [引火性液体を含有しているため。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

(注) 添付文書をよく読んでからご使用ください。

3M、CuroS、キュロスは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.
HPM-698-C(0918)

2018年9月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45 ~ 17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます