

Vista: perfil

Vista: frontal

Opacidades

Dicas

1



Translúcido ou
Esmalte



Esmalte palatino
(concha palatina):
faça uma camada
com 0,5 mm de
espessura.

2




Dentina



Dentina: utilize como
dentina profunda.
Faça uma camada
fina, na região do
terço médio. Suba um
pouco na linha de
fratura, para escondê-
la.

3

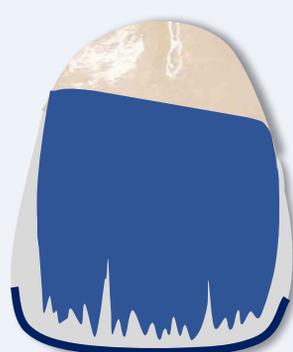

Corpo / Body



Corpo: utilize como
dentina superficial
(maior volume).
Esculpa os mamelos
(deixe um espaço de
0,5 mm de
espessura para a
camada de esmalte
vestibular e
proximal).

4



Translúcido



Translúcida: utilize
como efeito
opalescente do bordo
incisal. Insira uma
pequena quantidade
entre os mamelos e,
dependendo do caso
clínico, também nas
proximais.

5



Esmalte



Esmalte vestibular:
cubra a face
vestibular e as
proximais. O ideal é
que essa camada
não ultrapasse os
0,5 mm, para não
acinzentar a
restauração.